

# SECUREX MASCHE

[www.securex.com.it](http://www.securex.com.it)

Partikel Filtrierende  
Halbmaske


**3D**  
Luftdurchlässige  
Struktur

FFP2

**Ergonomisches Design**  
**Umfassender Schutz**

Model: SX95  
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

CE 2163

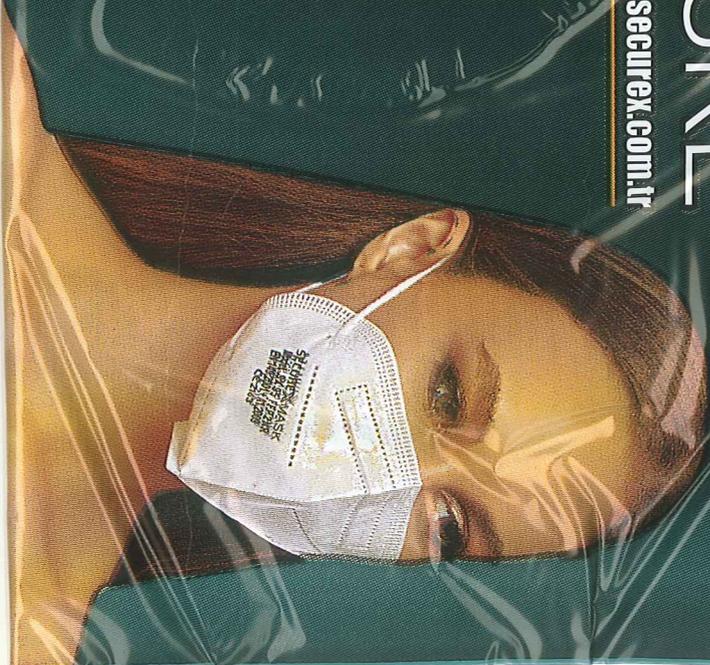

**Nicht entpackte Produkte können bei Temperaturen zwischen -30 °C und + 40 °C sowie bei einer relativen Feuchtigkeit von maximal 80 % gelagert werden. Das Produkt ist ab Herstellungsdatum 2 Jahre haltbar.**



TIR

Entsorgungshinweis: örtlichen Anordnungen entsprechend entsorgen

Prüfstandard: EN149:2001+A1:2009

Herstellungsdatum: siehe Boden Spenderbox

Lot: siehe Boden Spenderbox

Verordnung (EU) 2016/425 vom 09.03.2016 (ABl. L81 vom 31.3.2016, S. 51 ff.)

AFŞARLAR İŞ ELBİSELERİ İŞ GÜV. EKİP. SAN. VE TİC.LTD.Ş.Tİ.

Adres: Yavuztürk Mahallesi Hoşgörü Sokak 1B  
Üsküdar/İstanbul/TÜRKİYE



ENG

**! WARNSHINWEISE** 1. Stellen Sie vor der ersten Verwendung der Masken sicher, dass diese für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Der Träger muss vor der Verwendung angemessen geschult werden und es muss überprüft werden, ob die Masken korrekt passen. 2. Die Masken sind Einwegprodukte und dürfen nicht wiederverwendet werden. 3. Gesichtsbekleidung unter der Maske führt zu Undichtigkeit. Ohne Abdeckung der Gesichtsbekleidung kann vermutlich kein dichtes Anliegen der Maske erreicht werden. 4. Tauschen Sie die Maske bei Beschädigungen oder bei erhöhtem Atemwiderstand aus und entsorgen Sie sie. 5. Verwenden Sie die Maske nicht bei Kontakt mit explosiven Gasen, in stark verschmutzten Umgebungen, in Umgebungen mit Sauerstoffmangel, bei Bränden oder unter Wasser. 6. Patienten mit Herzkrankheiten oder anderen Vorerkrankungen sollten die Maske entsorgen, wenn das Tragen un bequem wird. 7. Masken mit der Kennzeichnung „NR“ dürfen nicht länger als für eine Schicht verwendet werden. 8. Dieses Produkt bietet keine aktive Sauerstoffversorgung. Verwenden Sie das Produkt nur in ausreichend belüfteten Umgebungen mit genügend Sauerstoff zum Atmen. Verwenden Sie diese Maske nicht bei Sauerstoffkonzentrationen unter 19,5 %. 9. Verwenden Sie diese Maske nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre. 10. Das Produkt darf keinesfalls verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt wurde.

**VERWENDUNG**

1. Halten Sie die Maske an der vom Hersteller angegebenen Seite vor sich.  
Der Herstellungsprozess muss dabei sein.
2. Ziehen Sie die Maske vor Ihr Gesicht und spannen Sie sie.
3. Ziehen Sie die Bänder auf beiden Seiten hinter die Ohren.  
Ziehen Sie die Maske zurecht, bis sie bequem sitzt.
4. Legen Sie Ihre Finger auf die Mitte des Metallnasenbügels und schieben Sie zu beiden Seiten, bis der Nasenbügel dicht an die Form Ihrer Nase angedrückt ist.
5. Überprüfen Sie mit den Händen, dass die Maske dicht an Ihrem Gesicht anliegt.

**WARNSHINWEIS:**  
Diese Maske dient nur zum Schutz vor bestimmten Sauerstoffmangel, Atemnot und/oder gasförmigen Aerosolen. Sie schützt nicht vor Sauerstoffmangel, bei Bränden oder unter Wasser. 6. Patienten mit Herzkrankheiten oder anderen Vorerkrankungen sollten die Maske nicht länger als für eine Schicht verwenden. 8. Dieses Produkt bietet keine aktive Sauerstoffversorgung. Verwenden Sie das Produkt nur in ausreichend belüfteten Umgebungen mit genügend Sauerstoff zum Atmen. Verwenden Sie diese Maske nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre. 10. Das Produkt darf keinesfalls verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt wurde.

Einwegprodukt - nicht wiederverwenden

Nicht in direktem Sonnenlicht lagern

Keine Verwendung in feuchter Luft

CE-Kennzeichnung und Name der natürlichen Seife