



АО «Красногвардеец» Завод медицинской техники

СКОБКИ ДЛЯ АППАРАТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ- УШИВАТЕЛЕЙ

Скоба 0,30x4,00x4,80мм; 1000шт/упак
(Производитель Россия, АО «Красногвардеец»)



Позиционируется как

скоба

- размером 0,3x4x4,8мм
- одноразовая нестерильная
- металлическая из
- нержавеющей немагнитной стали
- кобальт-хром-никель-молибденового сплава
- для хирургических ушивателей тканей и органов

Области применения

- ушиватель глотки УГ-70
- ушиватель органов УО-40
- ушиватель органов УО-60
- ушиватель бронхов УБ-40
- сшиватель-ушиватель СУ-80
- аппарат для круговых анастомозов пищеварительного тракта универсальный СПТУ
- ушиватель тканей и органов УТО-70
- и другие хирургические аппараты, где используются скобы размером 0,3x4x4,8 мм

Описание изделия

Скобы для ушивателей

- изготовлены из немагнитной сверх устойчивой к коррозии стали
- срок годности скобок - ввиду минимального окисляющего эффекта сплава из которого они изготовлены - не ограничен
- имеют П-образную форму
- предназначены для использования в хирургических ушивателях разной конструкции
- поставляются по 1000 шт. в нестерильной упаковке

Немагнитные свойства скобок

- позволяют прооперированным больным назначать в дальнейшем при обследовании магнитно-резонансную томографию
- не вызывают смещение скобок в прооперированном органе при воздействии постоянных магнитных полей

Использование скобок (механизм ушивания скобками)

- механизм ушивания органа напоминает процесс использования обычного канцелярского степлера - с той лишь разницей, что в ушивателе используется сразу несколько скобок
- скобки вставляются при помощи пинцета в многоразовые (пластиковые или стальные) магазины
- во время операции - простерилизованный многоразовый магазин вставляется в ушивающий аппарат

- ушиватель подводится в операционной ране к ушивающему органу - и производится спуск затвора ушивателя
- при этом все скобки одновременно выталкиваются из магазина и прокалывают своими ножками ушиваемый орган
- после прокола ножки, уперевшись в наковальню дистальной губки ушивающего аппарата, загибаются - образуя ровный равномерный шов из скобок

Стерилизация скоб

- скобы для хирургических ушивателей могут подвергаться стерилизации в автоклавах
- при использовании с многоразовыми ПЛАСТМАССОВЫМИ магазинами
- магазины предварительно дезинфицируются кипячением с дистиллированной воде в течение 30-35 минут
- скобки вставляются при помощи пинцета в продезинфицированные пластиковые многоразовые магазины
- затем дезинфицируются вместе с магазинами - в 6% перекиси водорода (H₂O₂) при температуре +50 С в течение 3 часов
- при использовании с многоразовыми МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ магазинами
- скобы пинцетом вставляются в стальной многоразовый магазин
- затем стерилизуются в автоклаве вместе с магазином

Комплект стандартный

Скоба (сталь нержавеющая; одноразовая; нестерильная; не намагничивающаяся) (1000шт/компл)

Технические характеристики

Скоба

- материал: сплав марки 40КХНМ (ТУ 14-131-476-80)
- свойства: немагнитная; нержавеющая сталь;
- диаметр проволоки, мм: 0,3
- состав сплава:
- кобальт, %: 39,8
- хром, %: 20,04
- никель, %: 15,74
- молибден, %: 7,36
- углерод, %: 0,08
- кремний, %: 0,22
- марганец, %: 1,8
- сера, %: 0,008
- фосфор, %: 0,005
- железо, %: до 100%

Размеры габаритные, мм: 0,3х4х4,8мм