

Ghid rapid de utilizare a glucometrului

VivaChek™ InoX

Conectorii testului: aceștia sunt introduși cu fața în sus în portul de test

Spațiu pentru probă
proba de sânge este aspirată aici


Port pentru test

Buton ▲

Buton ▼

Ejector de teste

Ecran

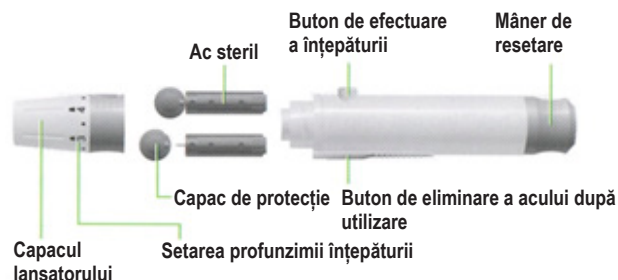

Importator oficial în Republica Moldova „PHARMONY” SRL

Asistență tehnică, vânzare consumabile (teste, ace)

Tel: (+373) 76 771 249, (+373) 68 698 878
E-mail: inox@pharmacy.md


PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI DE ÎNȚEPARE

Important: Înainte de a efectua testul, dezinfectați lansatorul cu un tampon umezit cu alcool sau soluție de apă și săpun. Spălați întotdeauna mâinile cu apă și săpun înainte și după manipularea glucometrului.


1 Scoateți capacul dispozitivului de înțepare și introduceți un ac steril în lansator, așa cum se arată în imagine.




2 După ce ați fixat corect acul în lansator, răsuciți capacul de siguranță a acului până când se slăbește. Utilizați întotdeauna ace de înțepare VivaChek pentru o funcționare optimă.

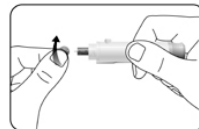


3 Fixați capacul de siguranță înapoi pe lansatorul de ace.

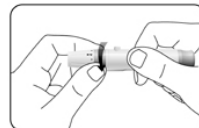

4 Profundimea înțepăturii depinde de setarea capacului și presiunea aplicată. Reglați adâncimea înțepăturii prin rotirea capacului la una din cele 5 poziții setate.

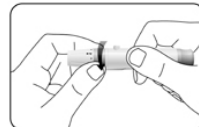


5 Trageți și eliberați mânerul de resetare.

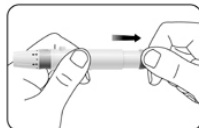

EFFECTUAREA UNUI TEST DE MĂSURARE A GLICEMIEI

1 Extrageți o bandă de testare VivaChek din flacon. Închideți strâns capacul flaconului imediat după ce ați scos banda de testare.

2 Se introduce banda de test în glucometru după cum indică săgeata. Glucometrul pornește automat.

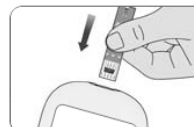

3 Pe ecran va apărea imaginea benzii de testare și o picătură de sânge care este afișată intermitent, ceea ce indică faptul că glucometrul este pregătit pentru efectuarea măsurării. În caz că nu apare acest simbol, verificați corectitudinea introducerii benzii de testare.




4 Plasați dispozitivul de înțepare cu capacul de protecție pe partea laterală a degetului. Apăsați butonul de efectuare a înțepăturii. În urma acestor acțiuni obțineți o picătură de sânge. (Puteți masa degetul în direcția înțepăturii pentru a forma picătura. Nu apăsați în jurul înțepăturii).



5 Atingeți imediat picătura de sânge cu vârful benzii de testare. Sângele va fi aspirat automat.
Atenție nu aplicați picătura de sânge pe partea superioară a benzii de testare.




6 În următoarele 5 secunde glucometrul va afișa rezultatul pe ecran și-l va păstra în mod automat în memoria internă a dispozitivului. (Capacitatea memoriei este de 900 teste)

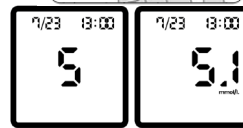

SETAREA DISPOZITIVULUI VivaChek InoX

SETAȚI ORA ȘI DATA

Intăriți în modul de setare. Când glucometrul este oprit, apăsați butonul ▼ timp de 2 secunde. Atunci când porniți glucometrul pentru prima dată, un afișaj complet va apărea pentru scurt timp, apoi va fi afișat formatul de 24H intermitent. Setati ceasul pentru modul 12 sau 24 de ore. Apăsați butonul ▲ pentru a comuta între moduri, apoi apăsați butonul ▼ pentru a salva selecția și a trece la următoarele setări.

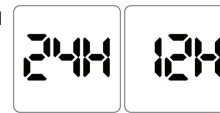

SETAȚI LUNA ȘI FORMATUL DATEI

D/m va clipi acum pe ecran. Apăsați ▲ pentru a selecta formatul dorit (d/m pentru formatul de dată/lună sau m/d pentru luna/data). Apăsați butonul ▼ pentru a salva.




SETAȚI DATA

Acum, în partea dreaptă sus va fi afișat intermitent anul. Apăsați butonul ▲ pentru a selecta anul curent. Apoi apăsați butonul ▼ pentru a salva selecția și a începe setarea lunii. Apăsați ▲ până când apare luna corectă. Apoi apăsați butonul ▼ pentru a salva selecția și a începe să setați data. Apăsați butonul ▲ până când este afișată data corectă. Apoi apăsați ▼ pentru a salva selecția și a începe să setați ora.




SETAȚI ORA CEASULUI

Formatul orei va apărea intermitent în partea dreaptă sus. Reglați ora cu butonul ▲. Apăsați butonul ▼ pentru a salva selecția și a seta minutele. Apăsați butonul ▲ pentru a seta minutele. Apăsați butonul ▼ pentru a salva selecția.

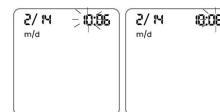

SETAȚI ALARME ȘI ÎNȘTIINȚĂRI

După ce ați setat data, glucometrul va afișa intermitent simbolul de sunet. Apăsați butonul ▲ pentru On (sunet) sau OFF (fără sunet), apoi apăsați ▼ pentru a salva selecția. Funcția de alarmă a glucometrului este presetată la OFF (fără alarmă). Puteți seta până la 5 alarme pe zi. Dacă toate cele 5 alarme (A1, A2, A3, A4, A5) vor fi On, glucometrul va pre-seta orele de alarmă ca în exemplul de mai jos. Ora alarmelor poate fi schimbată și adaptată propriilor necesități.

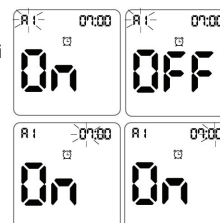

Exemplu: A1 7:00, A2 09:00, A3 14:00, A4 18:00, A5 22:00

Notă

Dacă glucometrul este pornit la ora la care a fost setată alarma, aceasta nu va suna.

După ce ați setat funcția audio a alarmei la ON sau OFF, apăsați butonul ▼ pentru a confirma. În acest moment pe ecran va apărea simbolul A1. Apăsați butonul ▲ pentru a seta ora, apoi butonul ▼ pentru a confirma. Urmează setarea minutelor. Apăsați ▲ pentru a selecta 00, 15, 30 sau 45, apoi butonul ▼ pentru a confirma minutele. Urmăriți aceiași pași pentru a seta restul alarmelor A2, A3, A4, A5.


SETAȚI MARKERUL PENTRU ALIMENTE

Puneți un marker pentru alimente. După configurarea funcțiilor de alarmă pentru testare, pe ecran vor apărea simbolurile ☼ împreună cu cuvântul On (Pornit). Apăsați butonul ▲ pentru a activa sau dezactiva funcția de marcarea alimentelor, apăsați butonul ▼ pentru a confirma setarea.




SETAȚI O AVERTIZARE PENTRU HIPOGLICEMIE (Hypo)

După setarea markerului pentru alimente, pe ecran va clipi intermitent simbolul Hypo, împreună cu inscripția On (pornit). Apăsați butonul ▲ pentru a activa sau dezactiva funcția de alarmă Hypo, apăsați butonul ▼ pentru a seta. Dacă selectați alarma ON, ecranul arată 3,9 mmol/l cu simbolul Hypo, apăsați butonul ▲ pentru a selecta nivelul de care aveți nevoie, apoi ▼ pentru a seta.

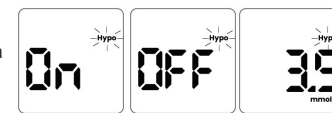

SETAȚI O AVERTIZARE DE CORPI CETONICI

După setarea alertei de hipoglicemie, pe ecran apare simbolul Ketone împreună cu cuvântul On (pornit) sau Off (oprit). Apăsați butonul ▲ pentru a selecta modul dorit și ▼ pentru a confirma selecția.

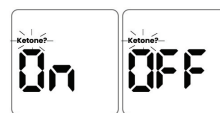

Краткое руководство по использованию глюкометра


VivaChek™ InoX



ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА

Важно: Перед выполнением теста, продезинфицируйте ручку для прокалывания тампоном пропитанным спиртом или мылом и водой. Также, всегда тщательно вымойте руки теплой водой и мылом, до и после использования данного устройства.


- 1 Откручиваем крышку ручки для прокалывания и вставляем стерильный ланцет так как показано на рисунке.
- 2 После правильной установки ланцета в устройстве, открутите колпачок ланцета. Всегда используйте только ланцеты VivaChek для оптимальной работы.
- 3 Привинтите обратно крышку ручки для прокалывания.
- 4 Настройте глубину прокалывания вращением крышки.
- 5 Потяните и отпустите рычаг взвода.

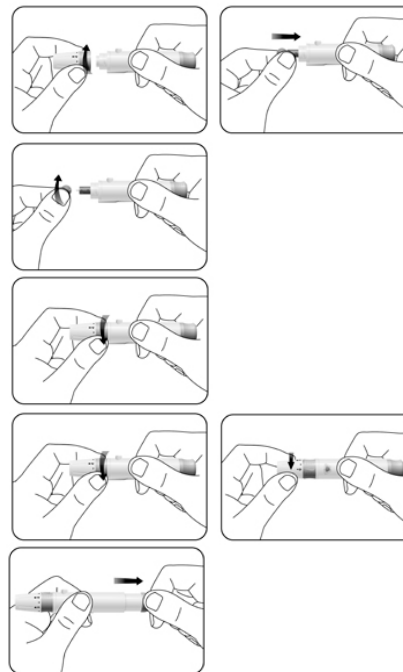

ПРОВЕДИТЕ АНАЛИЗ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

- 1 Выньте тест-полоску VivaChek из флакона с тест-полосками. Сразу же плотно закройте крышку флакона.
- 2 Осторожно вставьте тест-полоску в глюкометр, как показано стрелкой. Глюкометр запускается автоматически.
- 3 На экране появится изображение тест-полоски и мигающая капля. Это указывает на то что прибор готов к измерению. Если оно не появится, проверьте правильность размещения теста.
- 4 Плотно прижмите ручку для прокалывания к кончику пальца сбоку. Нажмите кнопку спуска. После этих действий вы получите каплю крови. (Слегка сожмите и/или помассируйте палец, пока не появится круглая капля крови. Если кровь размазалась или растеклась, не используйте ее для анализа).
- 5 Поднесите глюкометр с тест-полоской к выпрямленному неподвижному пальцу с каплей крови. Кровь впитывается автоматически.


- 6 Устройство выполнит измерение в течение следующих 5 секунд и отобразит результат на экране. Результат теста будет сохранен во внутренней памяти устройства. (объем памяти 900 тестов)

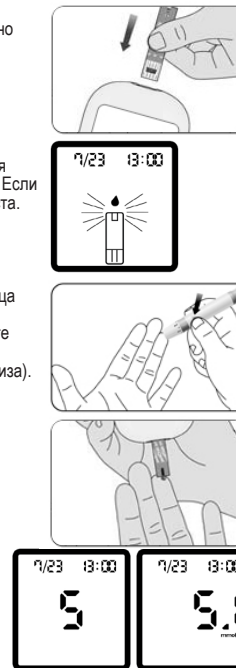

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА VivaChek InoX


УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ И ДАТУ

На отключенном глюкометре нажмите кнопку ▼ в течение 2 секунд. При первом включении глюкометра отобразится полный дисплей, затем мигающий формат 24 Н. Нажмите кнопку ▲ для выбора формата времени 24 Н или 12 Н, затем нажмите кнопку ▼ чтобы сохранить свой выбор.

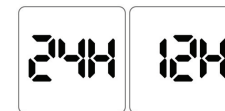


УСТАНОВИТЕ ФОРМАТ МЕСЯЦА И ДАТЫ

Теперь на дисплее будет мигать D/m. Нажмите ▲ чтобы выбрать желаемый формат (d/m для даты/месяца или m/d для месяца/даты). Нажмите кнопку ▼ чтобы сохранить.

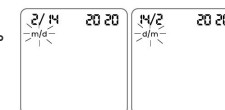

УСТАНОВИТЕ ДАТУ

Теперь, в правом верхнем углу экрана появится год. Нажимайте кнопку ▲ до тех пор пока не появится текущий год. Выбрав правильный год, нажмите кнопку ▼ чтобы сохранить свой выбор и начните устанавливать месяц. Нажимайте кнопку ▲ до тех пор пока не появится правильный месяц. Затем нажмите кнопку ▼ чтобы сохранить свой выбор и начать настройку даты. Нажимайте кнопку ▲ пока не отобразится правильная дата. Затем нажмите ▼ чтобы сохранить выбор и начать установку времени.

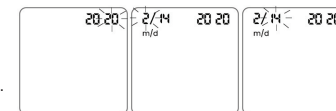


УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ

В правой верхней части дисплея появятся часы. Настройте время с помощью кнопки ▲. Нажмите кнопку ▼ чтобы сохранить свой выбор и установить минуты. Нажмите кнопку ▲ чтобы настроить минуты. Нажмите кнопку ▼ чтобы сохранить выбор.



УСТАНОВИТЕ ФУНКЦИЮ НАПОМИНАНИЯ.

После установки времени замигает символ звукового сигнала. Нажмите кнопку ▲ чтобы выбрать On(звук) или OFF(без звука), затем нажмите кнопку ▼ чтобы сохранить данную настройку. Установите функцию напоминания тестирования. В вашем глюкометре функция напоминания тестирования предварительно настроена на OFF-ВЫКЛ. Вы можете установить до 5 напоминаний в сутки и каждый раз настраивать время под ваши потребности. Если будут включены "On" все 5 напоминаний (A1, A2, A3, A4, A5), глюкометр автоматически установит время как на примере ниже:

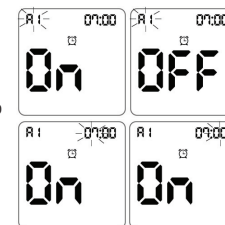

A1 7:00, A2 09:00, A3 14:00, A4 18:00, A5 22:00

Примечание

Если на время когда должна прийти напоминание глюкометр будет включен, напоминание не будет звучать.

После того, как вы установите функцию аудио/напоминание на ON или OFF, нажмите кнопку ▼ для подтверждения (как показано на рисунке). В этот момент на экране появится символ A1. Нажмите кнопку ▲ чтобы установить время, затем кнопку ▼ чтобы подтвердить. Далее следует настройка минут. Нажмите ▲ чтобы выбрать 00, 15, 30 или 45 минут, затем ▼ чтобы подтвердить. Выполните те же действия чтобы установить остальные напоминания A2, A3, A4, A5.


УСТАНОВИТЕ МАРКЕР ЕДЫ

После настройки функций напоминания, на экране будут мигать символ 🍽️ со словом ON-Вкл. Нажмите ▲ чтобы включить (On) или выключить (OFF) функцию маркера еды, нажмите кнопку ▼ для подтверждения.




УСТАНОВИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ГИПОГЛИКЕМИИ (Нуро).

После установки маркера еды, на экране будут мигать Нуро вместе с надписью On-Вкл. Нажмите кнопку ▲ чтобы включить (On) или выключить (OFF) функцию тревоги Нуро. Нажмите кнопку ▼ чтобы подтвердить. Если вы выберете сигнал тревоги «включен» ON, на дисплее отображается значение 3.9mmol/L с символом Нуро, нажмите кнопку ▲ чтобы выбрать нужный вам уровень, затем ▼ для подтверждения.

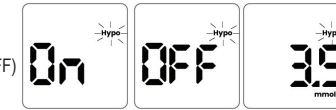

УСТАНОВИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КЕТОНАХ

После настройки предупреждения о гипогликемии, на экране появится мигающий символ Ketone вместе со словом ON-Вкл или OFF-Выкл. Нажмите Кнопку ▲ выбрать нужный режим, затем ▼ чтобы подтвердить.

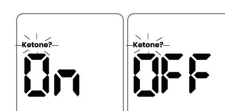

Официальный представитель в Республике Молдова „PHARMONY” SRL

Техническая поддержка, продажа расходных материалов (тесты, ланцеты)

Тел: (+373) 76 771 249, (+373) 68 698 878

Эл. Почта : inox@pharmacy.md