

2.4.7 Acțiune la ținerea apăsată a butonului

Selectați ACȚIUNE ȚINERE BUTON pentru a selecta din meniul ACȚIUNE ȚINERE BUTON acțiunea efectuată atunci când butonul camerei este apăsat și ținut apăsat timp de aproximativ 3 secunde. Opțiunile sunt:

ZOOM (zoom in/out pentru cameră)

LUMINOZITATE (luminozitatea poate fi reglată)

STANDBY SURSĂ DE LUMINĂ (pornește/oprește sursa de lumină)

PROCEDURĂ (selectează o procedură medicală, acțiune comparabilă cu butonul PROCEDURĂ)

BALANS DE ALB (efectuează procedura Balans de alb)

ÎNREGISTRARE (activează/dezactivează dispozitivul de înregistrare video)

CAPTURARE (activează imaginea statică sau imprimarea)

OPRIT (fără funcție)

NOTĂ:

Consultați secțiunea „2.3.5 Balans de alb” pentru a efectua în mod corect operațiunea BALANS DE ALB.

Funcția pentru CAPTURARE și ÎNREGISTRARE va funcționa numai dacă ieșirea Telecomandă înregistrare de pe panoul din spate al afișajului Looking Glass este conectată la un dispozitiv periferic de înregistrare compatibil (consultați Secțiunea „2.2 Instrucțiuni de asamblare/montare” pentru conexiuni adecvate).

Dacă oricare dintre butoane este programat pentru reglarea ZOOM sau LUMINOZITATE, activarea butonului programat prin modul ȚINERE APĂSAT va face să apară pe ecran glisorul de ajustare pentru ZOOM sau LUMINOZITATE. În acest moment puteți folosi butonul dreapta și stânga pentru a mări sau a micșora ZOOM sau a mări sau a micșora LUMINOZITATE.

2.4.8 Sursă de lumină

Selectați această opțiune pentru a afișa meniul SURSĂ DE LUMINĂ. Aici puteți selecta una dintre următoarele opțiuni pentru controlul sursei de lumină:

CONTROL ILUMINANT

Selectați ILUMINANT pentru a selecta tipul de sursă de lumină utilizată.

Selectați meniul CONTROL SURSĂ DE LUMINĂ pentru a afișa una dintre următoarele opțiuni pentru controlul sursei de lumină:

PROCEDURĂ

MANUAL

Selectați PROCEDURĂ pentru a seta luminozitatea sursei de lumină la valoarea optimizată pentru PROCEDURĂ selectată. Dacă este necesar, utilizatorul poate modifica manual ieșirea luminoasă pentru sursa de lumină, utilizând controalele pentru Luminozitate din sursa de lumină. Dacă însă este selectată setarea PROCEDURĂ în meniul CONTROL, ieșirea de lumină optimizată pentru PROCEDURĂ va fi reinițializată de fiecare dată când alimentarea camerei este repornită sau când se modifică selecția pentru Procedură în Meniul principal.

Selectați MANUAL pentru a dezactiva controlul sursei de lumină de către cameră. Ieșirea Sursă de lumină este setată manual folosind controalele pentru Luminozitate.

2.4.9 Mini-panou

Funcțiile mini-panoului, ca și comandă rapidă pentru accesarea unor funcții cum ar fi Alimentarea sistemului, Blocarea tastaturii capacitive și Proceduri. Mini-panoul poate fi accesat fie prin apăsarea rapidă a butonului de alimentare sau a butonului de blocare de sub monitor.

2.5 Conectarea capului camerei Looking Glass la artroscoapele cu vizor

Cuplajul capului camerei stil „Vizor”

1. Orientați capul camerei astfel încât obiectivul să fie orientat cu spatele spre dvs.
2. Ținând ferm camera, folosiți două degete pentru a roti mecanismul de cuplaj din partea din față a camerei în direcția săgeților. Aceasta va „deschide” mecanismul de cuplaj.
3. Ținând mecanismul cuplajului deschis, așezați porțiunea cu „vizor” a artroscopului în cuplajul deschis.
4. Rotiți ușor mecanismul de cuplaj în direcția opusă săgeții. Aceasta permite închiderea cuplajului peste artroscop, etanșându-l. Rotiți ușor cuplajul pentru obținerea nivelului de fricțiune dorit, în funcție de preferințele utilizatorului.