

Pulbere dezinfectant

OPREZAN este un dezinfectant special pentru instrumente chirurgicale cu putere ridicată de curățare, este ușor de utilizat și complet inofensiv față de utilizator și mediul înconjurător. Acesta oferă un nivel ridicat de dezinfectare, chiar și în mediile cele mai contaminate, principiul de acțiune bazându-se pe sistemul format din acidul peracetic activ și peroxidul de hidrogen, care se formează în urma reacției chimice între apă și produs. OPREZAN face parte dintr-o generație nouă de dezinfectanți, cu o compoziție specială care nu se evaporă și nu se cere curățarea prealabilă, este biodegradabil în mediul natural și are o compatibilitate excelentă cu suprafețele din sticlă, cauciuc, orice tip de polimer și metal. OPREZAN este ideal pentru aparatele ultrasonice de curățare și pentru instrumentele de stomatologie.

Formele de utilizare și dozarea

Acest dezinfectant nu necesită o pre-curățare a instrumentelor, este suficient dacă murdăria este eliminată cu ajutorul unei perii. Pentru o soluție de 5 litri, adăugați 50 g (1 doză) de dezinfectant OPREZAN și amestecați o perioadă de timp.

Pregătiți soluția cu 5-10 minute înainte de procesul de dezinfectie. Scurfundăți în cuvă instrumentele care trebuie dezinfectate. Toate suprafețele trebuie să fie în contact cu soluția preparată. Asigurați-vă că pe suprafața instrumentelor nu apar bule de aer. Pentru a garanta eficiența procesului de dezinfectie, trebuie respectată perioada recomandată de acțiune. După perioada de expunere, scoateți instrumentele din cuvă, apoi clătiți-le cu atenție cu apă distilată și apoi uscați-le.

Soluția de lucru preparată în acest mod este stabilă timp de 24 de ore.

Proprietăți antimicrobiene

- Bactericid (Inclusiv Tb –MRSA, VRE)
- Fungicid
- Virucid (HBV, HCV, HIV, BVDV, Vaccinia, Adeno)
- Sporicid

Compoziția Oprezan

	w/w%
• TAED	35,00
• Percarbonat de sodiu	55,00
• inhibitori de coroziune, enzime (amilază, lipază, protează), stabilizator, activator, ingrediente inactice	10,00

Soluție de 1% conține 2000 ppm de acid peracetic

Soluție de 0,5% conține 1000 ppm de acid peracetic

Soluția gata de utilizare conține acid peracetic. Termenul de depozitare este de 3 ani în condiții de depozitare corespunzătoare.



Oprezan®

High Level dezinfectant pentru instrumente chirurgicale

BAZAT PE ACIDUL PERACETIC


PENTRU UTILIZARE
MANUALĂ ȘI PENTRU
APARATELE ULTRASONICE
DE CURĂȚARE

Soluție de sterilizare la rece

Fără aldehide și fără fenoli
Nu necesită neutralizare

Adecvat pentru endoscoape și are
un efect enzimatic

2 kg

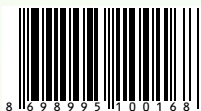

GHS07

Avvertizări: Atenție!



Zonele de utilizare

Utilizat pentru dezinfectarea instrumentelor termorezistente și termolabile chirurgicale/stomatologice utilizate în diferite domenii cum ar fi CMI (Chirurgie Minim Invasivă), stomatologie, chirurgie, endoscoape rigide, terapie intensivă, anestezie și laboratorare. Înainte de a utiliza OPREZAN pentru dezinfectarea endoscoapelor flexibile consultați producătorul. Pentru utilizare manuală prin metoda de imersie și pentru aparatele ultrasonice de curățare.

Timpul de expoziție

Soluție 1%: 2000 ppm PAA

Bactericid, fungicid, virucid: 5-10 minute

Sporicid: 10 minute

Soluție 0,5% (1000 ppm PAA):

Bactericid, fungicid, virucid: 10 minute

AVERTISMENTE/PRECAUȚII

H302 - Periculos dacă este înghițit

H315 - Cauzează iritarea pielii

H319 - Cauzează iritarea gravă a ochilor

P264 - După manipulare spălați bine cu apă

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/mască de protecție

P302+P352 - ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA: spălați cu apă și săpun în abundență

P332+P313 - În cazul iritării pielii, solicitați asistență/evaluare din partea unui cadru medical

P337+P313 - În cazul în care persistă iritarea ochilor: solicitați asistență/evaluare din partea unui cadru medical

P305+P351+P338 - ÎN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă purtați așa ceva, și dacă sunt ușor de scos. Continuați să clătiți.

P362: Dezbrăcați hainele murdare și spălați-le înainte de reutilizare.

KUZEY SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE KİMYA SAN. A.Ş.
ERGAZI MAHALLESİ GERSAN SANAYİ SİTESİ 2310 Sok No:47
Yenimahalle Ankara/Türkiye
Phn: +90 3122566696 Fax:+90 3122566697
Locul de fabricație: Korseteçler Sanayi
Sitesi 3.Cad. No.9 Saray-Kazan/Ankara-Türkiye
E-mail: info@kuzey saglik.com.tr www.kuzey saglik.com.tr

Importator: 'Dita Esfarm' S.R.L., Burebista, 23, Chişinău, Moldova. Tel. +373 (22) 405402.