

# Strip teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge

Utilizați numai cu modelele TD-4227 și TD-4116

## Avertizare pentru pacienți

- Pentru diagnosticul *in vitro* (numai pentru uz extern).
- Pentru auto-monitorizare.
- Lucrați în medii sterile și alte persoane care utilizează acest sistem pe mai mulți pacienți trebuie să fie conștienți de faptul că obiectele care intră în contact cu sângele uman trebuie curățate ca surse potențiale de transmitere a infecțiilor virale, chiar și după curățare.
- Înainte de a utiliza benzile de testare, citiți instrucțiunile și ghidul utilizatorului pentru folosirea glucometrului. Utilizați benzile de testare Clever Check TD-4227 și TD-4116 cu glucometrele Clever Check TD-4227 și TD-4116 pentru a obține rezultate exacte și pentru obținerea garanției producătorului.
- Pacienții cu tensiune arterială joasă, în stare de șoc sau cu hipoglicemie hiperosmotică (cu sau fără cetoză) pot obține rezultate greșite.
- Pacienții cu diabet zaharat sever nu trebuie să utilizeze un glucometru pentru măsurarea glicemiei.
- Adresați-vă medicului dumneavoastră.
- Păstrați benzile de testare și lanțetele departe de copiii mici. În caz de înghirire, consultați imediat medicul.

## Aplicare

Benziile de testare Clever Check TD-4227 și TD-4116 sunt destinate pentru a fi utilizate împreună cu glucometrele Clever Check TD-4227 și TD-4116 pentru auto-măsurarea concentrațiilor de glucoză din sânge în instituțiile medicale și acasă. Măsurările zilnice ale glicemiei din sângele integral, cu ajutorul Clever Check TD-4227 și TD-4116, vă oferă Dvs. și medicului Dumeavoastră informații suficiente cu privire la eficiența tratamentului și influența acestuia asupra nivelului de glucoză din sânge. Măsurările regulate ale glucozei ajută de asemenea la monitorizarea evoluției bolii. Efectuați măsurări ale glicemiei la recomandarea unui specialist calificat.

## Despre efectuarea testului în câteva locuri alternative (ATNU)

Benziile de testare Clever Check TD-4227 și TD-4116 sunt destinate pentru a fi utilizate împreună cu Clever Check TD-4227 și TD-4116 pentru auto-măsurarea concentrațiilor de glucoză din sânge în instituțiile medicale și acasă. Măsurările zilnice ale glicemiei din sângele integral, cu ajutorul Clever Check TD-4227 și TD-4116, vă oferă Dvs. și medicului Dumeavoastră informații suficiente cu privire la eficiența tratamentului și influența acestuia asupra nivelului de glucoză din sânge. Măsurările regulate ale glucozei ajută de asemenea la monitorizarea evoluției bolii. Efectuați măsurări ale glicemiei la recomandarea unui specialist calificat.

**IMPORTANT:** Există anumite restricții pentru