

INSTRUCȚIUNE PENTRU UTILIZARE

PEROXID DE HIDROGEN-ElaDum 6% **soluție dezinfectantă**

DENUMIREA COMERCIALĂ

Peroxid de hidrogen 6%

COMPOZIȚIA

100 ml soluție conține: peroxid de hidrogen 30%* - 20 g; benzoat de sodiu – 0,05g; apa purificată - până la 100 ml.

* se face recalcul în dependență de concentrația materiei prime.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Produsul este destinat pentru utilizarea în instituțiile de îngrijire a sănătății (inclusiv obstetrical-ginecologice, dentare, chirurgicale, piele și boli venerice, cabinete de pediatrie, stații de ambulanță etc.) precum și instituții pentru copii, instituții de securitate socială, instituții penitenciare, instituții de utilitate publică, lucrători în stații de dezinfecție și alte instituții implicate în dezinfecție.

Produsul posedă acțiune antimicrobiană (tuberculocid, infecții periculoase, ciuma , holera, tuleremie. inclusiv formatoare de spori(inclusiv stimulatori a ulcerului siberian) , virusilor (stimulatori ai infecțiilor cu enterovirusi- poliomeleita, hepatite enterale și parenterale, sida, gripa tip A, H5N1,H1N1.

Peroxid de hidrogen-ElaDum 6% este destinat pentru:

- pentru dezinfectarea suprafețelor din încăperi (podea, pereți, uși etc.) inclusiv în zone cu diferite clase de puritate;
- pentru dezinfectarea produselor din diverse material (metale rezistente la coroziune, cauciuc, plastic, sticlă);
- pentru dezinfecția mobilierului dur, a suprafețelor mașinilor, dispozitive medicale, echipamente cu vopsea și lac, acoperire galvanică sau polimerică;
- pentru dezinfectarea echipamentelor sanitare;
- pentru dezinfectarea echipamentelor din industria farmaceutică și biotehnologică
- pentru decontaminarea lenjeriei, a jucăriilor, a veselei, a ustensilelor de laborator, a articolelor pentru îngrijirea pacienților, din sticlă, plastic, cauciuc;
- pentru dezinfectarea obiectelor utilizate pentru manichiură, pedichiura, coafura.
- pentru dezinfecția materialului de curățare;
- pentru dezinfectarea transportului de ambulanță;
- pentru dezinfecția incubatoarelor pentru sugari prematuri;
- pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale (inclusiv instrumente chirurgicale dentare, amprente dentare din materiale siliconice, silicon) în unitatea sanitară rezistente la coroziune;
- pentru sterilizarea dispozitivelor medicale (incluzând instrumente chirurgicale, dentare rezistente la coroziune, endoscoape rigide și flexibile).

MOD DE UTILIZARE

Suprafețele interioare (pardoseli, pereți, etc.), mobilierul rigid, echipamentele sanitare (căzi, chiuvete, etc.) se șterg cu o cârpă umezită. La finalul dezinfecției echipamentele sanitare se spală cu apă și se ventilează încăperea.

Lenjeria se îmbibă în soluție (4 L/kg de rufe uscate). La sfârșitul dezinfecției lenjeria se spală, apoi se clătește cu apă și se usucă.

Vesela de laborator se scufunda complet în soluția de peroxid de hidrogen 6% și se menține minim 5 minute. La finalizarea dezinfectării, vesela se spală sub jet de apă cu o perie timp de 1 minut, utilizând un detergent timp de 5 minute.

Obiectele de îngrijire a bolnavilor, jucăriile se șterg cu o cârpă umezită sau se scufunda în soluția de peroxid de hidrogen 6% timp de 5 minute. La sfârșitul dezinfecției, produsele sunt spălate cu apă.

În timpul dezinfectării dispozitivelor medicale, acestea sunt complet cufundate în soluția de peroxid de hidrogen 6%.

Dezinfectarea mulajelor dentare se realizează prin imersie în soluția de lucru. La sfârșitul dezinfecției, se clatește bine cu apă.

Atunci când se efectuează dezinfectarea obiectelor utilizate pentru manichiură, pedichiură și de coafură se scufunda cel puțin 5 minute în soluție de peroxid de hidrogen 6%.

Obiectele mari și recipientele se șterg cu o cârpă umezită și la final se spală cu apă.

Atunci când se efectuează dezinfectarea echipamentului în industria farmaceutică și biotehnologică, suprafața se șterge cu o cârpă umezită în soluție dezinfectantă, iar obiectele sunt scufundate în soluție de peroxid de hidrogen 6% cu menținere timpului de 5 minute.

La sfârșitul dezinfecției echipamentul este spălat cu apă.

MASURI DE PRIM AJUTOR

După inhalare – Îndepărtați expunerea și ieșiți imediat la aer curat. Chemați ajutor medical dacă apare tuse sau alte simptome.

După contact cu pielea– aceasta capătă culoarea alba, din cauza efectului de arsură. Spălați zona expusă cu multă apă și săpun.

După contact cu ochii –nu permiteți victimei să se frece la ochi sau să strângă ochii. Ridicați ușor pleoapele și spălați abundent cu multă apă cel puțin 15 minute, după care victima este transportată la medic. Poate duce la ulcerarea corneii având ca efect tulburarea vederii sau chiar pierderea ei.

După înghițire –pot apărea iritații și arderea buzelor, gâtului și gurii. Nu se da nimic pe gura unei persoane inconștiente sau în convulsii. Nu se provoacă vomă. Se administrează cantități mari de apă pentru diluare. Dacă vomă se produce spontan se va administra în continuare apă. Se asigură asistența medicală.

MASURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR/SCURGERILOR ACCIDENTALE

Precauții individuale: Protejați ochii de împrăscări.

Măsuri generale: În condiții normale cu preparatul, acesta, nu prezintă pericole semnificative pentru om sau mediu.

Măsuri de curățare: Se oprește scurgerea. Se poate descompune cu metabisulfid și sulfid de sodiu. Clătiți cu apă.

Indicații speciale : Nu se va folosi rumegusul ca și material absorbant.

MANIPULARE

Manipulare:

- Se recomandă mănuși și ochelari de protecție pentru protejarea mâinilor și a ochilor.
- Evitați ingerarea și inhalarea.
- După folosire, închideți cu grijă recipientul.
- Spălați-vă bine după manipulare.

Depozitare:

- Depozitarea trebuie făcută numai în ambalajul original prevăzut cu o clapetă de siguranță pentru degajare de gaze.
- Recipientele trebuie să fie depozitate în poziție verticală și la o temperatură sub 25 °C.
- A se depozita departe de orice sursă de căldură sau de razele soarelui.
- A se păstra într-un loc ferit de copii.

ATENȚIONĂRI

Prudență!

Poate provoca iritații ale tractului respirator, digestiv, a ochilor și a pielii.

A se folosi echipamente speciale (mănuși, ochelari de protecție).

A se utiliza, de preferință, până la sfârșitul (vezi mențiunea Exp.).

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Expunerea la lumină și căldură reduc activitatea produsului.

PREZENTARE AMBALAJ

Câte 1000 ml sau 5000 ml în flacoane/butelii din polietilenă, de culoare brun-închis, cu căpăcel din polietilenă înzestrat cu sistem de închidere cu sigiliu și o instrucțiune de utilizare.

PĂSTRARE

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 25 °C.

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate!

DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI

01.10.2017

DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI/DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI

Numele companiei: ElaDum Pharma SRL

Adresa : Republica Moldova, r-ul Strășeni, s.Cojușna, str. Podgorenilor 1

Nr. de telefon: +373 237 42 927 ; *Fax* +373 237 42408

Email: eladumpharma@gmail.com