


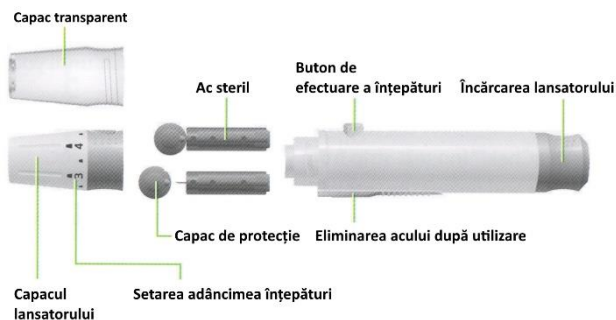

Reprezentant local în Republica Moldova
„PHARMONY” SRL
 Asistență tehnică, vânzare consumabile
 (teste, ace)



Tel: (022) 944-958
 e-mail: info@pharmony.md

Подготовка устройства

Важно:


Продезинфицируйте перед выполнением теста
 пусковая установка с тампоном пропитанным
 спиртовой, или с мылом и водой.

1. Откручиваем крышку
 пусковая установка иглы
 и вставляем иглу
 стерильно в пусковой установке.


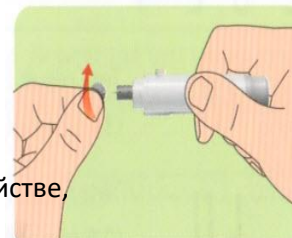
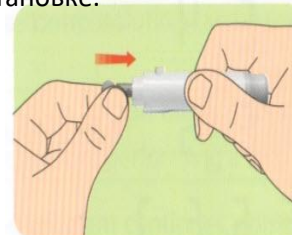


2. После установки
 правильная игла в устройстве,
 закрой крышку
 безопасность иглы
 пока он не будет выпущен.

3. Привинтить крышку
 безопасность назад
 на пусковой установке иглы.

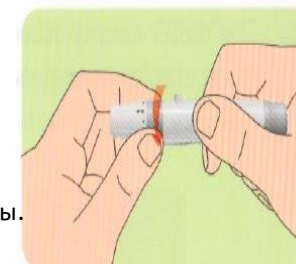

4. Отрегулируйте глубину
 прокалывание вращением
 крышка для одного из
 5 позиций.

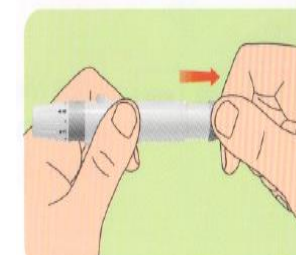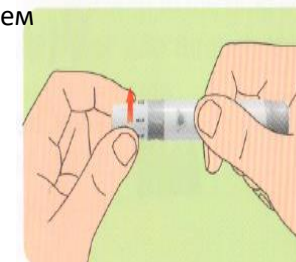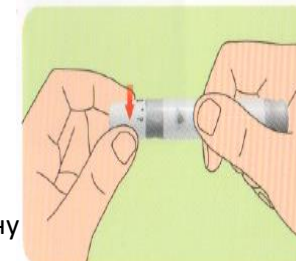


5. Вытяните цилиндр


Назад, зарядить пусковую установку

игл.

3. На экране появится изображение тест-полоски и мигающая капля, указывающая на то, что прибор готов к измерению. Если он не появится, проверьте правильность размещения теста.

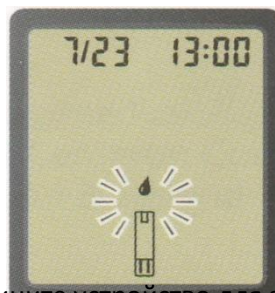

4. Присоедините устройство для запуска иглы с защитным колпачком сбоку от пальца. Нажмите кнопку освобождения иглы. После этих действий вы получите каплю крови.


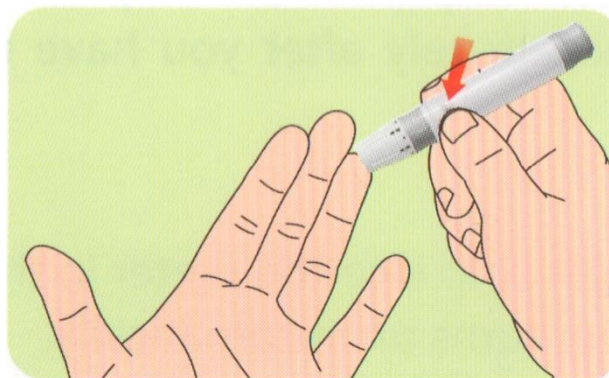


5. Прикоснитесь к капле крови передней частью теста, ее абсорбция произойдет автоматически.

Осторожно: не допускайте попадания капли крови на верхнюю часть тест-полоски.



6. Устройство выполнит измерение в течение следующих 5 секунд и отобразит результат на экране. Результат теста будет сохранен во внутренней памяти устройства. (объем памяти 900 тестов)

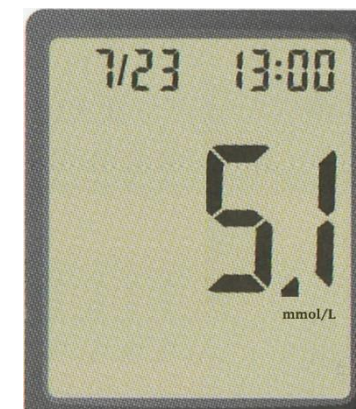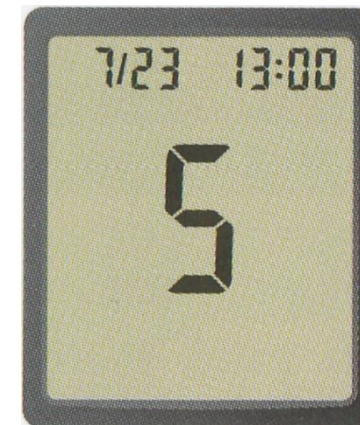

Проведите анализ глюкозы в крови.

1. Извлеките тест из коробки, а затем плотно закройте крышку коробки после удаления пробы.

2. Вставьте тест-полоску в глюкометр, как показано стрелкой. глюкометр запускается автоматически.



