

Tăvi de introducere pentru instrumentar pentru umăr CONMED

| Număr de catalog | Descriere |
|------------------|--|
| INST-CFK01 | Tavă de introducere – perforatoare coafă rotatori umăr |
| INST-CFK02 | Tavă de introducere – accesorii umăr 1 |
| INST-CFK03 | Tavă de introducere – accesorii umăr 2 |

DESCRIERE

În combinație cu un recipient de sterilizare și un capac, aceste tăvi interioare se utilizează pentru ambalarea, transportarea și depozitarea instrumentelor CONMED înainte de, în timpul și după sterilizarea cu abur. Aceste tăvi au fost calificate pentru utilizare cu recipiente Aesculap® de mărime 3/4 cu fund solid (REF JK744) sau cu recipiente CONMED (REF INST-C348), precum și cu capacele și filtrele aferente. Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare ale recipientelor, capacele și filtrelor Aesculap. Deși aceste tăvi sunt reutilizabile, nu vor face obiectul service-ului sau reparațiilor.

UTILIZARE PRECONIZATĂ / INDICAȚII DE UTILIZARE

Tăvile de introducere pentru instrumentar pentru umăr CONMED sunt destinate organizării instrumentelor CONMED care urmează să fie sterilizate cu abur de către furnizorul de îngrijiri medicale. Piese de mână sau accesoriile canulate cu un diametru interior de minimum 0,84 mm și o lungime canulată maximă de 230 mm pot fi sterilizate în această tavă alături de alte instrumente necanulate și neporoase

CONTRAINDICAȚII

1. Tăvile de introducere pentru instrumentar pentru umăr CONMED nu sunt destinate utilizării în condiții de gravitație cu abur, sterilizare cu oxid de etilenă, gamma sau STERRAD®1.

AVERTIZĂRI

1. Tăvile nu sunt concepute pentru curățarea in situ a conținutului. Îndepărtați toate instrumentele conținute în tăvi pentru curățarea instrumentelor și tăvilor înainte de sterilizare și reutilizare.

