

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КРОИТ - М»

ПАСПОРТ

КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.



- Основные параметры контейнеров и комплектность;

Модель контейнера	Рабочий объем, л	Габаритные размеры, мм	Нагрузка на перфорированный поддон, не более кг	Масса, кг	Температура, выдерживаемая контейнером, °C	Ванна	Перфорированный поддон	Утопитель	Крышка	Паспорт
КДС-0-1	0,1	Ø100х50	0,15	0,08	+121	1	1	-	1	1
КДС-0-2	0,2	Ø99х72	0,25	0,11	+121	1	1	-	1	1
КДС-1	1	280х150х105	1,2	0,5	+121	1	1	1	1	1
КДС-3	3	370х185х120	1,8	0,8	+121	1	1	1	1	1
КДС-5	5	400х285х165	3,0	1,2	+121	1	1	1	1	1
КДС-10	10	450х325х205	6,0	2,0	+121	1	1	1	1	1
КДС-11	11	770х290х170	8,0	2,6	+121	1	1	-	1	1
КДС-20	20	760х460х190	15,0	4,7	+65	1	1	-	1	1
КДС-30	30	840х470х225	15,0	5,5	+65	1	1	-	1	1
КДС-35	35	840х470х240	15,0	6,4	+65	1	1	-	1	1
КДС-6*	15	450х450х180	12,0	1,8	+65	1	-	-	1	1
КДС-6Л-1*	6	415х355х60	5,0	0,65	+65	1	-	-	1	1
КДС-6Л-1К	6	420х360х70	5,0	1,1	+65	1	-	-	1	1
КДС-6Л-2*	5,5	415х355х60	5,0	0,65	+65	1	-	-	1	1
КДС-6Л-2К	5,5	420х360х70	5,0	1,1	+65	1	-	-	1	1

- Подготовка и порядок работы

1. Провести раскройку составных частей контейнера, протереть детали контейнера моющим раствором, ополоснуть водой, высушить и провести обработку в соответствии с МУ №257-113.
2. Обработка инструментов и изделий Медицинского назначения осуществляется в соответствии с МУ №257-113 дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ. Для проведения обработки изделий следует:
 - провести обработку вывешивая изделия на перфорированный поддон и опустить в ванну;
 - залить ванну раствором до полного погружения обрабатываемых изделий, добиться полного заливания полостей растворов (для обработки полостей погружения линных предметов использовать утолители);
 - закрыть ванну с поддоном крышкой и выдержать экспозицию согласно режиму обработки;
 - извлечь поддон из ванны, установить его для стекания раствора согласно конструктивным возможностям изделия
3. По окончании работы проводится обработка составных частей контейнера в соответствии с действующими методическими указаниями МУ № 257-113 и инструментами по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ.
4. Контейнер КДС-30, КДС-35 оснащается сплинным устройством по заказу производителя. Контейнеры КДС-30 и КДС-35 рекомендуются устанавливать на специализированный к/Б-01-ДРО-01-14 (по заказу).

- Техника безопасности

К работе по дезинфекции и стерилизации допускаются лица, ознакомленные с действующими правилами техники безопасности при работе с конкретными дезинфицирующими средствами

- Свидетельство о приеме;

Контейнер КД-8(ПРОТ) модель _____ соответствует техническим
условиям ТУ 9451-009-117894-36-2007 и признан годным к эксплуатации

Утман предпостави

- Гарантийное обслуживание:

- «Параллельный срок эксплуатации 1 год со дня окончания параллельного срока хранения 6 месяцев при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- При обнаружении дефекта в параллельный период гарантийное изделие или его составная часть заменятся. Дефектное изделие, акт о наличии дефекта и заполненный гарантийный талон направляются на предприятие, ответственное за изготовление

Гарантийный талон

2402-9001/17/10000000-0000
 © 2017 Wolters Kluwer Health | Wolters Kluwer
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Wolters Kluwer Health, Inc.
 10.1016/j.ajic.2017.09.004
 0195-9566(2017)00000-0
 DOI: 10.1016/j.ajic.2017.09.004
 www.elsevier.com/locate/ajic

3.2.10. **ЭКСПЕРИМЕНТ**

Edward J. Kane, partner, is the vice president and

Дата: _____ Подпись: _____

_____ 20__

Ultrasound