

Fișă tehnică de control al calității și instrucțiuni de utilizare:

Ser de referință pozitiv pentru bruceloză liofilizat

Codul produsului: MRI-BRU

Lot / Nr: 005

Data fabricației: 03/2018

Descriere:

Ser de bovine liofilizat (origine: Italia) care conține anticorpi specifici anti-Brucella.

Depozitare/Conservare:

- A se păstra între +2°C și +26°C înainte de reconstituire.
- Nu dezghețați niciodată mai mult de 3 ori.
- A se păstra la -20°C în alicote după reconstituire până la 1 an.
- Poate fi păstrat nediluat la +4°C sub formă lichidă până la 2 zile.

Termen de valabilitate:

Acest produs nu poartă o dată exactă de expirare deoarece este liofilizat și foarte stabil în timp. Ca regulă generală, poate fi păstrat până la 10 ani la +2 – 26°C de la data producției în forma sa liofilizată.

Control de calitate:

Acest ser a fost găsit pozitiv atunci când a fost testat de
ID Screen® Bruceloză Ser Indirect ELISA pentru mai multe specii
Rose Bengal RSA
Test de fixare a complementului CFT

Mod de Utilizare:

- 1- Reconstituiți în 1 ml apă distilată.
- 2- Așteptați 1-2 min și amestecați bine pentru a omogeniza soluția.
- 3- Pentru ELISA: Se diluează într-un tampon de diluare a serului sau într-un ser negativ. Vă rugăm să rețineți: serul negativ utilizat poate influența ușor rezultatele. Utilizați întotdeauna aceeași matrice de diluție (tampon sau ser) atunci când comparați rezultatele de la diferite cicluri.
- 4- Testați serul la următoarele diluții în funcție de metoda utilizată și luați ultima diluție pozitivă sau slab pozitivă ca standard intern.

Metodă:	Diluții de testat:
ELISA	De la 1/4 la 1/128
RSA (Rose Bengal)	Pur până la 1/16
Test de fixare a complementului CFT	Pozitiv până la 1/32