

# Instrucțiune de utilizare

## Recirculator bactericid cu raze ultraviolete



### 1. DESTINAȚIE

Recirculator bactericid cu raze ultraviolet RBZ 100,100V,200,300,750,950 , RBI AUTO, 100V, 105,130,200,250,300,911. (denumit în continuare recirculator) este proiectat pentru a dezinfecta aerul în prezența persoanelor. Se folosește în încăperi medicale, pentru copii, sportive, industriale, localuri și instituții publice. Este un mijloc eficient de prevenire și combatere a infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită etc.).

### 2. PREGĂTIREA PENTRU LUCRU

După despachetarea recirculatorului, verificați integritatea acestuia. Instalați recirculatorul în cameră la o înălțime de cel puțin 2 m de la podea în poziție orizontală. Introduceți fișa într-o priză legată la pământ. Dacă recirculatorul este livrat cu un cablu de alimentare, pentru a vă conecta introduceți fișa la o priză legată la pământ. Apasati butonul ON de pe comanda de distanță.

Nominală a lămpii să se mărească timpului de expunere inițial cu 1,2 ori (20%), iar după 2/3 din durata nominală a termenului de serviciu - cu 1,3 ori. Controlul expunerii trebuie efectuat o dată la 6-12 luni (în funcție de intensitatea exploatării) cu un dozimetru de tip DAU-81 TU 46-13-1443-83 sau cu un spectroradiometru cu bandă SRP-86. Finisajul exterior al recirculatorului, pe lângă prelucrarea lămpii, permite igienizarea umedă.

#### Modul de utilizare

- Porniți recirculatorul utilizând telecomanda cu Taimer
- Apasind butonul ON , recirculatorul va lucra fara oprire
- Apasind butonul 15 , recirculatorul va lucra 15 minute, dupa se va opri automat.
- Apasind butonul 30 , recirculatorul va lucra 30 minute, dupa se va opri automat.
- Apasind butonul 60 , recirculatorul va lucra 60 minute, dupa se va opri automat.

#### Timp de lucru

1. Recirculatorul se utilizeaza, primele 100 de ore cu aerisire a spatiului.
2. In spitale ,centre medicale, in localuri publice , in conditii de apartament sau casa particulara, recirculatorul se utilizeaza de 6.00 pina la 22.00
3. In spitale pe perioada de noapte de la 22.00 pina la 6.00, vor fi pornite fiecare 2 ore timp de 30 minute
4. In apartament pe perioada de noapte de la 22.00 pina la 6.00, recirculatorul, va fi deconectat.



#### Tine minte

**Primele 100 de ore, recirculatorul emite un miros specific (recomandam dupa instalare, primele 100 ore de a se folosi cu aerisire periodica a incaperii)**

**Telecomanda nu se poate de utilizat la alt recirculator (sunt personalizate)**