

результаты измерения КК и графики КК. Чтобы подключить внешний принтер, выполните следующие действия:

1. Используйте разъем USB () для подключения внешнего принтера к анализатору.
2. Подробное описание настройки, в том числе шаблона и заголовка печати, см. в *главе 5.1.3 «Настройка принтера»*.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Можно использовать только модели принтеров, указанные компанией Edan. Конкретные модели принтеров см. в *главе 2.6 «Внешние устройства»*.
- Используйте внешние принтеры согласно соответствующим инструкциям по эксплуатации.

4.4.6 Подключение сканера штрихкода

Для подключения кабеля сканера к анализатору используйте разъем USB ()

Сканер штрихкода, который можно подключить к анализатору через интерфейс USB,— это сканер штрихкода МК5145. Подключите сканер штрихкода в соответствии с процедурами, приведенными в руководстве пользователя сканера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Можно использовать только модели сканеров, указанные компанией Edan.
- Подключите сканер к анализатору и используйте его в соответствии с процедурами, приведенными в руководстве пользователя сканера.

4.5 Включение и вход

Выполнив установку анализатора, перед его включением необходимо выполнить следующие проверки, чтобы убедиться, что система готова к работе.

- Проверьте, правильно ли подсоединены разбавитель и лизирующий реагент и достаточно ли их осталось для следующих операций.
- Каждый день перед началом операций убеждайтесь, что контейнер для отходов не заполнен. Если контейнер для отходов заполнен или почти заполнен, опорожните его.
- Убедитесь, что крышки камеры реагентов и жидкостной камеры закрыты.
- Проверьте, достаточно ли термобумаги во встроенном термопринтере.
- Проверьте, соответствует ли подключение питания применимым требованиям.

◆ Включение

Для включения анализатора нажмите кнопку **Вкл/Выкл** под сенсорным экраном. Анализатор автоматически выполнит инициализацию запуска, которая займет около десяти минут.

◆ Вход пользователя в систему

1. После завершения инициализации запуска система отобразит экран входа, показанный на экране 4-9.
2. Выберите необходимый язык.
3. При первом использовании анализатора введите ИД пользователя «admin» и пароль «admin123», а затем нажмите **ВХОД**, чтобы перейти к основному экрану.