

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CU PARAMETRII TEHNICI A PRODUSULUI

MASCĂ FACIALĂ DE UZ MEDICAL TYPE II R DE UNICĂ FOLOSINȚĂ,  
filtrantă împotriva particulelor, din materiale  
netesute 100% PP tip Spunbond 23gr/m2 (albastru), Meltblown bfe99 25gr/m2 (alb) Spunbond 23gr/m2  
(alb) - densitatea 71 g/m2, dimensiuni 175 x 97 mm [+/- 3%]



Se recomandă de a folosi pe durata de pana la 2 ore.

Produs de unică folosință nu poate fi curățat sau reutilizat.

Data producerii: 2022


Termen de valabilitate: 4 ani de la data producerii.

Produsul este dispozitiv medical.

Copii trebuie să folosească masca sub supravegerea adulților.

Condiții de păstrare: A se păstra la loc uscat, ferit de umezeală și raze solare.

Producător: S.C. "NEOMATRIX" S.R.L. mun Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 121

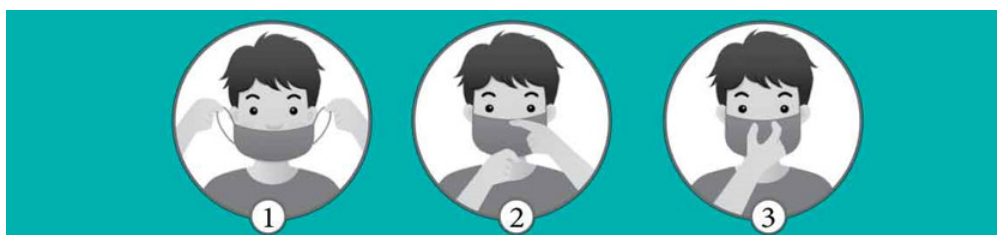

### Instrucțiuni de folosire a măștii faciale

1. Desfaceți masca, puneți masca cu latura albă spre față asigurând astfel o piele uscată pe toată durata purtării măștii. Identificați latura cu fir metalic a măștii și pliați-o pe forma nasului.
2. Fixați masca cu ajutorul firelor elastice trecute prin spatele urechilor.
3. Poziționați masca astfel încât să acopere atât nasul, cât și gura.

### How to use the face mask properly

1. Open the mask and place it with the white part to the face to keep the skin dry, while the nose-wire should be placed on top of the nose.
2. Hang both elastic ear-loops around the ears.
3. Adjust the mask so that it completely covers the mouth and nose.

Ex.: Sirbu Sergiu ☎ + 373 79597995 ✉ serge@matrix.md

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - pe pachete a câte 10 bucăți măști



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - pe cutii a câte 50 bucăți măști

Type II R  
according to  
EN 14683:2019

**Medical disposable  
face mask**

✓ 3 folds  
✓ 3 layers  
✓ with elastic

50  
pieces

**Instrucțiuni de folosire a măștii faciale**

1. Desfaceți masca, puneți masca cu latură albă spre față asigurând astfel o piele uscată pe toată durata purtării măștii. Identificați latură cu fir metalic a măștii și pliați-o pe forma nasului.
2. Fixați masca cu ajutorul firelor elastice trecute prin spațiile urechilor.
3. Poziționați masca astfel încât să acopere atât nasul, cât și gura.

**How to use the face mask properly**

1. Open the mask and place it with the white part to the face to keep the skin dry, while the nose-wire should be placed on top of the nose.
2. Hang both elastic ear-loops around the ears.
3. Adjust the mask so that it completely covers the mouth and nose.

**Producător**  
NeoMATRIX SRL  
ADRINA, nr. 31 August 1989, nr 121  
Mim, Chișinău, Republica Moldova  
TEL: +373 78 22 88 99  
E-MAIL: 112@matrix.md



|   |                                      |                           |                  |                     |
|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| NeoMATRIX S.R.L.<br>Cod fiscal: 1003600046172 | MDL (IBAN): MD52MO2224ASV12468087100 | OTP BANK SA               | BIC: MOBBMD22    | Cod TVA:<br>0503311 |
|   | MDL (IBAN): MD67AG000000022513135612 | BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA | BIC: AGRNMD2X    |                     |
|   | MDL (IBAN): MD88PR002251130057270101 | BC MOLDINDCONBANK SA      | BIC: MOLDMD2X309 |                     |