



# SOLUȚIE DE NEUTRALIZARE PENTRU MAȘINĂ AUTOMATĂ DE SPĂLARE A INSTRUMENTELOR MEDICALE

## DETRO MATIC NS – MANUAL DE UTILIZARE

---

- **Soluție de neutralizare**
- **Concentrată**

### **PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI**

Detro Matic NS este utilizat pentru îndepărtarea reziduurilor alcaline după curățarea alcalină a instrumentelor medicale în mașinile de spălat.

Îndepărtează reziduurile alcaline. Oferă o curățare eficientă.

Potrivit pentru utilizare în toate mărcile de mașini de spălat.

Compatibil cu toate tipurile de apă de duritate ridicată.

Protecție împotriva coroziunii

Activarea neutralizatorului la temperaturi  $\leq 45^{\circ}\text{C}$

Concentrație redusă de utilizare

Efect puternic

### **INGREDIENT**

> 20% acid citric (nr. cas: 77-92-9), formatori de complexe, inhibitori de coroziune.

Pentru ca produsul să spele eficient la dozajul corect, trebuie respectate recomandările producătorului dispozitivului. Pentru rezultate mai bune, utilizați împreună cu Detro Matic A (soluție alcalină).

### **DOZARE**

Se utilizează la o concentrație de 0,05-0,1%. (5-10 ml produs la 10 litri de apă)

### **AVERTIZARE**

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare. Nu utilizați pentru curățarea mâinilor, feței și alimentelor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Agent iritant. Evitați contactul cu pielea și mucoasele. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă.

### **CONDIȚII DE DEPOZITARE**

A se păstra departe de lumina directă a soarelui. A se păstra recipientele bine închise și într-un loc bine ventilat, la o temperatură între 0 și 30 °C.

### **Ambalaj**

5 litri

**DETRO HEALTHCARE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

-212 659 77 62 - 212 659 77 63

info@detrox.com.tr - www.detrox.com.tr