


Dispozitivul de înțepare este utilizat cu lancete sterile de unică folosință compatibile, pentru a recolta ușor și practic fără durere sângele capilar din vârful degetului. Dispozitivul de înțepare este destinat utilizării doar pe un singur pacient.

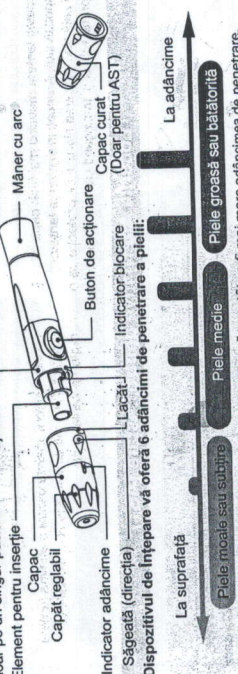

**ATENȚIE**

- ▶ Nu împărțiți niciodată lanțetele și dispozitivul de înțepare cu cineva.
- ▶ Utilizați întodeauna o lanțetă sterilă. Lanțetele sunt de unică folosință.
- ▶ Evitați contaminarea lanțetelor și a dispozitivului cu cremă de mâini, uleiuri, murdărie sau resturi.
- ▶ Lanțetele folosite sunt de pericod biologic. Aruncați-le în conformitate cu reglementările locale.
- ▶ Nu reutilizați lanțetele. Utilizați întodeauna o lanțetă nouă, sterilă pentru testare.

**Setarea Dispozitivului de Înțepare**




Răsuciți și scoateți capacul dispozitivului de înțepare.



Introduceți lanțeta în elementul pentru inserție și împingeți ferm în jos până când este complet fixat.



Răsuciți discul de protecție a lanțetei.

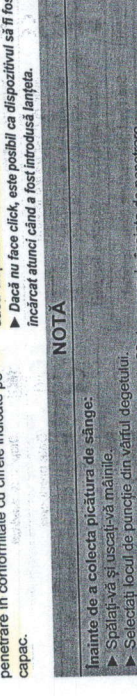

Puneți capacul și răsuciți-l pentru a închide lăcățul precum în imagine, până veți auzi un click. Când dispozitivul este blocat corespunzător, indicatorul se va afla în poziție extremă dreaptă.



Țineți degetele pe dispozitiv, NU pe capacul acestuia.



Trageți de mânerul cu arc până veți auzi un clic. Culoarea butonului de acționare se va schimba dacă dispozitivul a fost înțecat corespunzător.



Dacă nu face click, este posibil ca dispozitivul să fi fost încălțecat atunci când a fost introdusă lanțeta.

**NOTA**

- ▶ Înainte de a colecta picătura de sânge:
- ▶ Spălați-vă și uscați-vă mâinile.
- ▶ Selectați locul de puncție timp de aproximativ 20 de secunde înainte de penetrare.
- ▶ Masați locul de puncție folosind un tampon de bumbac umezit cu alcool 70% și lăsați să se usuce.



Luati dispozitivul de la locul de puncție. După penetrare, îndepărtați prima picătură de sânge cu partea inferoară a vârfului degetului. Apăsăți