

Современные средства для ухода за ранами



Пронтосан раствор

Показания

Пронтосан — готовый к применению стерильный раствор, Имеет широкий антимикробный спектр действия.

Активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli*, *St. aureus*, *St. epidermidis*, MRSA, грибов.

Промывание, очищение и деcontаминация ран различного происхождения:

- длительно **не заживающих трофических язв** при **артериальной и венозной недостаточности**,
- **диабетической стопе, пролежней** и т. д.
- **ожогов**
- **донорских участков послеоперационных и посттравматических ран**
- **наружных язв при онкологических заболеваниях поражений кожи при экземе и нейродермите**

Рана промывается раствором Пронтосана либо на раневую поверхность на 15 минут накладывается смоченная раствором салфетка.



Пронтосан раствор

Преимущества

Наиболее эффективен для лечения ран с замедленным процессом краевой эпителизации

Обладает отличной тканевой переносимостью, не повреждает грануляции

Совместим с большинством известных раневых повязок

Не вызывает аллергических реакций

Прозрачный, без цвета и запаха

Открытый флакон можно использовать в течение 2-х месяцев

Состав

0,1 % ундециленовый амидопропил-бетаин — ПАВ (поверхностно-активное вещество) для активного очищения раневой поверхности

0,1 % полиаминопропил бигуанид (полигексанид) — современный антисептик

Вода очищенная




Как работает Пронтосан раствор

Обычное промывание раны



- бактериальные биопленки не растворяются
- бактерии и остатки некротических тканей удаляются с трудом

При применении Пронтосана

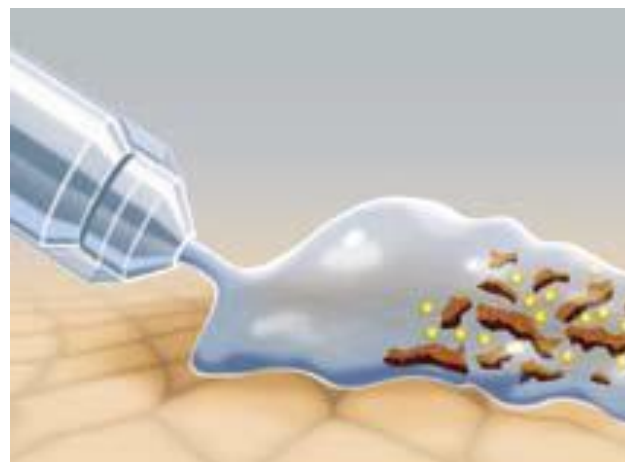

- растворение бактериальных биопленок
- тщательное очищение раневой поверхности

Аскина Хил- Повязка готовая к использованию



Показания

- Умеренно и обильно экссудирующие раны пяточной области:
- пролежни I–IV стадии,
- ожоги I–II степени, послеоперационные и посттравматические раны и т. д.; может использоваться для профилактики пролежней.

Инновационная **анатомическая** форма

Надежная **защита** раневой поверхности от давления, трения и повреждений

Губчатая структура **ослабляет давление** на пораженную поверхность

Готова к использованию, **не требует** дополнительной фиксации

Askina® Scar Repair

