

Dezinfectant Universal „Bio-Dez” lichid/gel

- ✓ Pe baza de alcool etilic
- ✓ Gata pentru utilizare
- ✓ Spectru larg de acțiune
- ✓ Nu este toxic
- ✓ Nu lasă reziduuri după uscare
- ✓ Biodegradabil
- ✓ Sigur pentru copii și adulți



Dezinfectant Universal „Bio-Dez” lichid/gel produs BIOCID

➔ Indicații

Dezinfectantul Universal „Bio-Dez” este destinat pentru:

- dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor;
- dezinfectarea suprafețelor, inclusiv dispozitivelor medicale
- dezinfectarea instrumentelor medicale

➔ Date privind substanțe active și auxiliare

- ✓ Alcool etilic (Ethyl alcohol) - 72-76%
- ✓ Clorura de benzalconiu (Benzalkonium chloride) - 0,024-0,029%
- ✓ Metilen de albastru (methylthioninium chloride) - 0,00024%
- ✓ Glicerina (glycerin)
- ✓ Apa dedurizată (aqua)

STANDARD	OBIECTUL DEZINFECTĂRII
EN 14476	Prelucrarea igienică a mâinilor
EN 1500	
EN 14348	Spălarea igienică a mâinilor
EN 13727	Prelucrarea sau spălarea chirurgicală a mâinilor
EN 13624	
EN 1276	Dezinfectarea suprafețelor
EN 1650	Dezinfectarea instrumentelor medicale
EN 14561	Dezinfectarea hainelor și materialelor textile
EN 14562	
EN 14563	Dezinfecția în domeniul agroalimentar, industrial, casnic și în colectivități
EN 12791	
EN 13697	

Dezinfectant Universal „Bio-Dez” lichid/gel produs BIOCID

➔ Indicații de utilizare

Dezinfectarea suprafețelor

Dezinfectarea suprafețelor se efectuează prin metoda de irigare sau ștergere. Suprafețele trebuie menținute complet umede cu produs.
Timpul de acțiune 60 sec



Dezinfectarea a mâinilor

igienică

Aplicați pe mâini 3 ml de produs și frecați până la uscarea completă.
Timpul de acțiune 30-60 sec



chirurgicală

Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor se efectuează prin metoda de frecare.
Condiții:
Timpul de acțiune - 2*45 sec
Cantitatea produsului - 2*7 ml



Dezinfectarea instrumentelor medicale

Dezinfectarea instrumentelor medicale se efectuează prin metoda de imersiune.
Timpul de acțiune 60 sec



SRL "Ecochim-Grup"



or.Otaci, str. Voitovici 21

tel: 069531000

e-mail: ecochim.trade@gmail.com

www.ecochim-grup.com

Dezinfectant Universal „Bio-Dez,,

Categoria de produs: biocid

Grupa principala: 1

Tip de produs: 1,2

Domeniul și aria de utilizare:

Domeniul de utilizare	TP1 – Igiena umana TP2 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Aria de aplicare	TP1 – Igiena mâinilor (prin spălarea sau frecarea); dezinfectarea chirurgicală (prin spălarea sau frecarea); dezinfectarea suprafețelor, inclusiv dispozitivelor medicale; dezinfectarea instrumentelor medicale; dezinfectarea materialelor, echipamentelor și mobilierului TP2 – Aplicații profesionale în domeniul sanitar, industrial, birouri și școli, piața de consum.

Forma de condiționare: lichid/gel

Date privind substanțe active:

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1	Alcool etilic	200-578-6	64-17-5	72-76%
2	Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri	270-325-2	68424-85-1	0,024-0,029%
3	Metilen de albastru (methylthioninium chloride)	200-515-2	61-73-4	0,00024%

Activitatea microbiologică

Activitatea	Standard/EN	Timp de acțiune
Bactericidă	13727 1500 12791 13697 14561	30-60 sec
Levuricidă	13624 13697 14562	60-90 sec
Fungicidă	13624 13697 14562	60-90 sec
Tuberculocidă	14348 14563	60 sec
Micobactericidă	14348 14563	60 sec
Virucidă	14476	60 sec

Măsuri de precauție

Pentru dezinfectantul Universal „Bio-Dez”, conform testului OESD nr. 420 – toxicitatea orală acută, s-a determinat că produsul nu poate fi periculos prin administrare. Substanța se atribuie la clasa a IV de toxicitate (substanță nepericuloasă).

- Înainte de aplicare verificați dacă dispozitivul medical este rezistent la alcool;
- Dispozitivele electrice se deconectează de la rețea;
- Lichid și vapori foarte inflamabili;
- Provoacă o iritare gravă a ochilor;
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor;
- A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis;
- Păstrați recipientul închis etanș;
- A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece;
- **IN CAZ DE CONTACT CU OCHII:** Clătiți cu atenție cu apa timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul, și dacă acest lucru se poate face cu ușurință, consultați medicul.
- Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție al ochilor/echipament de protecție al feței;
- Utilizați conținutul/containerul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale;
- Persoanele care au contraindicații sau care sunt sensibile la interacțiunea cu substanțele chimice nu sunt admise să utilizeze dezinfectantul;
- Termen de valabilitate – 36 luni



Data ultimei revizuirii a textului: 03.10.2022