

VELOX WIPES NA

Velox Wipes NA sunt recomandate pentru dezinfectarea diverselor suprafețe a echipamentelor medicale din plastic, oțel inoxidabil, metal, aluminiu, cauciuc, porțelan, sticlă acrilică. Acestea pot fi utilizate în secția de terapie intensivă și în sala de operație, pentru dezinfectarea aparatelor medicale, a echipamentelor de reabilitare, a scaunelor de tratament, a incubatoarelor și a lămpilor - ca produs medical.

Mod de utilizare: Scoateți șervețelul din ambalaj și ștergeți suprafața cu acesta. Închideți bine capacul cutiei. După deschidere, ambalajul trebuie utilizat în decurs de 30 de zile. Nu utilizați dacă șervețelele sunt uscate. Suprafața nu trebuie să fie clătită cu apă. Pentru suprafețele deosebit de sensibile, se recomandă efectuarea unui test într-o zonă invizibilă.

Substanță activă în 100 g: 0,15 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină (CAS: 2372-82-9), 0,14 g masă post-reacție de N,N-didecil-N-(2-hidroxietil)-N-metilamoniu propionat și N,N-didecil-N-(2-(2-hidroxietoxi)etil)-N-metilamoniu propionat și propionat de N,N-didecil-N-(2-(2-(2-hidroxietoxi)etoxi)etil)-N-metilamoniu.

Fraze de pericol: H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție: P273: Evitați dispersarea în mediu. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje. În cazul unui incident medical, producătorul și URPL trebuie să fie notificate.

Spectrum	EN standard according EN 14885	Test conditions	
		Clean	Dirty
Bakterie/Bacteria/Bakterien/Bacterii/Бактерии/ Bakterie/ Baktériumok/Batteri/ Bacterias/Bactérias / Bactéries/Baktērijas/ Bakterijos / Baktérie/ Бактерії /Bakterije	EN 13727	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	3 min
	EN 13697	30 sek.	60 sek.
Grzyby/ Fungi/Pilze/Ciuperци/Гъби/Houby/Gomba/ Funghi /Hongos/Fungos/ Champignons/ Sēnes/Mieliniai grybai/Huby/ Грибки/ Gljive (C. albicans)	EN 13624	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
	EN 13697	30 sek.	
Prątki/Mycobacteria/Bazillen/Micobacterii/ Микобактерии/Микобактерие/Mikobaktériumok/ Micobatteri/Micobacterias/Bacilos da tuberculose/Bacilles tuberculeux / Tuberkulozes bacili/Tuberkuliozės bacilos/ Mycobacterium tuberculosis /Бацили туберкульозу/ Bacili tuberkuloze (M. terrae)	EN 14348	5 min	10 min
Prątki/Mycobacteria/Bazillen/Micobacterii/ Микобактерии/Микобактерие/Mikobaktériumok/ Micobatteri/Micobacterias/Bacilos da tuberculose/Bacilles tuberculeux / Tuberkulozes bacili/Tuberkuliozės bacilos/ Mycobacterium tuberculosis /Бацили туберкульозу/ Bacili tuberkuloze (M. terrae, M. avium)	EN 14348	15 min	15 min
Wirusy osłonkowe/ Enveloped viruses/ Behüllte Viren/ Viruși înveliți/ Обвити вируси/ Obalené viry/ Burkolt vírusok/ Virus con involucro/ Virus envueltos/ Vírus envelopados/ Virus enveloppés/ Apvalkotie vīrusi/ Apvalkaliniai virusai/ Obálkové vírusy/ Віруси з оболонкою/ Virusi s omotačem	EN 14476	60 sek.	60 sek.