

Instrumente

HMI[®] HYGIENE CE

Preparat concentrate pulverulent de mare eficacitate, ecologic, fara fosfati-pentru dezinfectia rapida si sterilizarea chimica la rece, cu miros slab si fin cu proprietati exceptionale de curatire
Identificarea produsului/Numarul produsului/cod HMI 27.

1/3



CE
0476

data ultimei revizuirii a textului: 19.11.2018

Compozitie:

Substanta activa:

Pericarbonat de natriu;

N, N,-etilenbis [N-acetilacetamid] (tetraacetiletilendiamina);

Alte substante chimice:

Substanta activa de suprafata neionica;

Inhibitori de coroziune;

Stabilizatori.

Forma preparatului:

Praf de culoare alba.

pH-ul solutiei de 1% - 9-10

Spectrul de actiune:

HMI[®] HYGIENE CE are actiune activa bactericida (EN 13727, EN 14561, EN 13697), incl. tuberculocida (EN 14348, EN 14563), fungicida (C. albicans, Aspergillus niger - EN 13624, EN 14562), virucida (HIV, HBV, Noro virus, - EN 14476 si sporocida (Bacillus subtilis - EN 13704).

Domeniul de aplicare:

Dezinfectia de grad inalt si sterilizarea chimica la rece a instrumentelor chirurgicale si stomatologice.
Dezinfectia si curatirea suprafetelor aparatajului medical, diverselor suprafete lavabile(faianta,teracota,linoleum,metal,sticla,lemn) ,ale peretilor,podelelor si blocurilor sanitare in institutiile de sanatate publica, obiectelor pentru producerea si vinzarea produselor alimentare,cladiri obstesti,lingeriei de spital

Mod de intrebuintare:

Prin stergere cu solutie de lucru a suprafetelor afectate.

Prin scufundare in solutie de lucru a instrumentariului.

Valabilitatea solutiei de lucru este de 48 ore nu provoaca efect negativ asupra pielii.Solutia de lucru gata nu emana vapori toxici si miros neplacut.

Datorita acidului peracetic ce se formeaza, proteinele si impuritatile biologice nu actioneaza negative asupra eficacitatii biocide al preparatului. In procesul de dezinfectie eliberarea oxigenului active este de lunga durata si uniforma..

Nota: Temperatura recomandata pentru prepararea solutiei de lucru este de 35°C.

Modul de preparare a solutiei de lucru: tabela nr.1

Producator: **HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.**
81A R. Golevski st., 5000 Veliko Tarnovo, Republica Bulgaria; tel. +359 742/ 634 609; www.hmi-company.com
Reprezentant autorizat: **I.C.S. "HMI-HIGIENED INDUSTRIE" S.R.L.**
str. M. Certei 7, of. 207 etaj. Chişinău Republica Moldova; tel. +373 22 430 922

CE
0476

Directives
93/42/EEC
98/8/EC

ISO
9001
2008

ISO
14001
2004

ISO
13485
2003

OHSA
18001
2007

Experience & Quality

Certified Company

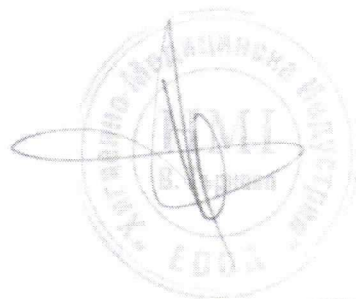


Tabela nr. 1

Solutia de lucru, %	Cantitatea preparata, gr	Cantitatea apei, ml
0,25	2,5	997,5
0,5	5	995
1	10	990
1,5	15	985
2	20	980

Mod de intrebuintare:

Metoda dezinfectiei:	Concentratia solutiei de lucru:	Expozitia:	Spectrul de actiune:
Dezinfectia si sterilizarea chimica a instrumentelor medicale si stomatologice. * Dupa dezinfectie se recomanda clatirea cu apa biologic curate de 2 ori imp de 1 minuta.	1,5%	60 minute	Sporocida 6 log редукция
	1%	30 minute	Bactericida, fungicida (C. albicans)
	2%	60 minute	Bactericida, fungicida, tuberculocida, virucida
Curatirea si dezinfectia instrumentelor chirurgicale si stomatologice. * Prin stergere. Dupa dezinfectie se clatesc apa. Dezinfectia si curatirea tuturor suprafetelor, a aparatului medical * Prin stergere. * Dupa dezinfectie se clatesc cu apa	0,25 %	15 minute	Bactericida, fungicida, Virucida (Noro virus)
	0,5%	30 minute	Bactericida, fungicida, Virucida (Noro virus) Tuberculocida, Sporocida
Dezinfectia lenjeriei in institutiile medicale * Prin inmuire * Dupa dezinfectie se spala	1 %	60 minute	Bactericida si fungicida
	2 %	60 minute	Virucida, tuberculocida

Reactii adverse:

Preparatul se clasifica ca nepericulos. Irita ochii.

Masurile de acordare a primului ajutor: la inspiratie - de a scoate sinistratul la aer liber. La contact cu pielea - inlaturarea hainei si spalarea cu apa a locului contactat. La patrunderea in ochi - spalarea cu apa curata sau solutiei de bufer pe parcursul a 15 minute. La inghitire nu se recomanda provocarea vomiei. Sinistratului in calitate de antidot i se ofera apa proteica. Adresarea la medic.

Modul de lichidare a preparatului biocid si ambalajului: resturile preparatului ca pulbere nu se arunca in canalizatie. Ambalajul cu restul preparatului se colecteaza in containere special dupa care se utilizeaza conform regulilor locale.

Interval intre procedurile de dezinfectie nu este.

Dupa expirarea timpului de expozitie a dezinfectiei precedente se permite folosirea solutiei pentru urmatoarea dezinfectie conform instructiunii

Producător: HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.
81A H. Golevski st., 5000 Veliko Tarnovo, Republica Bulgaria; tel. +359 7627 634 609; www.hmi-company.com
Reprezentant autorizat: I.C.S. "HMI-HIGIEMED INDUSTRIE" S.R.L.
str. M. Costin 7, of. 207 etaj. Chișinău Republica Moldova; tel. +373 22 430 972



Directives
93/42/EEC
98/8/EC



Certified Company



Masurile de precautie pentru transportarea si depozitarea (inclusiv mijloacelor de protectie individuala) preparatului

- la utilizare se recomanda folosirea manusilor de cauciuc si protectie pentru ochi;
- la transportare de tip inchis nu este necesar masuri de protectie speciala;
- pastrare : in ambalaj original la loc ferit de lumina si bine ventilat
- Depozitare: Păstrați în recipientul original închis, într-un loc răcoros, bine ventilat, protejat de umiditate, căldură și lumina soarelui (0+25°C).

Preparatul nu este daunator pentru mediul inconjurator. Nu se permite aruncarea preparatului concentrat in mediul inconjurator.

Clasificarea conform regulamentului (EO) № 1272/2008



Atenție

Semnele marcate pe eticheta dispozitivului medical:



XXX ZZZ – numarul individual al partidei preparatului;



Data fabricarii,



Termenul de valabilitate;



Adresa producatorului



Temperatura si conditiile de pastrare

Ambalajul: 5 kg galeata
400 g flacon

Termenul de valabilitate : 2 ani

Producător: **HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.**
81A N. Shtetevskii st., 5000 Varna-Turnovo, Republic Bulgaria; tel. +359 /42/ 624 609; www.hmi-company.com
Reprezentant autorizat: **L.C.S. "HMI-HIGIMED INDUSTRIE" S.R.L.**
str. M. Cestea 7, et. 207 mun. Chişinău Republica Moldova; tel. +373 22 400 922



Directives
93/42/EEC
98/8/EC



Certified Company