


1.11 Caracteristicile sistemului

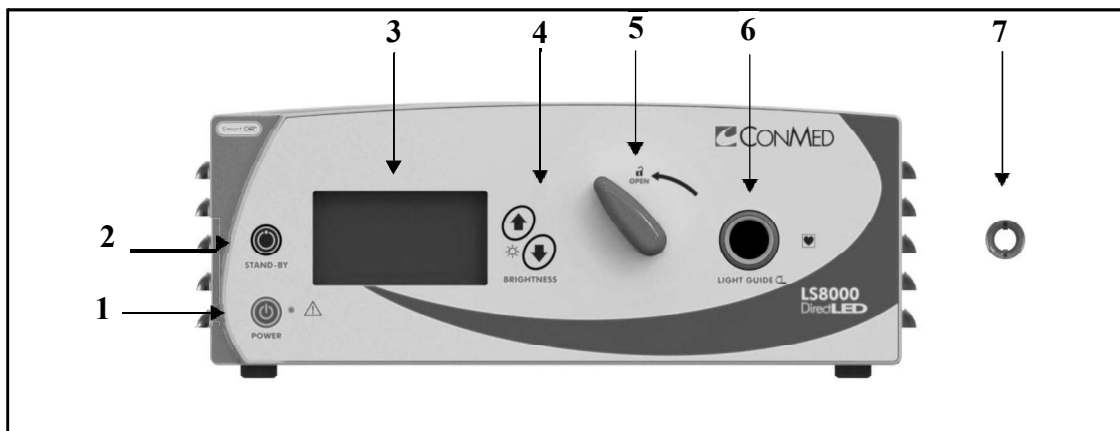

1.11.1 Panoul frontal

1. **Butonul „POWER” („Alimentare”)**- Permite utilizatorului să comute între starea OFF (de oprire) a sursei de lumină și starea ON (de pornire) a sursei de lumină. LED-ul „POWER” („Alimentare”) asociat luminează auriu în starea OFF a sursei de lumină și verde în starea ON a sursei de lumină.
2. **Butonul „STAND-BY” („Așteptare”)** - Permite utilizatorului să pună aparatul în modul de așteptare pentru a împiedica ieșirea luminii din ghidul de lumină. Apăsarea din nou a butonului STAND-BY va readuce nivelul de luminozitate la setarea anterioară și va permite ca lumina să fie emisă prin ghidul de lumină.
3. **Afisaaj cu cristale lichide (LCD) “DISPLAY”** - Afășează setările sursei de lumină, cum ar fi modul de așteptare, nivelul de luminozitate, avertismentele (ventilator blocat, supraîncălzire), întreținere necesară, conexiune la distanță, intertața camerei și mesajele de eroare.
4. **Butoane „BRIGHTNESS” („Luminozitate”)**- Permit utilizatorului să mărească sau să scadă puterea luminii.
5. **MANETĂ GHID DE LUMINĂ** - Permite utilizatorului să deschidă LGR pentru introducerea/îndepărtarea ghidului de lumină din fibră optică. Maneta este încărcată cu arc pentru a ține ghidul de lumină în timpul utilizării. De asemenea, poate fi folosit pentru a „bloca” ghidul de lumină ferm în poziție.
6. **PRIZĂ GHID DE LUMINĂ (LGR)** - Acceptă și asigură ghidul de lumină din fibră optică.
7. **Adaptor LGR** - Folosit pentru ghidarea ghidurilor de lumină cu diametru mai mic în priza ghidului de lumină.

NOTĂ: Introduceți numai ghiduri de lumină din fibră optică curate, uscate și neconductoare în LGR.