

VELOX FOAM EXTRA

Un preparat gata de utilizare, fără alcool, pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor echipamentelor medicale sensibile la alcool. Recomandat pentru suprafețele sensibile la alcool, cum ar fi sticla acrilică. Produsul are efect bactericid, levuricid și acțiune de ucidere a microbacteriilor tuberculoase, precum și asupra virusurilor încapsulate. Pentru uz general.

Mod de utilizare: Pulverizați produsul de la o distanță de 20-30 cm, având grijă să acoperiți complet suprafața. Îndepărtați excesul de produs folosind, de exemplu, un prosop de unică folosință. Pentru dezinfectarea suprafețelor deosebit de sensibile (de exemplu, pielea naturală) se recomandă un test într-un loc invizibil.

Ingrediente: 100 g de produs conține: 0,15 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamina (Diamina), 0,14 Poli(oxi-1,2-etandiol), α -[2-(didă de cilmetilamonio)etil]-omega.-hidroxi-, propanoat (sare) (Bardap 26).

Fraze de pericol: H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție:

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P233: Păstrați recipientul închis etanș.

P273: Evitați dispersarea în mediu. P305+P351+P338:

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje. În cazul unui incident medical, producătorul și URPL trebuie să fie notificate.

Spectrum	EN standard according to EN 14885	Test conditions	
		Clean	Dirty
Bakterie/Bacteria/Bakterien/Bacterii/Бактерии/ Bakterie/ Baktériumok/Batteri/ Bacterias/Bactérias / Bactéries/Baktērijas/ Bakterijos / Baktérie/ Бактерії/ Bakterije	EN 13727	60 sec.	60 sec.
	EN 16615	60 sec.	3 min
	EN 13697	30 sec.	60 sec.
Grzyby/ Fungi/Pilze/Ciuperci/Гъби/Houby/Gomba/ Funghi /Hongos/Fungos/ Champignons/ Sēnes/Mieliniai grybai/Huby/ Грибки/ Gljive (C. albicans)	EN 13624	60 sec.	60 sec.
	EN 16615	60 sec.	60 sec.
	EN 13697	30 sec.	
Prątki/Mycobacteria/Bazillen/Micobacterii/ Микобактерии/Микобактерие/Микобактэриумок/ Micobatteri/Micobacterias/Bacilos da tuberculose/Bacilles tuberculeux / Tuberkulozes bacili/Tuberkuliozės bacilos/ Mycobacterium tuberculosis /Бацили туберкульозу/ Bacili tuberkuloze (M. terrae)	EN 14348	5 min	10 min
Prątki/Mycobacteria/Bazillen/Micobacterii/ Микобактерии/Микобактерие/Микобактэриумок/ Micobatteri/Micobacterias/Bacilos da tuberculose/Bacilles tuberculeux / Tuberkulozes bacili/Tuberkuliozės bacilos/ Mycobacterium tuberculosis /Бацили туберкульозу/ Bacili tuberkuloze (M. terrae, M. avium)	EN 14348	15 min	15 min
Wirusy osłonkowe/ Enveloped viruses/ Behüllte Viren/ Viruși înveliți/ Обвити вируси/ Obalené viry/ Burkolt vírusok/ Virus con involucro/ Virus envueltos/ Vírus envelopados/ Virus enveloppés/ Apvalkotie virusi/ Apvalkaliniai virusai/ Obáľkové vírusy/ Віруси з оболонкою/ Virusi s omotačem	EN 14476	60 sec.	60 sec.
BVDV Virus	EN 14476	60 sec.	60 sec.