


2.0 INSTALAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI

2.1 Descrierea produsului

2.1.1 Descrierea pieselor de mână

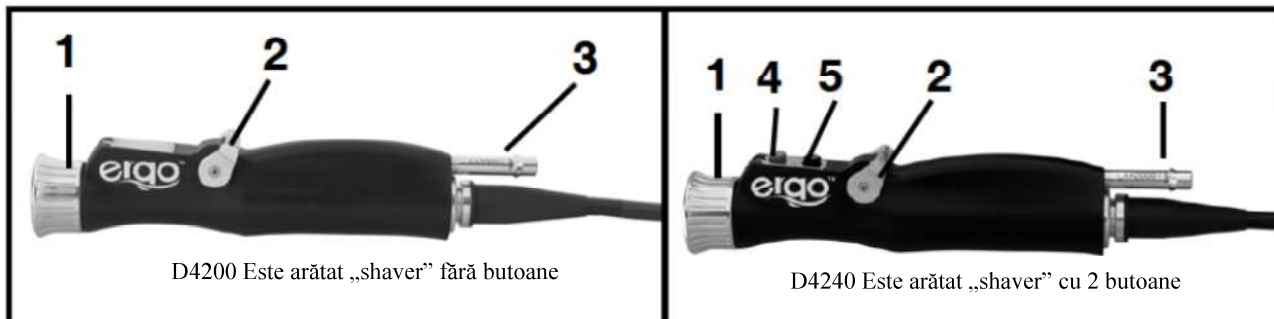


Toate aceste piese de mână sunt echipate cu senzori care selectează automat intervalul de viteză corespunzător pentru lama sau freza atasată. Pentru viteze de funcționare, consultați secțiunea „4.0 SPECIFICAȚII TEHNICE”. Piesele de mână „shaver” cu 2 butoane (D4240, D9824) sunt de asemenea echipate cu un buton DIRECTION SELECT (selectare direcție) pentru a schimba între înainte, înapoi și oscilare și un buton ON / OFF (pornit / oprit) pentru controlul piesa de mână din câmpul steril.

1. **Colier blocare lamă** - Pentru a introduce o lamă sau o freză, aliniați cheia de pe butucul lamei cu una dintre fantele din colier. Apăsăți complet butucul în colier pentru a-l bloca în poziție. Trageți de lamă pentru a vă asigura că este blocată. Pentru a scoate lama, rotiți și țineți colierul în direcția „Unlock” și scoateți lama.
2. **Supapă port de aspirație** - controlează manual debitul de aspirație. Deplasați spre partea din față a piesei de mână pentru a deschide sau pentru a crește debitul. Deplasați spre partea din spate a piesei de mână pentru a restricționa sau a opri fluxul. Pentru a atinge performanța maximă în timp ce rezecți țesutul sau osul, supapa de aspirație trebuie să fie în poziția complet deschisă.
3. **Port de aspirație** - se conectează la conducta de aspirație pentru realizarea aspirării.
4. **Butonul DIRECTION SELECT** (selectare direcție) - Apăsăți și eliberați pentru a selecta direcția de rotație a lamei între înainte, înapoi și oscilare.
5. **Buton ON / OFF** - Activează sau oprește piesa de mână.



2.1.2 Descrierea lamei de ras și a frezei

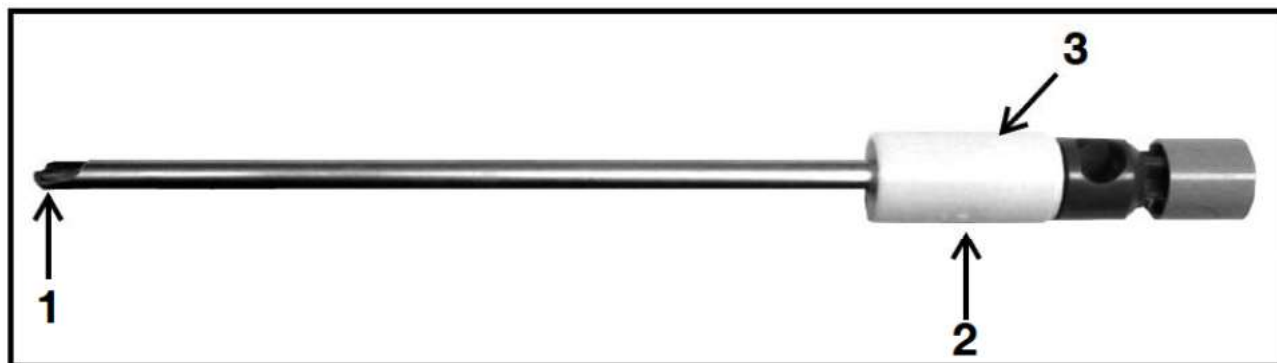

1. Vârful tăietor.
2. Lama de ras / butucul frezei - se conectează la piesa de mână „shaver”.
3. Reper de aliniere.