

chirosan® plus

schülke →



dezinfekce
dezinfekcia
dezynfekcja
disinfection

- CZ** Dezinfekce nástrojů, endoskopů a povrchů zdravotnických prostředků
- SK** Dezinfekcia nástrojov, endoskopov a povrchov zdravotníckych pomôcok
- PL** Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, endoskopów i powierzchni wyrobów medycznych
- EN** Disinfection of instruments, endoscopes and surfaces of medical devices
- TR** Cerrahi alet, endoskop ve medikal cihaz yüzey dezenfeksiyonu



LOT



CZ **SPEKTRUM ÚČINNOSTI:** Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, fungicidní, sporicidní. **ÚČINNÁ LÁTKA:** in situ generovaná kyselina peroxyoctová. **Spotřebujte do:** Data uvedeného na obalu.

SK **SPEKTRUM ÚČINNOSTI:** Baktericidny, plne virucidny, mykobaktericidny, fungicidny, sporicidny. **ÚČINNÁ LÁTKA:** in situ generovaná kyselina peroxyoctová. **Spotřebujte do:** Dátumu uvedeného na obale.

PL **SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA:** Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy, sporobójczy. **SUBSTANCJE CZYNNE:** in-situ generowany kwas nadoctowy. **Zużyć do** daty podanej na opakowaniu.

EN **EFFICIENCY SPECTRUM:** Bactericidal, fully virucidal, mycobactericidal, fungicidal, sporicidal. **ACTIVE SUBSTANCE:** in situ generated peracetic acid. **Use before:** Date on the packaging.

TR **ETKİ SPEKTRUMU:** Bakterisidal, tam virüsidal, mikobakterisidal, fungisidal, sporisidal. **AKTİF MADDE:** Oluşan perasetik asit. **Son kullanma tarihinden önce tüketiniz.**

detroy



Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445
735 81 Bohumín, Czech Republic
tel.: +420 558 320 260, www.schulke.cz

chirosan® plus

CE
1023



Nebezpečí
Nebezpečenstvo
Niebezpieczeństwo
Danger
Tehlike



UFI: HG4X-RK03-500P-YXR2

1,5 kg



OPEN


Ver: 11022021

Účinnost / Účinnosť / Spektrum działania / Efficacy / Efki Spektrumu	Norm / Norma	Konc. / Stężenie / Concentration / Konsantrasyon	Čas / Czas / Time / Temas Süresi
Baktericidní / baktericidny / bakteri- obójczy / bactericidal / bakterisidal	EN 13727 + A2	0,5 %	5 min
	EN 13697	2 %	20 g/l
Levurocídni / levurocídny / drożdża- kobójczy / yeasticidal /	EN 16615	2 %	20 g/l
	EN 14561	2 %	20 g/l
Fungicidní / fungicidny / grzybobó- jczy / fungicidal / fungisidal (A.brasiliensis)	EN 13624	0,5 %	5 g/l
	EN 13697	2 %	20 g/l
Virucidní / vručidny / wirusobójczy wobec BYDV, Vaccinia / virucidal / virüsidal BYDV, Vaccinia	EN 14562	0,5 %	5 g/l
	EN 13624	1 %	10 g/l
Virucidní / vručidny / wirusobójczy wobec rotavirusa / virucidal / virüsidal rotavirus	DW/RKI	2 %	20 g/l
	EN 14476 + A1	0,5 %	5 g/l
Virucidní / virucidny / wirusobójczy wobec adeno virusa / virucidal / virüsidal adenovirus, MNV - norovirus	EN 14476 + A1	0,5 %	5 g/l
	EN 17111:2018	1 %	10 g/l
Virucidní / virucidny / wirusobójczy wobec virusa polio / virucidal / virüsidal poliovirus	EN 14476 + A1	2 %	20 g/l
	EN 14476 + A1	0,5 %	5 g/l
Mykobaktericidní / mykobaktericid- ny / praťkobójczy / mycobactericidal / mikobakterisidal	EN 14348	2 %	20 g/l
	EN 14563	0,5 %	5 g/l
Sporocidní / sporocídny / sporobó- jczy / sporicidal / sporisidal (B.subtilis, Cl.difficile, B. cereus)	EN 17126*	1 %	10 g/l
		2 %	20 g/l

* čisté podmienky/ čiste podmienky/ warunki czyste / clean conditions

2% racol./rac wórsididje/štim -> 1000ppm Myšlina perovycová/Kies nadactový/Pencak c.c/d/ponacik est

1% CONCENTRATION

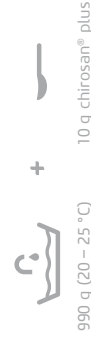

990 g (20 – 25 °C)

10 g chirosan® plus



MIX

ACTIV 15 MIN