

SURFANIOS *Premium*

Détergent
Désinfectant
Sols et Surfaces



Laboratoires
ANIOS

Le professionnel de la désinfection

1L

UN19170001LELR-151222

SURFANIOS Premium

FR Détergent Désinfectant Sols et Surfaces

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...). **COMPOSITION :** N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9, N°CE 219-145-8 : 51 mg/g), Chlorure de didécylmethylammonium (N°CAS 1373-51-5, N°CE 230-525-2 : 25 mg/g), excipients. **PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :** Bactéricide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 13727, EN 13697, EN 16615). Levuricide en 30 min, 0,25%, 20°C (EN 13624, EN 13697, EN 16615). Tuberculicide en 60 min, 0,25%, 20°C ou en 30 min, 0,50%, 20°C (EN 14348). Actif sur Norovirus selon EN 14476 en 60 min, 0,50%, 20°C ou en 30 min, 2%, 20°C. **MODE D'EMPLOI :** Solution concentrée. S'utilise à la dilution de 0,25% (2,5 ml/l), soit 20 ml pour 8 litres d'eau froide ou chaude (max. +60°C). Augmenter la dose d'emploi à 0,5% ou

2% (5 ml/l ou 20 ml/l) pour une activité sur Norovirus. Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si les zones à traiter sont destinées à être en contact avec la peau ou les muqueuses. Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place. A la dilution d'emploi, le produit ne présente pas d'incompatibilité avec les matériaux couramment rencontrés. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** DANGER. Contient du N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine et du chlorure de didécylmethylammonium. (H315) Provoque une irritation cutanée. (H318) Provoque des lésions oculaires graves. (H410) Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (H290) Peut être corrosif pour les métaux. Utiliser dans des zones bien ventilées. (P280) Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. (P305 + P351 + P338) EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. (P310) Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. (P302 + P352) EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. Si besoin, consulter un médecin. (P102) Tenir hors de portée des enfants. (P234) Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas réutiliser l'emballage. (P273) Éviter le rejet dans l'environnement. (P501) Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 TP 21) et des dispositifs médicaux de classe IIa usage

RO Detergent dezinfectant pentru podele și suprafețe

INDICAȚII : Spălarea și dezinfectarea pardoselilor, a pereților, a echipamentului medical și a dispozitivelor medicale noninvasive (stetoscoape, teste de glicemie, ciocănele pentru testarea reflexelor...). **COMPOZIȚIE :** N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină (nr. CAS 2372-82-9, nr. CE 219-145-8 : 51 mg/g), Clorură de didecilmetilamoniu (nr. CAS 1373-51-5, nr. CE 230-525-2 : 25 mg/g), excipienți. **PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE :** Bactericid în 15 min, 0,25%, 20°C (EN 13727, EN 13697, EN 16615). Levuricid în 30 min, 0,25%, 20°C (EN 13624, EN 16615). Tuberculoză în 60 min, 0,25%, 20°C sau în 30 min, 0,50%, 20°C (EN 14348). Activ pe Norovirus conform EN 14476 în 60 min, 1%, 20°C sau în 30 min, 2%, 20°C. **INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE :** Soluție concentrată. Se utilizează prin diluare în procent de 0,25% (2,5 ml/l), fie a 20 ml la 8 litri de apă rece sau caldă (max. +60°C). Măriți doza de utilizare la 0,5% sau 2% (5 ml/l sau 20 ml/l) pentru o acțiune asupra Norovirus. A se aplica într-o cantitate suficientă (+/- 30 ml/m²). Pentru obținerea activității antimicrobiene vizate, respectați durata de contact. Spălarea este inutilă doar dacă zonele care trebuie tratate intră în contact cu pielea sau cu mucoasele. Pentru frecvența de utilizare și curățarea materialului de aplicare, consultați planul de igienă în vigoare. La diluția de utilizare, produsul nu prezintă incompatibilități cu materialele întâlnite în mod frecvent. **INDICAȚII DE FOLOSIRE :** PERICOL. Conține N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină și clorură de didecilmetilamoniu. (H315) Provoacă iritația pielii. (H318) Provoacă leziuni oculare grave. (H410) Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. (H290) Poate fi corosiv pentru metale. A se utiliza în spații bine aerisite. (P280) Purtați măști de protecție și echipament de protecție a ochilor/feței. (P305 + P351 + P338) ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp

de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. (P310) Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. (P302 + P352) ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: clătiți cu multă apă. Dacă este necesar, consultați medicul. (P102) A nu se lăsa la îndemâna copiilor. (P234) Păstrați numai în recipientul original. A nu se reutiliza ambalajul. (P273) Evitați dispersarea în mediu. (P501) Eliminați produsul și recipientul acestuia ca deșeur periculoase. Produs biocid destinat dezinfectării suprafețelor (Grup 1 TP 2) și dispozitivelor medicale de clasă IIa – utilizare rezervată profesioniștilor. Fabricat în Franța. Autorizat în România cu AVIZ nr. 3324810/02/12.24.



PRODUSĂ ÎN
DILUARE
PRODUSĂ DE
TREBUIE
DILUAT
20 ml -> 8 L



LOT



Distribuit de : GB INDCO S.R.L.
Boulevard Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. a, Ap.8,
Sector 4, București - 040233 ROMANIA
Tel : +40 21.336.12.12. Fax : +40 21.336.38.87.
e-mail : contact@gbindco.ro

Laboratoires ANIOS
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - FRANCE
Tél : +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité conforme à la norme ISO 9001, certifiée par l'ARAFQ sous le numéro 1995/3723. Acest produs a fost fabricat conform unor proceduri de calitate conforme standardului ISO 9001, certificat de ARAFQ cu numărul 1995/3723.

Y1917996001LEV-1/UK-26