

Instrucțiuni de utilizare pentru Cuseta Medicală

CUSETĂ MEDICALĂ PENTRU EXAMINARE: model CM - 02S

Cușetă medicală destinată examinării clinice și manevrelor ușoare în cabinete și secții spitalicești. Cadru robust din oțel vopsit în câmp electrostatic, stabil și ușor de igienizat. Saltea din burete de densitate medie, tapitată cu piele artificială (lavabilă și rezistentă la dezinfectanți). Tetiere reglabile în 3 poziții pentru confortul pacientului.

Indicații de utilizare: examinări clinice, proceduri ambulatorii, pansamente, recoltări.

Contraindicații: niciuna, dacă sunt respectate instrucțiunile de utilizare, nu se utilizează pentru transportul pacienților.

Atenționare: verificați stabilitatea pe pardoseală și fixarea tetierei înainte de utilizare; nu depășiți sarcina maximă, curățați și dezinfectați după fiecare pacient.

Denumirea principalilor parametri și dimensiuni	CM – 02S
Structura carcasei	Cadru - oțel vopsit polimer
Dimensiunea	1900*650*580mm
Secțiuni	2
Reglarea poziției cap(tetiera)	3 nivele
Greutatea maximă de exploatare	200kg
Culoarea tapiteriei	la alegere
Material la tapiterie	Piele artificială
Suport pentru cearșaf	da(62 cm)
Suport pentru perfuzie IV	da(reglabil)
Mecanism de picior pliabil	da

Reguli pentru utilizarea echipamentului

1. Transportul, depozitarea și operarea produsului trebuie efectuate în conformitate cu parametrii cușetei medicale.
2. Cușeta medicală trebuie utilizată în încăperi închise și uscate, cu o temperatură care să nu fie mai mică de +2°C și mai mare de +40°C și o umiditate relativă de 45 - 70%.
3. Nu permiteți expunerea directă la lumina soarelui, deoarece dăunează aspectului produselor, poate schimba culoarea suprafeței.
4. Cușeta medicală trebuie instalată la o distanță de cel puțin 0,5 m de dispozitivele de încălzire.
5. Protejați echipamentul de deteriorări mecanice și de expunerea la substanțe chimice agresive. Fiți atenți la manipularea substanțelor care lasă pete indelebile.
6. Nu utilizați obiecte ascuțite, acizi, soluții alcaline sau agenți abrazivi pentru curățarea vaselor și a obiectelor sanitare

Îngrijirea suprafețelor

1. Produsele necesită puțină întreținere și sunt practice de utilizat.
2. Produsul poate fi curățat cu orice agent de curățare pe bază de alcool, cu excepția celor cu un principiu de acțiune abraziv.
3. O perie moale poate fi utilizată pentru curățarea murdăriei dificile.
4. Utilizați o cârpă ușor umedă și detergenți normali pentru a curăța țesătura.
Nu utilizați solvenți sau substanțe chimice agresive

Condiții de garanție

- Perioada de garanție este de 24 de luni de la data vânzării produsului.
- **Produsul este scos din serviciul de garanție dacă:** cumpărătorul a încercat să repare singur produsul;
 - au fost detectate modificări neautorizate în proiectarea produsului;
 - daune mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Garanția nu se aplică elementelor de fixare și altor produse achiziționate care nu sunt fabricate de această societate.



Producător: Caravan Express SRL
Republica Moldova
or. Cimișlia, MD-4101



Maraca comerciala ALICOM