- Completați câmpurile **Număr de referință**, **ID pacient** sau **ID analizor** pe ecranul **Identificare pacient** și solicitați datele pacientului.
- Completați câmpul **Departament pacient** din ecranul **Identificare pacient**, căutați, găsiți și solicitați datele pacientului.

NOTIFICARE: Pentru a utiliza această opțiune, este necesar să activați căutarea pacienților.

S26 Configurarea cererilor automate pentru datele despre pacienți

Condiții prealabile

- Este configurată o conexiune la sistemul LIS/HIS sau AQURE/RADIANCE din care trebuie să fie solicitate datele despre pacient
- 1. Atingeți Meniu > Opțiuni > Configurare > Configurare generală > Comunicații > Solicitare automată de date.
- Selectați conexiunea la sistemul din care trebuie să fie cerute datele despre pacient.
- 3. În cadranul Solicitare informații demografice pacient, selectați butonul de validare pentru câmpul de date de pe ecranul Identificare pacient care, atunci când este completat, va solicita automat din sistem datele pacienților.

NOTIFICARE: Puteți selecta mai multe butoane de validare, însă Radiometer recomandă selectarea unui singur buton.

4. Atingeți butonul **Închidere**.

S26 Configurarea transmiterii automate a datelor către un sistem

Condiții prealabile

- Este configurată o conexiune la sistemul LIS/HIS și/sau AQURE/RADIANCE către care urmează a fi trimise datele.
- 1. Apăsați pe Meniu > Opțiuni > Configurare > Configurare generală > Comunicații > Transmitere date automată.
- **2.** Selectați numele conexiunii.
- **3.** Selectați butoanele de validare pentru datele care trebuie să fie trimise automat.
- **4.** Repetați pașii 2 și 3 pentru fiecare sistem către care doriți să transmiteți date.
- **5.** Apăsați pe butonul **Închidere**.

S26 Activarea solicitării manuale a datelor pacienților cu ajutorul funcției Căutare pacient

Condiții prealabile

- Dacă datele vor fi solicitate de la un sistem LIS/HIS sau AQURE/RADIANCE, este necesară configurarea unei conexiuni cu sistemul respectiv
- Elementul Raport pacient selectat conține câmpul Departament (Pac.)

Datele pacientului pot fi solicitate din baza de date a analizorului sau dintr-un sistem LIS/HIS sau AQURE/RADIANCE conectat.

Această procedură permite operatorilor să solicite manual date despre pacienți, prin intermediul unui buton **Căutare pacient**, după ce au completat câmpul **Departament** (pac.) al ecranului **Identificare pacient**.

- 1. Apăsați pe**Meniu > Opțiuni > Configurare > Configurare generală > Comunicări > Configurare căutare pacient**.
- 2. Selectați numele conexiunii.