

3. Rulați un ciclu de spălare în mașina de spălat/dispozitivul de curățare, conform specificațiilor producătorului.
Se recomandă un ciclu de uscare, deși acesta nu este obligatoriu.

Sterilizare

1. Sterilizarea acumulatorilor poate fi realizată utilizându-se abur sau STERRAD®¹.

AVERTIZARE: Utilizarea soluțiilor de dezinfectare pentru a șterge exteriorul bateriei nu va steriliza echipamentul și nu este recomandată.

Baterii individuale cu împachetare dublă. În Statele Unite, utilizați o folie de sterilizare aprobată de FDA.



Tabelul 1: Parametri de sterilizare pentru baterii cu litu Hall fără tavă de sterilizare a sistemului în Statele Unite

Sterilizarea cu abur a bateriilor care urmează să fie depozitate în vederea unei utilizări ulterioare				
Metodă	Ciclu	Temperatură	Expunere	Timp de uscare
Abur (învelită)	Previdare	270°F (132°C)	3 minute	20 minute
Sterilizarea cu abur a bateriilor pentru utilizare imediată				
Metodă	Ciclu	Temperatură	Expunere	Timp de uscare
Abur (învelită)	Previdare	270°F (132°C)	3 minute	Nu necesită timp de uscare

Tabelul 2: Parametri de sterilizare pentru baterii cu litu Hall în afara Statelor Unite

Sterilizarea cu abur a bateriilor care urmează să fie depozitate în vederea unei utilizări ulterioare						
Metodă	Ciclu	Temperatură min.	Temperatură max.	Expunere min.	Expunere max.	Timp de uscare
Abur (învelită)	Previdare	273°F (134°C)	278°F (137°C)	3 minute	4 minute	20 minute
Abur (în tavă din aluminiu)	Previdare	273°F (134°C)	278°F (137°C)	4 minute	18 minute	45 minute*
Sterilizarea cu abur a bateriilor pentru utilizare imediată						
Metodă	Ciclu	Temperatură min.	Temperatură max.	Expunere min.	Expunere max.	Timp de uscare
Abur (învelită)	Previdare	273°F (134°C)	278°F (137°C)	3 minute	4 minute	Nu necesită timp de uscare

* Pentru parametri de sterilizare specifici tăvii, consultați instrucțiunile de utilizare a tăvii de sterilizare Hall.

AVERTIZARE: Bateriile ude nu trebuie depozitate în vederea unei utilizări ulterioare. Nerespectarea instrucțiunii de utilizare imediată poate compromite sterilitatea bateriei.

PRECAUȚIE: Bateriile nu trebuie supuse unor cicluri consecutive de tip „Utilizare imediată”. Asigurați-vă că efectuați un ciclu de uscare între două cicluri de tip „Utilizare imediată”. Dacă nu uscați bateria, există riscul de reducere a performanței acesteia.

Notă: Bateriile au fost testate pentru supraviețuire până la 278°F (137°C) cu un timp de expunere de 18 minute și un timp de uscare de 45 de minute în tavă de aluminiu aprobată.

Bateria descrisă în acest manual au fost aprobată pentru sterilizare în sistemele STERRAD® 100S, 200, 50, NX®, 100NX®.



Sistemul STERRAD®	Ciclu	Comentarii
STERRAD® 100S și STERRAD® 200	SCURT	Ciclu disponibil numai în S.U.A.
	LUNG	Acesta este unicul ciclu disponibil în afara S.U.A.
STERRAD® 50	-	-
STERRAD® NX®	STANDARD	-
	AVANSAT	-
STERRAD 100NX®	EXPRES	-
	STANDARD	-

Testarea a fost efectuată în conformitate cu instrucțiunile AAMI TIR nr. 12-2010, „Designing, Testing and Labeling Reusable Medical Devices for Reprocessing in Health Care Facilities: A Guide for Device Manufacturers”.

Consultați instrucțiunile de utilizare a sistemului STERRAD pentru instrucțiuni generale privind reprocesarea, inclusiv curățarea și uscarea adecvate, precum și pentru informații privind ambalarea înainte de reprocesarea oricărui dispozitiv medical într-un sistem STERRAD.

1. STERRAD®, STERRAD® 100S, STERRAD® 200, STERRAD® 50, STERRAD® NX® și STERRAD 100NX® sunt mărci comerciale înregistrate ale diviziei Advanced Sterilization Products (ASP) a Ethicon, Inc., o companie Johnson & Johnson.