

МИРАФЛОРЕС® ФОРТЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ



Упаковка:
3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ЧАС, глутаровый альдегид, молочная кислота

Антимикробная активность:

- **бактерии** (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, tuberculosis, чумы, холеры, туляремии, легионеллеза)
- **вирусы** (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- **патогенные грибы**, включая плесневые

Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

- **дезинфекция и мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
 - холодильных и морозильных установок;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
 - датчики УЗИ;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, медицинских изделий ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,15%/0,2%/0,25%/0,4%/0,6% -90 мин./60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.

Вирусы — 0,25%/0,4%/0,8%/1,5%/2,0%-120 мин./60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.

Микобактерии туберкулеза — 5,0%/ 6,0%/8,0% / — 120 мин. / 60 мин. / 30 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:

—

0,5%/1,0%/1,5%-60 мин./30 мин./15 мин.

3,0%/5,0%/6,0%/7,0%-120 мин./60 мин./30 мин./15 мин.