


2.5 Meniul principal

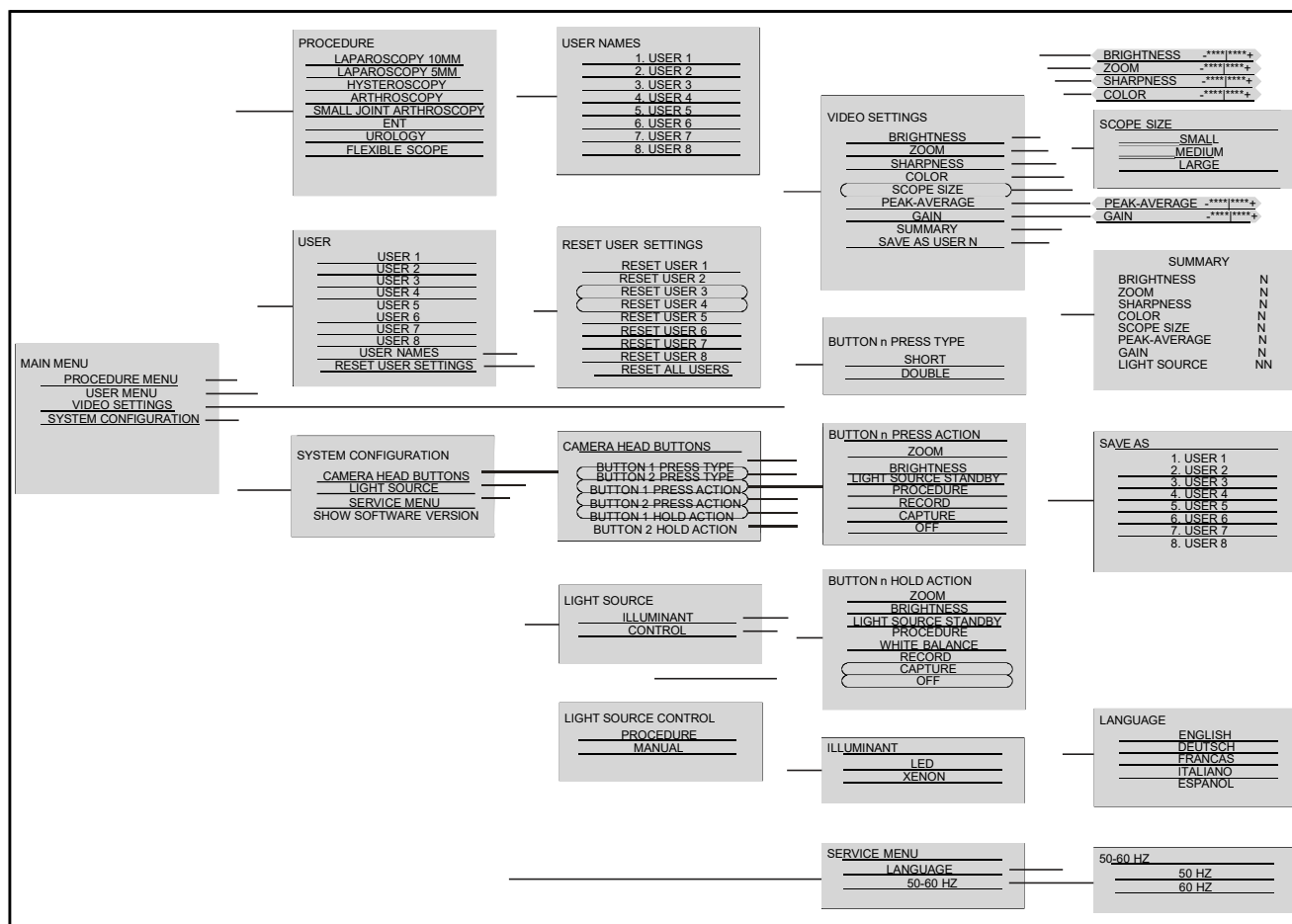

Apăsând butonul MENU de pe panoul frontal al controlerului camerei, se afișează MAIN MENU (Meniul principal), care afișează următoarele opțiuni de meniu OSD:

PROCEDURE MENU (MENIUL PROCEDURII)

USER MENU (MENIUL UTILIZATORULUI)

VIDEO SETTINGS (SETĂRILE VIDEO)

SYSTEM CONFIGURATION (CONFIGURAȚIA SISTEMULUI)

2.5.1 Meniul procedurii

Selectarea acestei opțiuni afișează un meniu **PROCEDURE** unde se selectează procedura medicală care trebuie efectuată. Opțiunile sunt:

LAPAROSCOPY (LAPAROSCOPIE) 10MM

LAPAROSCOPY (LAPAROSCOPIE) 5MM

HYSTEROSCOPY (HISTEROSCOPIE)

ARTHROSCOPY (ARTROSCOPIE)

SMALL JOINT ARTHROSCOPY (ARTROSCOPIE ARTICULAȚIE MICĂ)

ENT (ORL)

UROLOGY (URLOGIE)

FLEXIBLE SCOPE (APARAT OPTIC FLEXIBIL)

Odată ce procedura este selectată, OSD va afișa procedura în partea de jos a ecranului timp de aproximativ 5 secunde, iar imaginea live va rămâne.