


Pentru transport, consultați secțiunea 4 din acest manual.

2.4 Riscul de instabilitate mecanică

Sistemul general trebuie să fie în conformitate cu IEC 60601-1.

2.5 Rotilele

Sistemul de transport **uni-cart, vexio-cart, pro-cart, duo-cart, compact-cart, classic-cart** sau **endo-cart** are **rotile duble cu pivot cu frâne**. Ar trebui să verificați dacă dispozitivele de **blocare a roților** funcționează corect înainte de a utiliza sistemul de transport **uni-cart, vexio-cart, pro-cart, duo-cart, compact-cart, classic-cart** sau **endo-cart**. Atunci când parcați căruciorul sau când că opriți în timpul transportului, toate frânele roților de pe căruciorul de echipamente trebuie să fie apăstate (dispozitiv de blocare a rolei). În consecință, toate frânele roților trebuie să fie eliberate înainte de deplasare și transport.

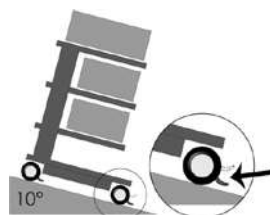

Rotila trebuie să fie testată la fiecare 12 luni pentru a asigura siguranța, precum și butucul ferm, rezistent la fisuri, al bulonului de fixare a roții. Dacă acestea sunt pierdute, vă rugăm să contactați imediat furnizorul.

2.6 Capacitatea de încărcare

Nu este permisă depășirea coeficientului de încărcare a sistemului de transport **uni-cart, vexio-cart, pro-cart, duo-cart, compact-cart, classic-cart** sau **endo-cart**.

Ar trebui să respectați capacitatea maximă de încărcare a sistemului de transport **uni-cart, vexio-cart, pro-cart, duo-cart, compact-cart, classic-cart** sau **endo-cart** (consultați secțiunea 10 din aceste instrucțiuni de utilizare).

2.7 Montajul/manipularea

2.7.1 Rafturile

Rafturile pot fi scoase sau montate în altă poziție. Slăbiți șuruburile, poziționați din nou raftul și apoi înșurubați din nou raftul în poziție. Verificați rezistența.