

Очковая оправа Keeler для биноклярных луп

Руководство



Keeler



Вперед ►

Прикрепите биноклярную лупу к очковой оправе, насадив лупу на крепежные штырьки, как показано на рисунке.



Keeler

Чтобы установить защитный щиток, вставьте его, как показано на рисунке.

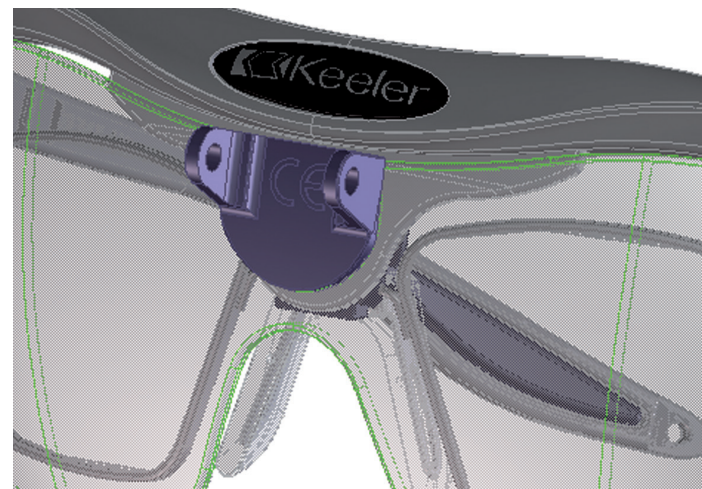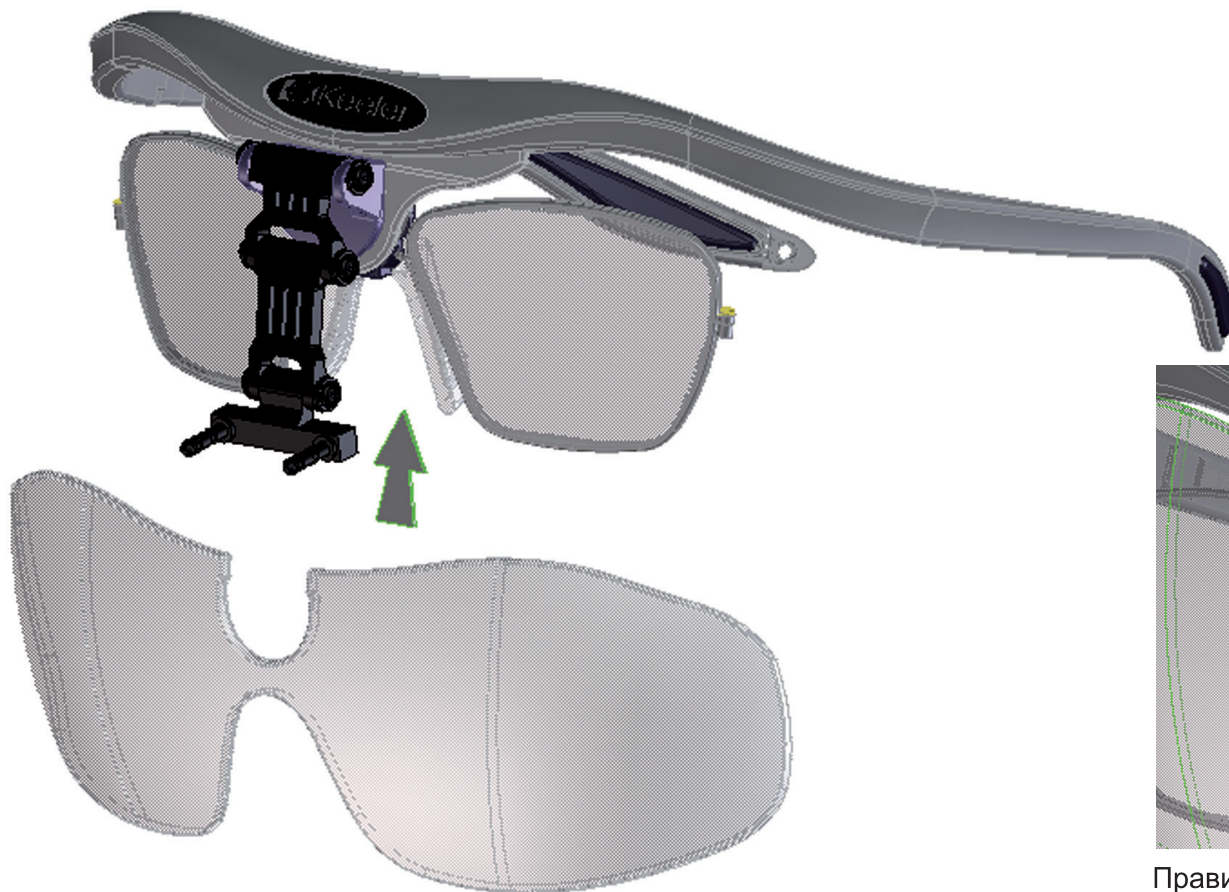

Правильное положение защитного щитка

Keeler


При необходимости установите оправу с диоптрическими линзами, как показано на рисунке.



Правильное положение оправы с диоптрическими линзами

Keeler

Чтобы отрегулировать положение носового упора, высвободите его, повернув фиксатор, как показано на рисунке, затем передвиньте носовой упор в необходимое положение.

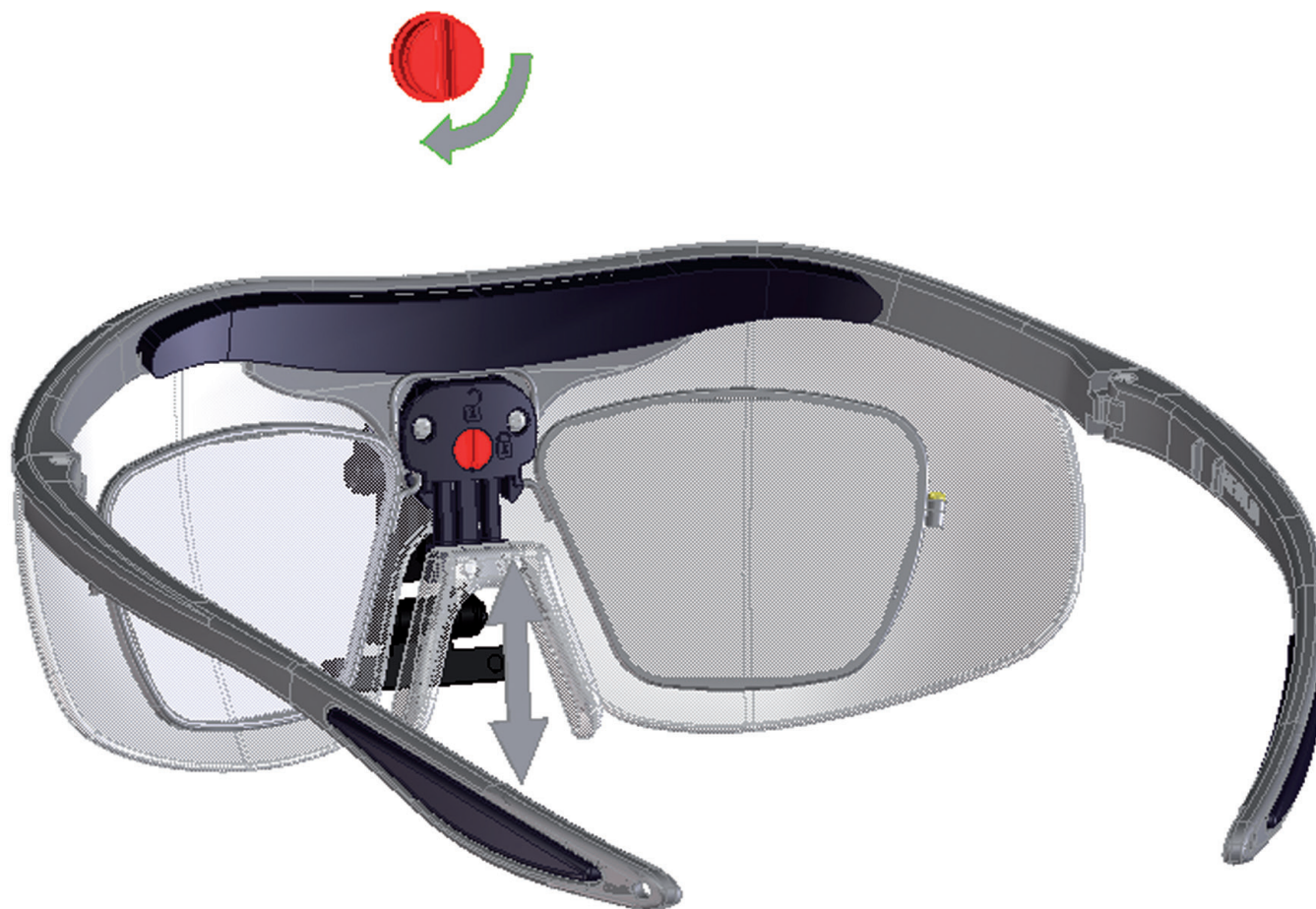


Keeler

Зафиксируйте носовой упор в необходимом положении, повернув фиксатор, как показано на рисунке.



Keeler

Передвиньте изображенный на рисунке регулятор так, чтобы очковая оправа надежно и удобно сидела на голове.

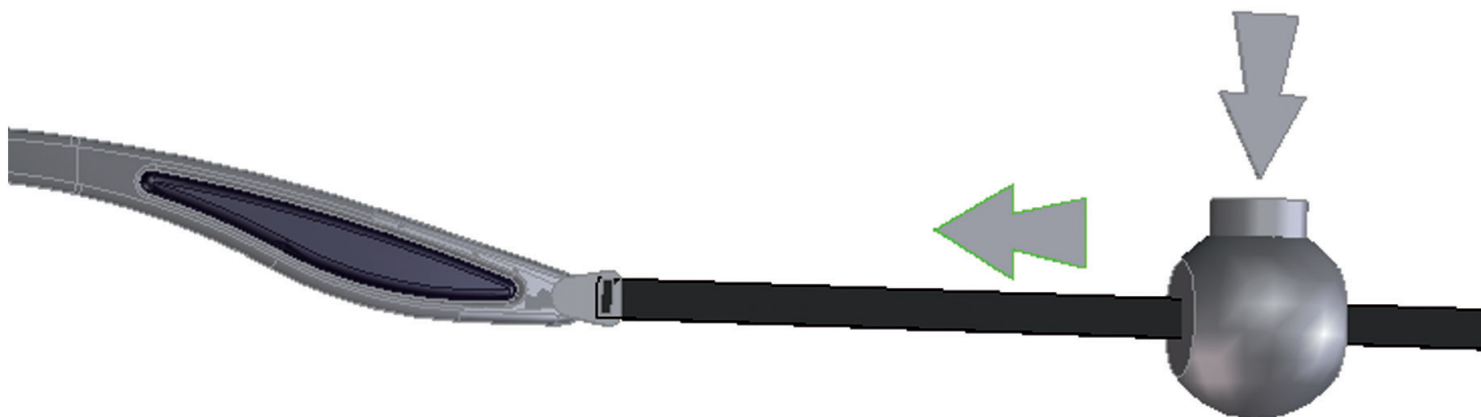

Keeler

Контактная информация

Изготовлено в Великобритании:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA

Бесплатный тел.: 0800 521 251

Тел.: +44 (0)1753 857177

Факс: +44 (0)1753 827145

Дистрибьютор:

Keeler Instruments Inc
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355
USA

Бесплатный тел.: 1 800 523 5620

Тел.: 1 610 353 4350

Факс: 1 610 353 7814

Стремясь к постоянному совершенствованию наших изделий, мы оставляем за собой право в любое время без предварительного уведомления изменять их технические характеристики.



EP59 – 19025 Выпуск В

Keeler

[Назад](#)