

CURATAREA SI DEZINFECTIA DE NIVEL INALT A SUPRAFETELOR

Incidin™ Active

Produs concentrat pe baza de oxigen activ

Incidin Active este un produs cu spectru larg de eficacitate (inclusiv virucid si sporicid), cu proprietati excelente de curatare si compatibilitate dovedita cu materialele, fiind astfel special conceput pentru **zonele cu risc** din unitatile medicale.

Additional fata de actiunea simultana de curatare si dezinfectie, Incidin Active ofera si urmatoarele:

- ▲ Timp redus de contact
- ▲ Concentratie scazuta pentru solutia de lucru
- ▲ Compatibilitate excelenta cu materialele, datorita tehnologiei patentate PerOxyBalance™
- ▲ Certificat RKI pentru controlul epidemiilor, eficacitate tip A/B



Incidin™ Active

Produs concentrat pe baza de oxigen activ

De ce sa utilizati Incidin Active?

SPECTRU LARG DE EFICACITATE LA TIMPI REDUSI DE CONTACT

Incidin Active este special conceput sa imbine dezinfectia de nivel inalt impotriva bacteriilor (inclusiv TB), levurilor, fungilor, virusurilor si sporilor, cu proprietatile excelente de curatare, chiar si la concentratii reduse.

Eficacitatea virucida si sporicida il recomanda in cazul epidemiilor cu Norovirus sau C. Difficile.

REZULTATE TESTARI MICROBIOLOGICE SI VIRUSOLOGICE

EFICACITATE	CONCENTRATIE		TIMP DE CONTACT
	%	g/L ¹	
Dezinfectia suprafetelor in conf cu VAH (bactericid, levuricid) cond. de curatenie & murdarie	1.0	10	5 min
Dezinfectia suprafetelor in conf cu VAH (tuberculocid, micobactericid) cond. de curatenie & murdarie	2.0	20	5 min
EN 16615 (bactericid, levuricid) cond. de curatenie & murdarie	1.0	10	1 min
EN 13727 (bactericid) (cond. de curatenie & murdarie) EN 13624 (levuricid) (cond. de curatenie & murdarie)	1.0	10	5 min
EN 14348 (tuberculocid, micobactericid) (cond. de curatenie & murdarie)	1.0 2.0	10 20	15 min 5 min
Virucid in conf. cu recomandarile RKI 01/2004*	2.0	20	30 min
EN 14476 (virucid)	1.0 2.0	10 20	60 min 10 min
EN 13704 (sporicid)	2.0	20	15 min
Sporicid conf test in 4 zone pe C. Diff R027)	1.0 2.0	10 20	30 min 10 min
Testat RKI (Dezinfectie prin stergere in cazuri de epidemii in conf. cu RKI): - eficacitate tip A/B: bacterii incl. micobacterii, fungi si virusuri - eficacitate tip B: virusuri	3.0 2.0	30 20	60 min 60 min

* DVV 2015
1 masura dozare = 30ml = 20g

PerOxyBalance™
The active substance with "Oxy Power"

PerOxyBalance™ stabileste noi standarde in domeniul dezinfectiei de nivel inalt, prin combinarea proprietatilor de curatare si compatibilitatea optima cu materialele.

EUROPEAN HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2001
www.ecolab.com

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

ECOLAB SRL.
Centrul de afaceri "IDEO",
Sos. Pacurari nr. 138 et. 2,
700545 - Iasi
tel.: 0232222210
www.ecolab.com

SIGUR. COMPATIBIL. EFICIENT.

ARIA DE UTILIZARE

Incidin Active este un produs concentrat, cu eficacitate sporicida, pentru curatarea si dezinfectia dispozitivelor medicale si a suprafetelor generale din institutiile medicale.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pentru prepararea solutiei de lucru se dizolva pulberea in apa de cel putin calitatea apei potabile si se amesteca de cateva ori. Dupa 15 minute solutia de lucru este gata de utilizare.

Suprafata trebuie sa fie umectata complet. Solutia de lucru poate fi pastrata intr-un recipient curat si inchis, pe durata unei zile lucratoare. Produsul se prepara si utilizeaza intr-o zona ventilata corespunzator.

INGREDIENTE

Substante active in solutie 20g/L (2%): > 1000mg/L (ppm) acid peracetic. Substanta activa, acidul peracetic, se formeaza la prepararea solutiei de lucru.

AMBALARE SI INFORMATII COMANDA

PRODUS	AMBALARE	COD COMANDA
Incidin Active Doza	24 x 160g	XXXXXXX
Incidin Active Galeata	4 x 1.5kg	3061400

DEPOZITARE

Pastrati produsul in recipientul original, la temperaturi sub 25°C in locuri uscate, ferite de raze solare directe.

UTILIZATI BIODECELE IN SIGURANTA. CITITI INTOTDEAUNA INFORMATIILE DESPRE PRODUS INAINTE DE UTILIZARE. DOAR PENTRU UTILIZATORI PROFESIONALI.

CE 0297

ECOLAB™



**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIOCID**

Nr. 00103 data/luna/anul 29.12.2020

Solicitant: For titular **ECOLAB SRL.**

Adresa juridică: sos. Păcurari nr. 138, et. 2, Iași, cod 700545, Romania

Nr. de identificare de stat – codul fiscal RO10543381

În conformitate cu HG nr. 564 din 10.09.09 și în baza ordinului ANSP nr.182 din 24.12.2020
(nr., data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: *INCIDIN ACTIVE*

1. Date de identificare ale produsului:

1.1 Categoria de produs: biocid

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 2

1.2 Utilizare: *Curățarea și dezinfectarea a suprafețelor, a aparaturii și a echipamentelor medicale. Utilizare în unități sanitare, policlinici, instituții de asistență socială, cabinete medicale, laboratoare.*

1.3 Forma de condiționare și ambalare: pulbere, găleți de 1,5 kg sau plicuri de 160 g.

1.4 Conținut în substanțe active: *Acid peracetic generat in situ din percarbonat de sodium +TAED 1000mg/L în soluția de 2%*

1.5 Categoriile de utilizatori: profesionali, industriali

1.6 Informații privind reglementările aplicabile: HG nr. 564 din 10.09.2009, Ordinul MS nr.299 din 06.05.2010 cu modificările ulterioare.

2. Date de identificare ale producătorului:

2.1 Firma: *ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH*

2.2 Adresa: *Cod-40789, str. Ecolab Allee 1, Monheim am Rhein, Germania.*

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 29.12.2025

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 90 din 16.12.2020

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director interimar



Vasile GUȘTIUC



EC-CERTIFICATE

(Full quality assurance system)



This is to certify that the company

Ecolab Deutschland GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

has implemented and maintains a full quality assurance system which applies to the products at every stage from design to final controls.

Through an audit, documented in a report, performed by DQS Medizinprodukte GmbH, it was verified that the management system fulfills the requirements of

Annex II – excluding Section 4 of Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices

with respect to the following medical devices:

Medical Device Disinfectants according to annex.

The manufacturer is subject to surveillance according to Annex II, Section 5. The CE marking with the Notified Body Identification Number (0297) may be affixed on the devices listed in the certificate. An EC Design Examination Certificate according to Annex II, Section 4 is required for class III devices covered by this certificate. The certificate is in the case of class I(s) devices (I(s) = class I products placed on the market in sterile conditions) limited to the aspects of manufacture concerned with securing and maintaining sterile conditions. The certificate is in the case of class I(m) devices (I(m) = class I devices with a measuring function) limited to the aspects of manufacture concerned with the conformity of the products with the metrological requirements.

Certificate registration no. 002201 MR2

Certificate unique ID 170750848

Effective date 2019-09-09

Expiry date 2024-05-26

Frankfurt am Main 2019-09-09

DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Managing Director

Dr. Thomas Feldmann
Head of Certification Body

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, medical.devices@dqs-med.de

DQS Medizinprodukte GmbH is a Notified Body according to Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices with the Identification Number 0297.



Annex to certificate

Certificate registration No.: 002201 MR2

Certificate unique ID: 170750848

Effective date: 2019-09-09

Ecolab Deutschland GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Device family	Device	Class
Disinfectant for operating theater textiles	Ozonit BNL	IIa
Universal disinfecting detergent for operating theater textiles	Eltra medical	IIa
Disinfectant for automated instrument re-processors	Sekumatic FD Sekumatic FDR	IIb
Disinfectant for dialysis machines	Sekumatic FDG Maranon H Peresal	IIb
Disinfectant for manual re-processing of medical instruments	Sekucid konz Sekucid N / Sekucid N coloré Sekudrill Seku Extra Sekulyse Sekumed Sekusept aktiv Sekusept easy Sekusept Extra N Sekusept forte Sekusept forte S Sekusept Plus with variants: PracticeProtect Instrument Disinfection & Cleaning Liquid Glucoprotamin Sekusept Pulver / Poeder / Poudre / Sekusept Pulver classic / Sekupoudre Sekusept Basic Test Product PD-37	IIb
Disinfectant for the automated chemo-thermal reprocessing of bed pans	Kodra Des	IIa



Annex to certificate
Certificate registration No.: 002201 MR2
Certificate unique ID: 170750848
Effective date: 2019-09-09

Ecolab Deutschland GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Device family	Device	Class
Surface disinfectant for medical surfaces and inventory	Incidin N	Ila
	Incidin active	Ila
	Incidin Extra N	Ila
	Incidin foam	Ila
	Incidin liquid (Spray) with variants:	Ila
	PracticeProtect	Ila
	Surface Disinfection Alcohol (60%) Spray	Ila
	Incidin OxyDes	Ila
	Incidin perfekt	Ila
	Incidin Plus	Ila
	Incidin Pro	Ila
	Incidin Rapid	Ila
	Incidin Alcohol Wipe	Ila
Disinfectants for medical surfaces incl. probes	Incidin OxyFoam with variants:	Ilb
	PracticeProtect	Ilb
	Surface Disinfection Hydrogen Peroxide (1.5%) Foam Spray	
	Incidin OxyFoam S with variants:	Ilb
	OXY FOAM WS	Ilb
	Incidin OxyWipe with variants:	Ilb
	PracticeProtect	Ilb
	Surface Disinfection Hydrogen Peroxide (1%) Wipes	
	Incidin OxyWipe S with variants:	Ilb
Disinfectant for automated endoscope re-processors	OXY WIPE WS	Ilb
Disinfectant for automated endoscope re-processors	Disinfectant ETD	Ilb
Disinfectant for machine preparation of rigid and flexible endoscopes	Olympus EndoDis	Ilb
Disinfectant and cleaning agent for dental suction systems	Dekaseptol Gel	Ila
Prion inactivating cleaner for medical Instruments in automated reprocessors	MetalClean	Ilb



FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

substanței/amestecului Dezinfectant pentru suprafețe

Tipul substanței

Numai pentru utilizare profesională.

†

†

†

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate Dezinfectant pentru suprafețe. Proces manual

Restricții recomandate în
timpul utilizării Rezervat utilizărilor industriale și profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Șoseaua Păcurari 138
Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2 Iași

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgență

Numărul de telefon de la

sanitar internațional și
informare toxicologică

Data redactării/revizuirii

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Lezarea gravă a ochilor

2.2 Elemente pentru etichetă

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)



Provoacă

Prevenire:

folosește materialul

Purtați echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Răspuns:

Clătiți
cu apă timp de mai multe minute.
Îndepărtați lentilele de contact, dacă este cazul și
dacă acest lucru se poate face cu ușurință.
Clătiți și să clătiți
Informați medicul
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă

2.3 Alte pericole

Pericol pentru mediul

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente periculoase

Denumire chimică			Concentrația:
		Toxicitate acută Lezarea gravă a ochilor	
solvenți/aditivi		Toxicitate acută	
		Lezarea gravă a ochilor	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

--	--	--	--

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

	Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurătate. Continuați să clătiți. Se va chema de urgență medicu
	Se va clăti cu multă apă.
Dacă este ingerat	Se va clăti gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.
Dacă se inhalează	și persoana afectată la aer proaspăt. Se va trata și asistență medicală dacă apar

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Consultați Secțiunea 11 pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

corespunzătoare	Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
necorespunzătoare	

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Produși de combustie periculoși	ție de proprietăți de descompunere pot include următoarele substanțe
---------------------------------	--

5.3 Recomandări destinate pompierilor

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

	Se va folosi echipament de protecție individual.
†	
Informații suplimentare	Reziduurile de ardere și apa contaminată care a fost folosită stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

nu este implicat în situații de urgență	Se va asigura ventilație adecvată. Se vor ține persoanele la distanță de locul de curgere/scurgere și într-o zonă în care nu există risc de incendiu și contactul cu pielea și ochii. Atunci când operatorii se expun la concentrații ce depășesc limitele de expunere profesională, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii corespunzătoare, certificate. Asigurați-vă că procesul de curățare este corespunzător și că se vede măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.
intervine în situații de urgență	Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător	Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de suprafață sau freatică.
--------------------------------------	--

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare	Se va mătura și se va introduce folosind un fâraș în containere
----------------------	---

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

condiții de securitate	Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Se va folosi numai cu ventilație adecvată. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Nu inhalați praf și cu înălbitor sau cu alte substanțe. Nu utilizați echipament de protecție necunoscută, trebuie utilizat echipament complet de protecție personală (PPE).
Măsurile de igienă	Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Asigurați-vă accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică

Dezinfectant pentru suprafețe. Proces manual

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

		Formă		Sursă

		Lucrători
		Căi de expunere
		Efecte potențiale asupra sănătății
		Căi de expunere
		Efecte potențiale asupra sănătății

8.2 Controale ale expunerii

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsurări de ordin tehnic

Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanță contaminantă aeropurtată, este suficientă o ventilație generală bună.

Măsurări de protecție individuale

Măsurări de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. și accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și

Protecția ochilor / feței

Ochelari de protecție
Mască de protecție a feței

Protecția mâinilor

Nu este necesar echipament de protecție special.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

Protecția pielii și a corpului

Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția respirației

și mă

ție colectivă sau prin metode, proceduri

ț

ț

Controlul expunerii mediului

Indicații generale

Eventual aveți în vedere î

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

	Nu se aplică.
	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Înghețare	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Punctul inițial de fierbere și	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
	Nu se aplică și
Limită superioară de	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Limită inferioară de explozie	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Densitate relativă a	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Densitatea relativă	
Solubilitate în apă	
Solubilitate în alți solvenți	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Coeficientul de partiție: n octanol/apă	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Descompunere termică	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Vâscozitate cinematică	Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

Proprietăți explozive

Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăți oxidante

9.2 Alte informații

Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

și cu înălbitor sau cu alte produse cu clor

10.4 Condiții de evitat

10.5 Materiale incompatibile

10.6 Produși de descompunere periculoși

Ți de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele
ț

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Informații privind căile

Produs

Toxicitate acută orală

Estimarea toxicității acute

Toxicitate acută prin inhalare

Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate acută dermică

Nu există informații disponibile despre acest produs.

Nu există informații

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Nu există informații disponibile despre acest produs.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

Sensibilizarea căilor Nu există informații disponibile despre acest produs.

Nu există informații disponibile despre acest produs.

Nu există informații disponibile despre acest produs.

Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă Nu există informații disponibile despre acest produs.

organelor țintă specifice) –
expunere unică Nu există informații disponibile despre acest produs.

țintă specifice) –
expunere repetată Nu există informații disponibile despre acest produs.

aspirație Nu există informații disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală Șobolan

Șobolan

Șobolan

solvenți/aditivi
Șobolan

Componente

Toxicitate acută dermică solvenți/aditivi

Efecte potențiale asupra sănătății

Provoacă leziuni oculare grave.

În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Incidin Active

Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

t	t	t s
---	---	-----

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

12.2 Persistența și degradabilitatea

Produs

Surfactanții conținuți de produs sunt biodegradabili conform cerințelor Regulamentului privind detergenții 648/2004/EC.

Componente

Nu se aplică

Ușor biodegradabil.

Nu se aplică

solvenți/aditivi

Ușor biodegradabil.

ț ș

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu există date

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de

12.6 Alte efecte adverse

Nu există date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. Codul deșeurilor trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile ea deșeurilor.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementă deșeurile într-o stație de eliminare a deșeurilor autorizată.

să

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.

§
t

Deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase. Dacă

trebuie să redefinească și să atribuie cel mai potrivit cod de deșeu EWC. Este responsabilitatea generatorului de deșeu să determine și proprietățile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea corectă a deșeului și modul de eliminare în conformitate cu legislația Europeană (Directiva EU 2008/98/EC) și locală.

Reglementare națională

t §
§ t §

§ §
HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea și marcarea sunt în

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

Numărul ONU
Denumirea corectă
ONU pentru expediție

Înconjurător
Precauții speciale

Transport aerian (IATA)

Numărul ONU
Denumirea corectă
ONU pentru expediție

Înconjurător
Precauții speciale

Transport maritim (IMDG/Organizația Maritimă Internațională (IMO))

Numă

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

Denumirea corectă
ONU pentru expediție

nconjurător
Precauții speciale

MARPOL 73/78 și Codul IBC

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

detergenți EC 648/2004 cel puțin 30 % agenți de înălbire pe bază de oxigen
fosfonați, agenți tensioactivi neionici
Alți constituenți
Conține dezinfectanți

Reglementare națională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția tineretului la locul de muncă.

Alte reglementări Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;
și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției
lucrătorilor

15.2 Evaluarea securității chimice a efectuat evaluarea securității

SECȚIUNEA 16: Alte informații

utilizată pentru obținerea clasificării conform cu
REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008

Clasificare	Justificare
Lezarea gravă a ochilor	

Text complet al declarațiilor H

Nociv în caz de înghițire.
Provoacă iritarea pielii.
Provoacă leziuni oculare grave.
Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Text complet al altor abrevieri

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile
Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri
Periculoase pe Șosea; AICS Inventarul Australian al Substanțelor Chimice; ASTM
Americană pentru Testarea Materialelor; bw Greutatea corporală; CLP
Substanță toxică
carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN
Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA Agenția Europeană pentru
Substanțe Chimice; EC Numărul Comunității Europene; ECx Concentrație asociată cu
răspuns x%; ELx Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS Program de urgență; ENCS
Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx Concentrație asociată cu răspunsul ratei
de creștere x%; GHS
Asociația de Transport Aerian
Asociația Internațională pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă
Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO
Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC Inventarul Substanțelor Chimice Existente
Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO Organizația Maritimă
Internațională; ISHL Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Jap Organizația
Internațională pentru Standardizare; KECI Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea;
Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 Doza letală pentru 50% din
populația unui test (Doza letală medi Convenția Internațională pentru Prevenirea
Poluării de la Nave; n.o.s. Fără alte specificații; NO(A)EC
(advers) al concentrației; NO(A)EL
bservat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC
Substanțelor Chimice; OECD Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS
Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT Substanțe persistente,
bioacumulative și toxice; PICCS Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice;
Relație Structură Activitate (Cantitativă); REACH
Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și
Restricția Substanțelor Chimice; RID Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri
Periculoase pe Calea Ferată; SADT Temperatură de auto
Fișă de securitate; SVHC substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI
Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TRGS Regula Tehnică pentru Substanțe
Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN Națiunile
rsistent și foarte bioacumulativ

Preparat de către

Numerele menționate în Fisa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și
1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.

INFORMAȚII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informațiilor referitoare la legislație sau
sănătate sunt indicate printr o bară în marginea din stânga a fișei tehnice de securitate.

țiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte con § ț
§ ț ț
§
ție a calităț ță a § ț §
țiile se referă numai la produsul specificat și e posibil să nu
ț
§

Anexă: Scenarii de expunere

Scenariu de expunere: Dezinfecțant pentru suprafețe. Proces manual

Utilizare pe scară largă de către lucrătorii profesioniști

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

PC35

Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți)

Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la::

ERC8a

Utilizare larg răspândită la interior a agent

Înconjurător

Cantitatea zilnică per sit

Tipul stației de epurare a

Stație de tratare/epurare a apelor uzate municipală

Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:

PROC10

Aplicarea cu rolă sau pensulă

Condiții de operare și măsuri

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală

Viteza de ventilație pe oră

†

†

Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:

PROC8a

Transferul de substanță sau preparate (încărcare/descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în unităților nespecializate

Condiții de operare și măsuri

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală

Viteza de ventilație pe oră

†

†

†

Scenariu de expunere: Dispozitive medicale. Proces manual

Utilizare pe scară largă de către lucrătorii profesioniști

PC35

Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Incidin Active

Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la::

	ERC8a	Utilizare larg răspândită la interior a agenților auxiliari de
Înconjurător		
Cantitatea zilnică per sit		
Tipul stației de epurare a		Stație de tratare/epurare a apelor uzate municipală

Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:

	PROC10	Aplicarea cu rolă sau pensulă
--	---------------	-------------------------------

Condiții de operare și măsuri

	Nu este necesară ventilație de evacuare locală
Ventilație generală	Viteza de ventilație pe oră
†	
†	

Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:

	PROC8a	Transferul de substanță sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităților nespecializate
--	---------------	---

Condiții de operare și măsuri

	Nu este necesară ventilație de evacuare locală
Ventilație generală	Viteza de ventilație pe oră
†	†
†	