



S.A. M-INTER-FARMA

MD 2025, Chișinău, Grenoble, 21

Tel + 373 22 904 – 006, 904 - 005,

Fax + 373 22 904 - 007

NICA IZOSEPTIC

Certificat ISO 9001-2001, Certificat de înregistrare în R.Moldova Nr.00301 din 13.06.2018



Produsul „NICA-IZOSEPTIC” este destinat pentru utilizare:

- în instituțiile medico-sanitare de diferite profiluri, inclusiv staționarele stomatologice, staționarele pediatrie, clinicile obstetrice, instituțiile cu profil obstetric și ginecologic (inclusiv secțiile de neonatologie), în laboratoarele clinice, microbiologice, virusologice ș. a. laboratoare, echipajele de urgență, serviciile de protecție civilă și situații excepționale, transportul sanitar, stațiile de transfuzie a sângelui, focarele de infecții, zonele de situații excepționale; în instituțiile preșcolare și școlare, în instituțiile de alimentație publică și comerț, la obiectele comunale (oficii, frizerii, hoteluri, cămine, saune, saloane de înfrumusețare, instituțiile de asistență socială), la întreprinderile industriei chimice farmaceutice, biotehnologice, alimentare, de către populație în condiții casnice în scopul curățării și dezinfecției diferitor suprafețe tari neporoase, obiectelor, inclusiv contaminate

cu sânge:

- transductoarelor USG;
- stetoscoapelor și fonendoscoapelor;
- vârfurilor aplicatoare (dentare);
- suprafețelor în încăperi, mobilierului dur și moale, inclusiv saltelelor, tetierelor, cotierelor, aparaturii de iluminare, radiatoarelor, jaluzelelor, pardoselelor, tapițeriilor;
- suprafețelor echipamentului medical și aparatelor (inclusiv suprafețelor aparatelor de respirație artificială, echipamentului pentru anestezie și hemodializă);
- suprafețelor externe a nodurilor nedetașabile și detaliilor instalațiilor și echipamentului pentru fizioterapie;
- echipamentului în laboratoarele clinice, microbiologice, virusologice ș.a., sticlelor port-obiect (curățarea de ulei de imersie);
- mănușilor (din latex, neopren, nitril, ș.a. materiale, rezistente la substanțele chimice), îmbrăcate pe mâinile personalului instituțiilor medicale cu scopul decontaminării mănușilor în cazul contactului cu poluările organice, materialul infecțios după contactul cu bolnavii infecțioși și materialul, lichidele biologice, excrețiile bolnavilor, precum și la întreprinderile, unde este necesară respectarea regulilor aseptice;
- obiectelor pentru îngrijirea bolnavilor, jucăriilor din materiale neporoase, materiale netede (plastic, sticlă, metal ș.a.); inventarului sportiv ș.a.;
- aparatelor telefonice, monitoarelor, (tehnicii de calcul și de birou), cu excepția monitoarelor LCD;
- echipamentului și suprafețelor echipajelor de salvare și transportului sanitar;
- covorașelor din plastic și polipropilenă;
- solariilor și lămpilor pentru solarii;
- suprafeței interne a încălțăminteii în scopul profilaxiei infecțiilor fungice.

Produsul „NICA-IZOSEPTIC” poate fi utilizat de asemenea, și **în calitate de antiseptic cutanat:**

- pentru prelucrarea mâinilor chirurgilor, asistentelor medicale bloc operator, asistentelor medicale secție obstetrică, ș.a. personal care participă la efectuarea operațiilor în instituțiile medico-sanitare (inclusiv stomatologice), precum și la nașteri în maternități ș.a.;
- pentru prelucrarea pielii prealabil introducerii cateterelor și puncției articulațiilor;
- pentru prelucrarea curbării cubitale a donatorilor la stațiile de transfuzie a sângelui, ș.a. ;

- pentru prelucrarea pielii câmpului operator și injectabil a pacienților în instituțiile medico sanitare, echipajele de salvare, în instituțiile de asigurare socială (casele pentru bătrâni, invalizi, ș.a.), instituțiile balneo - sanatoriale, instituțiile penitenciare, în zonele de situații excepționale;
- pentru prelucrarea igienică a mâinilor personalului medical în instituțiile medico sanitare, instituțiile de medicină de urgență, personalului laboratoarelor bacteriologice, virusologice, micologice, imunologice, clinice ș.a.), personalului farmaciilor și organizațiilor farmaceutice, în situații excepționale;
- pentru prelucrarea igienică a mâinilor lucrătorilor medicali ai instituțiilor preșcolare și școlare, instituțiilor de asigurare socială (casele pentru bătrâni, invalizi ș.a.), instituțiilor balneo-sanatoriale, instituțiilor sportive, instituțiilor penitenciare;
- pentru prelucrarea igienică a mâinilor personalului întreprinderilor de parfumerie și cosmetică, farmaceutice, biotehnologice și microbiologice, întreprinderilor de alimentație publică, comerț (inclusiv casieri, ș.a. personal care lucrează cu cupiurile bănești), industriei alimentare (de producere a cărnii, laptelui, de prelucrare avicole, cofetărie ș.a.), crescătoriilor avicole, zootehnice, suinicole, cunice, obiectelor serviciilor comunale (inclusiv frizerii, saloane cosmetice, saloane de înfrumusețare, ș.a.);
- pentru prelucrarea igienică a mâinilor, labei piciorului, pielii câmpului operator la populație în condiții casnice.

Acțiune: Produsul „NICA-IZOSEPTIC” posedă acțiune bactericidă (inclusiv față agenții cauzali ai infecțiilor nosocomiale (intraspitalicești), micobacteriile tuberculozei, agenții cauzali ai infecțiilor intestinale), asupra virusurilor (agenților cauzali ai infecțiilor respiratorii virale acute, herpesului, poliomielitei, hepatitelor de toate tipurile, inclusiv hepatitelor A, B și C, infecției HIV, infecțiilor adenovirale, ș.a.), fungicidă (asupra levurilor din genul *Candida*, dermatofitelor din genul *Trichophyton*).

Compoziția: Produsul „NICA-IZOSEPTIC” prezintă soluție transparentă incoloră gata pentru utilizare cu miros slab de alcool izopropilic. Produsul conține alcool izopropilic – 65% și didecidimetilamoniu clorid (SCA) – 0,2% în calitate de principii active, precum și adaosuri funcționale.

Suprafețele și obiectele se prelucrează cu ajutorul unui șervețel, în prealabil umectat abundant în produsul „NICA-IZOSEPTIC”, sau se irigă cu ajutorul pulverizatorului o singură dată de la distanța de 30 cm, până la umectarea lor completă.

Timpul de expunere dezinfectantă – 30 sec în caz de infecții bacteriene (cu excepția micobacteriilor tuberculozei); 3 min – în caz de infecție tuberculoasă, infecții fungice și virale.

La necesitate suprafața se șterge cu un șervețel curat. După, șervețelul se aruncă în recipientul pentru deșeuri medicale pentru dezinfecția ulterioară și reciclare.

Produsul este ambalat în flacoane din plastic cu capacitatea de 0,2dm³; 0,5dm³; 0,75dm³; 1,0dm³ cu pulverizator și în canistre cu capacitatea de 5dm³. 1 doză la apăsarea pulverizatorului conține 0,25±0,01ml produs.

Termenul de păstrare al produsului – 3 ani în ambalajul etanș al producătorului.

