

	• Enabled (Activat) (implicit) • Disabled (Dezactivat) • Pacient dezactivat
Date (Data)	Afișează data la care a fost modificat testul ultima dată.
Time (Timp)	Afișează ora la care testul a fost modificat ultima dată.
Efectuare controale pentru reactivii încărcăți în funcție de	Vă permite să specificați ce kituri de reactivi este necesar să procesați pentru QC. Opțiunile sunt: • Lot: Efectuați QC pe un singur kit per lot (implicit) • Kit: Efectuați QC pentru fiecare kit din lot
Operator	Afișează ID-ul operatorului conectat când a fost editat ultima dată testul.
Reaction mode (Mod de reacție) (listă)	Vă permite să selectați tipul de reacție care apare pentru test. Opțiunile sunt: • End Up (Terminare sus) (default) • Terminare jos • Limită cinetică superioară • Limită cinetică inferioară
Primary Wavelength (Lungime principală de undă) (listă)	Vă permite să selectați lungimea de undă primară utilizată pentru a măsura concentrația testului. Opțiunile sunt: • 340 (Implicit) • 380 • 404 • 412 (c8000) sau 416 (c4000/c16000) • 444 (c8000) sau 450 (c4000/c16000) • 476 • 500 • 524 • 548 • 572 • 604 • 628