

Quality Control Data sheet & Instructions for Use
Fiche de Contrôle Qualité et Conditions d'Utilisation

Freeze-dried Brucellosis negative serum / Sérum négatif Brucellose lyophilisé

Product code / Code Produit: MRINEG-BRU
Batch / N° de lot: 002
Date of manufacture / Date de fabrication: 10/2012

Description:

Freeze-dried bovine serum free of anti-*Brucella* specific antibodies. Contains merthiolate (0.03%).
Sérum de bovin lyophilisé ne présentant aucun anticorps spécifique anti-*Brucella*. Contient du merthiolate (0.03%).

Storage / Conservation:

- Store between +2°C and +26°C before reconstitution.
Conservation entre +2°C et +26°C avant reconstitution.
- Store at -20°C in aliquots after reconstitution up to 1 year.
Conservation à -20°C en aliquots après reconstitution pendant 1 an.
- Never thaw more than 3 times.
Ne jamais décongeler plus de 3 fois.
- May be stored undiluted at +4°C in liquid form up to 2 days.
Peut être stocké deux jours à +4°C sous forme liquide et non diluée.

Shelf life:

This product does not bear an exact expiry date because it is freeze-dried and very stable over time. As a general rule, it may be kept for up to 10 years at +2 – 26°C from its production date in its freeze-dried form.

Ce produit ne porte pas de date de péremption, étant donné qu'il est lyophilisé et par conséquent, très stable dans le temps. De règle générale, il peut être conservé jusqu'à 10 ans à partir de sa date de fabrication sous forme lyophilisée.

Quality Control / Contrôle de qualité:

This serum was found negative when tested by / Ce sérum a été trouvé négatif lorsqu'il a été analysé par :
ID Screen® Brucellosis Serum Indirect Multi-species ELISA
Complement Fixation Test CFT / RFC
Rose Bengal RSA / EAT

Use / Utilisation:

GB

- 1- Reconstitute in **1 ml** of distilled water.
- 2- Wait 1-2 min and mix well in order to homogenize the solution.

FR

- 1- Reprendre dans **1 ml** d'eau distillée.
- 2- Attendre 1-2 min et bien agiter pour tout homogénéiser.



Quality Control Manager : S. Lesceu
Responsable Contrôle Qualité
stephanie.lesceu@id-vet.com



Director : Philippe Pourquier
Directeur
philippe.pourquier@id-vet.com