

BREATHALYZER

ALCOSCAN


AL8800 BT

AL8800 BT este un etiloteșt elegant și compact, care se poate conecta la o aplicație pentru smartphone prin funcția Bluetooth BLE, putând gestiona datele și le poate partaja prin SMS, SNS și e-mail.

În plus, poate fi utilizat fără conectarea la smartphone, în modul „Standalone”, fiind practic și util pentru verificarea personală.

Funcția îmbunătățită de verificare a calității „Sistem de autodiagnosticare (SDS)” dintr-o aplicație va verifica calitatea senzorului etiloteștului și va asigura un rezultat precis și fiabil al testului.


Componente

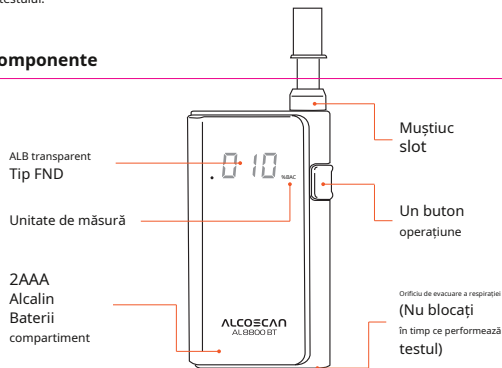

Cuprins

Etiloteșt, carcasă cu fermoar, muștiucuri (x5), baterii AAA (x2), cutie exterioră și manual de utilizare

Mod de utilizare: FĂRĂ asocierea aplicației ISOBER

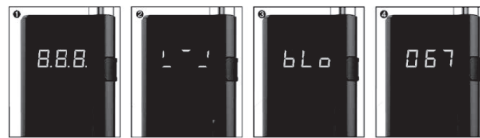

1. Apăsăți butonul de alimentare.

Dacă apăsați în continuare butonul de pornire, o serie de teste după calibrare vor fi afișate prin comutare.

* de exemplu: **000.005** Testat de 6 ori după calibrare

2. Încălzire până când puteți vedea semnul „blo (suflare)”.

3. Suflați prin muștiuc în unitate timp de 4 secunde.

4. Rezultatul va fi afișat timp de 10 secunde și se va opri automat.

* Funcționarea testului pasiv:

Apăsăți butonul de pornire o dată când statusul este „blo(blow)”, rezultatul va fi afișat ca P(PASS) sau F(FAIL) în funcție de valoarea limită presetată.

Mod de utilizare: CU asocierea aplicației ISOBER

1. Descărcați aplicația ISOBER din App Store sau Google Play și conectați-vă.

2. Activați modul Bluetooth al dispozitivului mobil pentru a-l asocia cu unitatea AL8800 BT.

3. Porniți unitatea AL8800 BT, apoi confirmați că pe ecran apare „APP”.

4. Apăsăți butonul de testare dintr-o aplicație, apoi unitatea va fi gata de suflare, afișând starea „blo(suflare)”.

5. Suflați prin muștiuc în unitate timp de 4 secunde, urmând instrucțiunile din aplicație.

6. Dacă modul cameră este activat, camera dispozitivului mobil va face o fotografie în timp ce suflați.


Dacă vreți să verificați testul real de alcoolemie, modul cameră va fi util.

7. Aplicația vă va oferi informații precum rezultatul testului, data și ora testului, modelul unității, starea senzorului, locația GPS.

8. De asemenea, utilizatorul poate lăsa un comentariu despre testare, precum și poate partaja prin SMS, e-mail și servicii de rețele sociale.

9. Până când unitatea afișează „APP”, utilizatorul poate efectua testul consecutiv folosind aplicația ISOBER.

Cum se schimbă bateriile

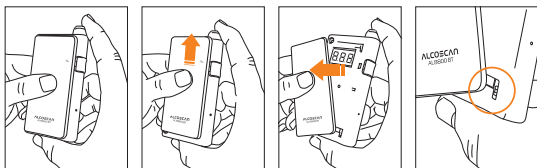

Atenție

a. Vă rugăm să așteptați cel puțin 20 de minute după ce mâncați sau beți înainte de testare.

Alcoolul rămas în gură sau chiar excesul de salivă pot interfera cu testarea.

Aceasta include apa de gură pe bază de alcool sau produse similare.

b. Nu suflați fum, salivă sau alți contaminanți în piesa bucală, deoarece senzorul se poate deteriora.

c. NU utilizați AL8800 BT ca instrument pentru a conduce sub influența alcoolului.

d. A se păstra departe de temperaturi extreme și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

e. Vă rugăm să nu folosiți baterii cu mangan. Folosiți DOAR baterii alcaline.

Afișaj de avertizare



Proba de respirație nu a fost suficient de puternică pentru măsurare.

După încălzirea automată, vă rugăm să suflați puternic și constant în timpul prelevării de probe.

Nivelul de încărcare al bateriei este scăzut. Vă rugăm să înlocuiți bateriile.

Dacă testați peste 1.000 de teste sau 12 luni, AL8800 BT va afișa semnul „CAL”. Apăsăți butonul de pornire o dată, apoi unitatea se încălzește pentru test.

Eroare senzor - Vă rugăm să contactați un centru de service autorizat

AL8800 BT este asociat prin Bluetooth cu aplicația ISOBER. Se va opri în 5 minute.

Specificații

Tip senzor		Senzor pentru pile de combustibil
Baterie		Baterie alcalină AAA, 2 buc.
Greutate		83g (inclusiv baterii)
Dimensiune (mm)		97,5 (Înălțime) X 53,8 (Lățime) X 18 (Grosime)
Indicarea Rezultatul testului	Afișa	0,00 ~ 5,00 g/l
		0,00 ~ 5,00 ‰
		0,00 ~ 0,50 %BAC
		0,00 ~ 2,50 mg/l
		.000 ~ .500 %BAC (3 zecimale)
		000 ~ 500 mg/100 ml
Timp de încălzire		5 secunde ~ 120 secunde
Timp pentru analiză		În 5 secunde (la 0,050% BAC, 24°C)
Precizie		±10% (la 0,050% BAC)
Temperatura de lucru / depozitare		5°C ~ 40°C / 0°C ~ 50°C
Muștiuc		MP1000
Interval de calibrare		La fiecare 1.000 de teste sau la 12 luni (oricare survine primul)
Certificat		CE RED, FCC, Bluetooth SIG
		BLE 4.2
Caracteristică suplimentară		Memento pentru calibrare
		Compatibil cu aplicația mobilă iSOBER

Garanție

Producătorul garantează că produsul nu prezintă defecte de fabricație sau de material (cu excepția recalibrării: recalibrarea nu este acoperită de garanție) în condiții normale de utilizare timp de DOISPREZECE (12) luni de la data achiziției. Obligația producătorului în temeiul acestei garanții se limitează la înlocuirea, reparația sau repararea unității dacă este returnată împreună cu dovada achiziției. Această garanție este nulă dacă unitatea a fost modificată sau deteriorată în mod intenționat.

Recalibrare și service

Vă rugăm să contactați distribuitorul local