

STERISEPT WIPES



Șervețele fără alcool pentru dezinfectarea și curățarea rapidă dispozitivelor medicale

200 buc.

LOT 14100521

05/2023

RO/MD Șervețele de dezinfectare și curățare fără alcool pentru dispozitive medicale invazive și neinvazive și suprafețe rezistente la alcool. Șervețele Sterisept au un spectru larg de activitate bactericidă (inclusiv MRSA, VRE), micobacterică și fungică. Produsul este, de asemenea, activ împotriva virusurilor (inclusiv HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota și Noro) și sporilor (inclusiv Clostridium difficile)

UTILIZARE: Șervețele Sterisept sunt șervețele gata de utilizare. Ștergeți întreaga suprafață cu un șervețel impregnat, asigurând acoperirea completă. Timpul de contact este de cel puțin 60 de secunde sau în funcție de eficacitatea cerută (a se vedea tabelul). După utilizare, închideți imediat capacul pentru a preveni uscarea șervețelilor.

INGREDIENTE: 100 g produs conține ingrediente active: clorură de didecil-dimetil-amoniu (DDAC) 0,45 g; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin 0,45 g.

STANDARDE: EN13624, EN13697, EN13704, EN13727, EN14348, EN14476, EN14561, EN16615.

PRECAUȚII. Toxic pentru mediul acvatic du efecte pe termen lung. Aruncați conținutul și/sau recipientele în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și respectiv deșeurile de ambalaje.

Eficacitate	Timp de contact
Bactericid (incl. MRSA, VRE)	1 min
Levuricid	1 min
Bactericid și levuricid	1 min
Micobactericid	5 min
Toate virusurile încapsulate	0,5 min
Rotavirus/ Norovirus	0,5 min
Fungicid	10 min
Clostridium difficile	15 min

AS Chemi-Pharm Tănăssilma tee 11, Tănăssilma küla, Saku vald, Harjumaa, 76406, Eesti, www.chemi-pharm.com, tel: +372 6778806

DitaEstFarm SRL, str.-la Burebista 23, MD-2032, Chișinău
Tel.: +37322405419, e-mail: office@dita.md

5°C 30°C CE 0537 3M

PACHETUL A FOST DESCHIS(DATA):

4 742124 009632

010.23.3