



Test Procedură

1

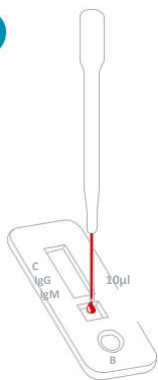

Ținând pipeta vertical, colectați proba (sânge integral / ser / plasmă) până la prima lărgire (aprox. 10 µL) și distribuiți-o în godeul de probă (S) al casetei de testare.

2

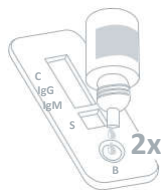

Ținând flaconul tampon pe verticală, distribuiți 2 picături (aprox. 80 µL) de tampon în puțul tampon (B) al casetei de testare. Evitați formarea bulelor de aer.

3



Așteptați până când vor apărea rândurile colorate. Citiți rezultatele după 10 minute. Nu așteptați mai mult de 20 de minute înainte de a citi rezultatele.


[O descriere detaliată oate fi găsită în prospect.](#)

Interpretarea rezultatului

+



-

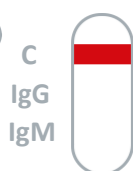

NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test

Test reapid pentru detectarea anti-SARS-CoV-2 IgG și IgM în proba de sânge integrală, ser sau plasmă.

Produs	Material pentru probă	Sensibilitate	Specificitate	Product code	Dimensiunea ambalajului
NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test	Sânge integrală, ser sau plasmă	86.8 % (IgM) 97.4 % (IgG)	98.6 % (IgM) 99.3 % (IgG)	243001N-10	10 teste / cutia