

4. Manipulați mecanismul de apucare în timp ce curățați cu perii cu păr moale (4 mm x 25 mm și 10 mm x 49 mm) până când sunt îndepărtate resturile și murdăria. Neacționarea componentelor în mișcare poate determina blocarea murdăriei sau a resturilor în interiorul capului camerei.
5. Clătiți cu apă deionizată la un minim de 25°C timp de cel puțin 1 minut, cu un minim de 6 litri, până când se elimină toate urmele vizibile de resturi și detergenți.
6. Ștergeți cu o cârpă curată, fără scame, până când capul camerei este vizibil fără picături de apă și condens. Asigurați-vă că lentilele sunt curate și fără urme.
7. Repetați instrucțiunile de curățare manuală după cum este necesar.
8. Pentru a asigura conectivitatea de la capul camerei la controlerul camerei, se recomandă curățarea periodică a marginii cardului capului camerei cu tampoane îmbibate în alcool (izopropil) și bumbac. Consultați Figura 1.
 - Îmbibați tamponul de bumbac cu o cantitate mică de alcool.
 - Așezați tamponul de bumbac pe o parte a marginii cardului și ștergeți de la o latură la alta pentru a elimina acumularea reziduurilor.
 - Repetați acești pași pentru cealaltă parte a marginii cardului.



Figura 1

Măsurile de precauție privind sterilizarea

1. Utilizarea soluțiilor de dezinfectare pentru o ștergere exterioară nu va steriliza capetele camerei și NU se recomandă.
2. Instrucțiunile furnizate mai jos nu garantează sterilitatea. Instituția dvs. este responsabilă de validările privind asigurarea sterilității.
3. Capetele camerei care nu sunt supuse unui ciclu uscat (Utilizare imediată) pot fi umede la finalizarea ciclului de sterilizare și nu ar trebui să fie stocate pentru utilizare ulterioară. Neutilizarea imediată ar putea compromite sterilitatea capetelor camerei.
4. Pentru a împiedica buclele cablului, este recomandat să înfășurați cu atenție cablul camerei în vederea pregătirii pentru sterilizare. Consultați Figura 2 pentru bobina recomandată a cablului pentru capul camerei.



Figura 2