

Oprezan

Dezinfectant High Level pentru instrumente chirurgicale

Soluție de sterilizare la rece



Fără aldehide & Fără fenoli

Putere ridicată de curățare cu enzime

Nu necesită neutralizare

PENTRU UTILIZARE MANUALĂ ȘI PENTRU APARATELE ULTRASONICE DE CURĂȚARE

OPREZAN este un dezinfectant special pentru instrumente chirurgicale cu acțiune mărită de curățare, este ușor de utilizat și complet inofensiv față de utilizator și mediul înconjurător. Acesta oferă un nivel înalt de dezinfectare, chiar și în mediile cele mai contaminate, principiul de acțiune bazându-se pe sistemul format din acidul peracetic activ și peroxidul de hidrogen, care se formează în urma reacției chimice între apă și produs. OPREZAN face parte dintr-o generație nouă de dezinfectanți, cu o compoziție specială care nu se evaporă și nu cere curățarea prealabilă, este biodegradabil în mediul natural și are o compatibilitate excelentă cu suprafețele din sticlă, cauciuc, orice tip de polimer și metal. OPREZAN este ideal pentru aparatele ultrasonice de curățare și pentru instrumentele de stomatologie.

Formele de utilizare și dozarea

Acest dezinfectant nu necesită o pre-curățare a instrumentelor, este suficient dacă murdăria este eliminată cu ajutorul unei perii. Pentru pregătirea soluției de lucru utilizați tabela:

Concentrația soluției de lucru	Raport de diluare	Cantitatea de OPREZAN
1% (2000 ppm PAA)	1 L sol. de lucru	10 gr
1% (2000 ppm PAA)	5 L sol. de lucru	50 gr
0,5% (1000 ppm PAA)	1 L sol. de lucru	5 gr
0,5% (1000 ppm PAA)	5 L sol. de lucru	25 gr

Pregătiți soluția 5-10 minute înainte de procesul de dezinfectare. Scufundați în cuvă instrumentele care trebuie dezinfectate. Toate suprafețele trebuie să fie în contact cu soluția preparată. Asigurați-vă că pe suprafața instrumentelor nu apar bule de aer. Pentru a garanta eficiența procesului de dezinfectare, trebuie respectată perioada recomandată de acțiune. După perioada de expunere, scoateți instrumentele din cuvă, clătiți-le atent cu apă distilată și apoi uscați-le.

Soluția de lucru preparată este stabilă timp de 24 de ore.

Proprietăți antimicrobiene

- Bactericid (Inclusiv Tb –MRSA, VRE)
- Fungicid
- Virucid (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Adeno și BVDV)
- Sporid

Zonele de utilizare

Utilizat pentru dezinfectarea instrumentelor termolabile chirurgicale/stomatologice utilizate în diferite domenii cum ar fi CMI (Chirurgie Minim Invasivă), stomatologie, chirurgie, endoscoape rigide, terapie intensivă, anestezie și laboratoare. OPREZAN poate fi utilizat pentru endoscoape flexibile numai în cazul în care producătorul acestor tipuri de endoscoape a indicat compatibilitatea produsului cu Acidul Peracetic.

Destinat pentru utilizare manuală prin metoda de imersie și pentru aparatele ultrasonice de curățare.

Timpul de expoziție

Soluție 1% (2000 ppm PAA):

Bactericid, fungicid, distrugerea virușilor: **5-10 minute**

Sporicid (sterilizare chimică): **10 minute**

Soluție 0,5% (1000 ppm PAA):

Bactericid, fungicid, distrugerea virușilor: **10 minute**

Sporicid: **15 minute**

Compoziția

- TAED 35 %
- Percarbonat de sodiu 55 %
- inhibitori de coroziune, enzime (amilază, lipază, protează), stabilizator, activator, ingrediente inactive 10 %

Proprietăți chimice și fizice

Aspect: Pudră de culoare albă
pH (soluție apoasă 1%): 8,5 +/- 0,5

Informații de ambalare

5 x 2 kg și 500 g în recipiente din HDPE
30 x 50 g în pachete înfoliate

Termen de valabilitate: 3 ani, în condiții de păstrare corespunzătoare.

Rapoartele testelor științifice

EN 13624: Testarea cantitativă turbidimetrică, pentru evaluarea activității fungicide a dezinfectanților chimici pentru instrumentele utilizate în domeniul medical (faza 2, pasul 1) Tulpini testate: *Candida albicans*, *Aspergillus niger*

EN 13727: Testarea cantitativă turbidimetrică, pentru evaluarea activității bactericide a dezinfectanților chimici pentru instrumentele utilizate în domeniul medical (faza 2, pasul 1) Tulpini teste: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*

EN 14348: Testarea cantitativă turbidimetrică, pentru evaluarea activității micobactericide a dezinfectanților chimici utilizate în domeniul medical inclusiv dezinfectanți pentru instrumente, (faza 2, pasul 1) Tulpini testate: *Mycobacterium terrae*

EN 14561: Testarea cantitativă pe suporturi de germeni pentru evaluarea activității bactericide pentru instrumentele utilizate în domeniul medical, (faza 2, pasul 2) Tulpini testate: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*

EN 14562: Testarea cantitativă pe suporturi de germeni pentru evaluarea activității fungicide sau de inactivare a drojdiei pentru instrumentele utilizate în domeniul medical, (faza 2, pasul 2) Tulpini testate: *Candida albicans*, *Aspergillus niger*

EN 14563 : Testarea cantitativă pe suporturi de germeni pentru evaluarea activității micobactericide sau tuberculocide pentru instrumentele utilizate în domeniul medical, (faza 2, pasul 2) Tulpini testate: *Mycobacterium terrae*

EN 13704: Dezinfectanți și antiseptici chimici - activitate sporidică de bază - Metoda și cerințele de testare (faza 2, pasul 1) Tulpini testate: *B. subtilis*,

EN 14476 +A1: Dezinfectanți și antiseptici chimici - Testarea cantitativă turbidimetrică, pentru evaluarea activității virucide în domeniul medical - Metoda și cerințele de testare (faza 2, pasul 1)

Teste pentru activitatea virucidală: BVDV, Vaccinia, Adeno

-Teste împotriva virusului hepatitei B (inclusiv HIV) Conform RKI și DVV

- Teste împotriva BVDV (înlocuitor pentru virusul hepatitei C (HCV)) Conform RKI și DVV

Comunicat de presă: 13.01.2012

Actualizare: Revizia 2

Data reviziei: 01.06.2016

KUZEY SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

www.kuveysaglik.com.tr Phn: 03122566696 Fax:03122566697

ERGAZI MAHALLESİ GERSAN SANAYİ SİTESİ 2310 SOK NO:47

YENİMAHALLE ANKARA / TURKEY



Soluții profesionale pentru controlul infecțiilor!