

Instrucțiuni pentru scaunul cu roțile manual

Scopul dispozitivului

Scopul scaunului cu roțile este de a muta sau transfera persoanele aflate în nevoie, singure sau cu ajutorul unui asistent.

Model :JL809



Metodă de instalare și utilizare

- a. Scoateți scaunul cu roțile din cutie și deschideți-l.
- b. Consultați ilustrațiile 1 și 2.



ilustrație 1



ilustrație 2

- b. Deschideți și rotiți suporturile pentru picioare în poziția corectă, consultați ilustrația 3. Strângeți bine șurubul de sub suportul pentru picioare pentru a evita căderea acestuia.
- c. Capacitate maximă de încărcare 100 kg. Utilizatorii nu au voie să depășească capacitatea maximă de încărcare.



ilustrație 3

Instruire

La prima utilizare a scaunului cu roțile, trebuie să fie însoțite de persoane care să îi instruiască pe aceștia cu privire la utilizarea acestuia, prindeți

mânerul pentru a porni roțile. Cum se utilizează frâna.

Notă: Frânele roților trebuie acționate împotriva ultimelor roți din spate înainte de a vă așeza sau de a vă ridica din scaunul cu roțile.

Eliminare

După terminarea utilizării, pivotati plăcile de bază în sus, în poziție verticală.

Cu ambele mâini, prindeți mijlocul tapiteriei scaunului, la marginea din față și din spate, și ridicați-le.

Depozitare

Depozitarea scaunului cu roțile într-un mediu uscat și ventilat

Întreținere

a. Verificați strângerea șuruburilor și stabilizarea scaunului cu roțile înainte de utilizare.

b. Curățați frecvent și dezinfectați periodic.

AVERTISMENT

TOATE avertismentele și precauțiile din acest manual trebuie respectate.

-NU TRAVERSAȚI, NU URCĂȚI SAU COBOARĂȚI rampe sau pante mai mari de 10 grade.

NU încercați să urcați sau să coborâți o pantă cu o peliculă de apă, gheață sau ulei.

-NU încercați să treceți peste borduri sau obstacole. Acest lucru poate provoca răsturnarea scaunului cu roțile și vă poate provoca vătămări corporale sau deteriorarea scaunului cu roțile.

-NU stați pe cadrul scaunului cu roțile.

-NU utilizați placa pentru picioare ca platformă. Când vă urcați sau coborâți din scaunul cu roțile, asigurați-vă că plăcile pentru picioare sunt în poziție ascendentă.

-NU prindeți roțile din spate.

.