



Stilou piesă de mână cu triplă opțiune - Ref. 130321

Sterilitatea este garantată dacă ambalajul nu a fost desfăcut, nu este rupt sau deteriorat

Descriere:

Piesă de mână cu control manual, triplă opțiune, de unică folosință, cu electrod lamă, cablu de 3,05 m și teacă. Permite utilizarea modurilor Tăiere monopolară, Coagulare și ABC® într-un singur stilou. Pentru utilizare cu generator CONMED® cu ABC®.

Utilizare la un singur pacient. Steril.

Scopul utilizării:

Stiloul cu control manual triplă opțiune ABC se utilizează ca un stilou electrochirurgical cu comutare manuală, cu capacitățile de tăiere și de coagulare. Adicional stiloul cu control manual triplă opțiune ABC are posibilitatea de a conduce gazul Argon și curentul electrochirurgical la locul efectuării operației chirurgicale în scop de coagulare.

Tensiunea maximă a generatorului: 6,5 kV la vârf.

Contraindicații:

Aceste dispozitive nu trebuie utilizate niciodată atunci când:

- Există semne vizibile de deteriorare la exteriorul dispozitivului, precum crăpături, tăieturi, înțepături, indentații, abraziuni, modificări de culoare sau deteriorarea conectorului.
- Electrochirurgia monopolară convențională este neadecvată sau nesigură, precum la mici apendice, în circumcizie sau chirurgia degetului.
- În prezența gazelor inflamabile, soluții de pregătire sau câmpuri chirurgicale inflamabile, gaze oxidante precum protoxidul de azot, sau în medii bogate în oxigen.

Avertisment:

- Se pot produce emboli gazoși venoși la utilizarea coagulării cu fascicul de Argon. Pentru a reduce riscul emboliei gazoase nu utilizați coagularea cu fascicul de Argon pentru perioade lungi, nu permiteți gazului de argon să facă contact direct cu vasele deschise, reglați debitul gazului la cea mai mică valoare capabilă să obțină efectul clinic dorit, nu permiteți curgerea gazului de argon pentru mai mult de 5 secunde fără a tăia sau coagula țesut.
- Pentru a preveni arsurile accidentale nu activați generatorul până când electrodul nu este asigurat și în poziție pentru a transmite energia la țesutul țintă. Opriti generatorul înainte de a îndepărta electrodul. După o activare prelungită așteptați ca vârful electrodului să se răcească.
- Nu testați dispozitivul ABC® făcând scântei cu electrodul activ la placa pacientului sau la alte obiecte.
- Nu prindeți direct cablul piesei de mână cu instrumente metalice la câmpurile chirurgicale. Activarea stiloului piesă de mână în contact cu instrumente metalice poate produce arsuri la interfața țesut/instrument.
- Nu permiteți cablului dispozitivului să stea paralel cu sau în imediata apropiere a cablurilor sau a altor dispozitive electrice.
- Pentru a evita arsurile nu permiteți niciodată cablului asociat cu acest dispozitiv să vină în contact cu pielea pacientului sau să atingă operatorul.
- Electrochirurgia este potențial periculoasă pentru pacienții cu stimulatoare cardiace, cardioverter-defibrilator automat implantabil, stimulator neural sau alte implante active. Energia de înaltă frecvență poate deteriora sau afecta negativ implantele active. Poate apărea fibrilația ventriculară.
- Pentru a evita arsurile plasați întotdeauna accesoriile electrochirurgicale asociate într-un loc sigur, izolat, precum o teacă, atunci când nu sunt utilizate.
- Nu introduceți în și nu îmbibați cu lichid stiloul piesă de mână sau cablul acestuia.
- Acest produs conține ftalați care în timpul utilizării pot difuza în pacient. Studiile pe animale au arătat că expunerea de nivel înalt la DEHP poate afecta fertilitatea masculină și dezvoltarea reproductivă. Trebuie avută grijă pentru a reduce la minim expunerea copiilor și a femeilor gravide sau care alăptează.