

BACTRYL WIPES

Instrucțiuni de folosire

SOLUȚIE DE DETERGENT ȘI DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE INVAZIVE ȘI NEINVAZIVE

Descriere: Soluție de detergent și dezinfectant gata de utilizare, bactericid, virucid, levuricid, fungicid, microbactericid pentru suprafețe și dispozitive medicale invazive și neinvazive.

Compoziție: clorură de benzalconiu g <1 - Digluconat de clorhexidină g <1 - Isazone® g 0,001, coformulanți și apă purificată q.s. la 100 ml.

Proprietăți microbiologice: soluție de curățare și dezinfectie gata de utilizare pe suprafețe și dispozitive medicale în 30 de secunde (EN16615) și 1 minut (dezinfectie de suprafață EN14885).

BACTERICID, LEVURICID și VIRUCID (virusuri încapsulate): 1 minut. **FUNGICID și MICROBACTERICID:** 5 minute.

Mod de utilizare: După ce ați îmbrăcat echipamentele de protecție personală (DPI), ștergeți cu șervețelul suprafețele și dispozitivele medicale și așteptați timpul de contact prevăzut. Clătiți dispozitivele medicale înainte de utilizare dacă acest lucru este prevăzut.

Instrucțiuni de utilizare:

- 1) Scoateți capacul exterior și pe cel interior.
- 2) Scoateți colțul liber al primului șervețel din centrul rolei și introduceți-l în orificiul din mijlocul capacului.
- 3) Puneți capacul înapoi și scoateți șervețelul până când tăierea este evidențiată; desprindeți cu fermitate șervețelul, blocând următorul șervețel cu dopul din mijlocul capacului.

Avertizări: Pericol. Respectați timpii de contact afișați pe etichetă și în instrucțiunile de utilizare. Produsul trebuie manipulat de personal calificat, cu standarde de siguranță adecvate, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare prevăzute și cu fișa de siguranță. Nu ingerați. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Pentru uz spitalicesc, ambulatorii medicale și stomatologice. Data expirării se referă la produsul din ambalaj, depozitat corespunzător. Nu utilizați produsul după data de expirare.

(H) Indicații de pericol: (H22S): Lichid și vapori ușor inflamabili (H319). (H319): Provoacă leziuni oculare grave. (H412): Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung.

(P) Sfaturi de precauție: (P210): A se ține departe de sursele de căldură, de suprafețele fierbinți, de scântei, de flăcări de libere sau de alte surse de aprindere. Nu fumați. P280 Purtați mănuși / protejați-vă ochii/ protejați-vă fața. (P305+P351+P338): ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți bine timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă se poate face cu ușurință acest lucru. Continuați să clătiți. (P337+P313): Dacă iritația oculară persistă, consultați un medic. (P273): A nu se arunca în mediul înconjurător. Depozitare: A se păstra la temperatura camerei, departe de sursele de căldură.

Conținut: 3 ml per șervețel. Un borcan conține 110 șervețele.

Data revizuirii: 11/2019 Număr de urgență: +39.069145399



 CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.
Via Laurentina, 169
00071 POMEZIA (RM) - Italia
Tel.: +39.06.9145399
Fax: +39.06.9146099
www.cantelmedical.it

