	INSTRUCȚIE DE UTILIZARE	DC/PROD/1 Rev.03-2022 Ediție: 1.1 din 2023.01.09 Înlocuiește: 1.0 Pagina 1 din 4
	SPRAY DEZINFECTANT RAPID FĂRĂ ALCOOL „WANCARE ONESURFACE” PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE REF: KAF G21	

DESCRIERE GENERALĂ

SPRAY DEZINFECTANT RAPID FĂRĂ ALCOOL „WANCARE ONESURFACE” PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE este un produs fără alcool folosit pentru dezinfectarea și curățarea RAPIDĂ a suprafețelor dispozitivelor medicale și dispozitivelor medicale. Este gata de utilizare. Nu conține aldehide și fenoli. Se bazează pe o combinație de peroxid de hidrogen și amoniu cuaternar. Produsul nu provoacă decolorarea sau pătarea materialului utilizat.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Produsul este utilizat pentru dezinfecția rapidă a dispozitivelor medicale neinvazive, incubatoarelor, aeratoarelor utilizate în stomatologie, precum și a dispozitivelor medicale cu dezinfecție obligatorie, utilizate în examinările ORL.

COMPONENTE PRINCIPALE

REF: KAF G21-1 - SPRAY DEZINFECTANT FĂRĂ ALCOOL PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE – 750ML - 1 bucată.

SAU

REF: KAF G21-2 – SPRAY DEZINFECTANT FĂRĂ ALCOOL PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE – 1000 ML - 1 bucată.

SAU

REF: KAF G21-3 - SPRAY DEZINFECTANT FĂRĂ ALCOOL PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE – 5000 ML - 1 bucată.

CARACTERISTICI


Componența chimică	COD ATC
Peroxid de hidrogen, 0.84%	D08AX01
Clorura de alchildimetilbenzil amoniu, 0.56%	D08AJ06
Clorura de didecildimetil amoniu, 0.49%	D08AJ06
HEDP (CAS 7414-83-7)	-
Miristilaminoxid (CAS 3332-27-2)	-
Apă deionizată	-

MECANISM DE ACȚIUNE

Produsul posedă acțiune dezinfectantă prin efecte bactericide, virucide, sporocide și fungicide. Mecanismul de acțiune a produsului constă, în inhibarea activității enzimatică (prin procesul de oxidare), având loc perturbarea semi-permeabilității, transportului activ și metabolismului energetic al membranei. La fel, formele vegetative ale bacteriilor sunt supuse acțiunii produsului, fiind distruse.

MOD DE UTILIZARE

Produsul este folosit pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale precurățate, neinvazive, netede, și neporoase (sonde cu ultrasunete etc.). Dezinfectarea are loc prin metoda de pulverizare. Gata pentru utilizare, **nu diluați!**

	INSTRUCȚIE DE UTILIZARE	DC/PROD/1 Rev.03-2022 Ediție: 1.1 din 2023.01.09 Înlocuiește: 1.0 Pagina 2 din 4
	SPRAY DEZINFECTANT RAPID FĂRĂ ALCOOL „WANCARE ONESURFACE” PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE REF: KAF G21	

- Deconectați dispozitivele electrice înainte de aplicare.
- Se pulverizează pentru a acoperi toată suprafața ce necesită a fi dezinfectată.
- Distanța recomandată pentru procedura de pulverizare este de 30 cm dintre produs și suprafața ce necesită a fi dezinfectată.
- Așteptați 30 secunde - 5 minute.
- Ștergeți cu o cârpă curată de bumbac.

Materiale de suprafață utilizabile: sticlă, ceramica, silicon, plastic, PVC, acrilic, polimer, policarbonat, polistiren, HDPE, oțel inoxidabil, porțelan.

STANDARDE DE EFICACITATE

Efect	Metoda de testare	Microorganism	Expoziție
Bactericidă	EN 13727	Staphylococcus aureus	1 minut
		Pseudomonas aeruginosa	
		Enterococcus hirae	
Fungicidă	EN 13624	Candida albicans	
		Aspergillus niger	
Micobactericidă	EN 14348	Mycobacterium avium	
		Mycobacterium terrae	
Virucidă	EN 14476	Polyvirus type 1 virus	
		Human adenovirus type 5 virus	
		Murine norovirus	
Sporicidă	EN 17126	Bacillus subtilis	
	EN 13704	Bacillus subtilis	


⚠ AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

- Asigurați-vă că citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza produsul.
- Nu contactați ochii.
- Folosiți îmbrăcăminte de protecție (mănuși și echipament de protecție a ochilor/feței).
- ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura, nu provocați vărsăturile.
- În cazul contactului prelungit cu pielea, spălați cu multă apă și săpun. Solicitați asistență medicală dacă apare iritația pielii.
- Nu reutilizați ambalajul produsului finit.
- ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. În caz de iritare a ochilor, consultați un medic.
- Evitați răspândirea în mediu.
- A se păstra în recipientul original.
- Aruncați deșeurile și ambalajele uzate în conformitate cu reglementările oficiale.

CONTRADICȚII

Nu trebuie utilizat direct (fără pre-curățare) pe suprafețe și instrumente care conțin compuși organici (sânge, țesuturi, urină etc.).

Nu trebuie utilizat împreună cu alte substanțe chimice, deoarece poate reacționa cu substanțele chimice.

	INSTRUCȚIE DE UTILIZARE	DC/PROD/1 Rev.03-2022
	SPRAY DEZINFECTANT RAPID FĂRĂ ALCOOL „WANCARE ONESURFACE” PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE REF: KAF G21	Ediție: 1.1 din 2023.01.09 Înlocuiește: 1.0 Pagina 3 din 4

Nu trebuie utilizat de persoanele sensibile la sensibile la alcool etilic, alcool izopropilic, propionat de didecilmetilpoli(oxetil)amoniu.

REAȚII ADVERSE

Informația indisponibilă.

STERILIZARE

Nu se sterilizează.

MOD DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORTARE

A se păstra la 0°C - 25°C în ambalajul original într-un loc răcoros și uscat.

Termen de valabilitate în ambalaj închis din data producerii - 2 ani.

Termen de valabilitate după deschidere - 6 luni.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CLASA DISPOZITIVULUI MEDICAL

IIb

Numărul de înregistrare în Republica Moldova:

KAF G21-1 - DM000368055

KAF G21-2 - DM000368056

KAF G21-3 - DM000368057

STANDARDE DE CALITATE

EN ISO 13485:2016

EN 62366-1:2015

EN 1041:2008+A1:2013

EN ISO 14971:2012

EN 14885:2018

TS 6773:1989

EN ISO 15223-1:2016

EN 13704:2018

PRODUCĂTOR

KAF Grup Sag. Hizm. Ins. San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Atakent Mah. 221 Sk. NO: 3A Rota Office A Blok Kat:14 D:82-83

K.CEKMECE / ISTANBUL / TURKIYE

Tel: +90 212 213 21 65, E-mail: info@kafgrup.com

www.wancare.com.tr

REPREZENTANT AUTORIZAT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Anxietas Ug,

Industriestrasse 43, 50389 Berzdorf

KOLN / GERMANY

E-mail: info@anxietas.de

REPREZENTANT AUTORIZAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Lismedfarm S.R.L.


sos. Muncești 167/B, MD-2002 Chișinău,

mun. Chișinău, Republica Moldova

www.lismedfarm.md

Oficiu (pentru vânzări)

+373-22-56-94-91, +373-22-56-94-90

	INSTRUCȚIE DE UTILIZARE	DC/PROD/1 Rev.03-2022
	SPRAY DEZINFECTANT RAPID FĂRĂ ALCOOL „WANCARE ONESURFACE” PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE REF: KAF G21	Ediție: 1.1 din 2023.01.09 Înlocuiește: 1.0 Pagina 4 din 4

oficiu@lismedfarm.md

Pentru reclamații

+373-22-80-47-98

calitate@lismedfarm.md