

Thermoton® N

neutralizator pentru mașini de spălat automate

- bazat pe acid fosforic
- reduce considerabil calcificările
- conține inhibitori de coroziune



CE

Proprietățile produsului

Thermoton® N este un neutralizator lichid, acid pentru utilizarea în termodezinfectie pentru dispozitive medicale. Acesta este complet lipsită de tensidă.

Thermoton® N se adaugă la apa de clătire după prima utilizare a agenbtului de curățare alcalin.

Domeniul de utilizare

Thermoton® N este utilizat pentru neutralizarea reziduurilor alcaline din ciclul principal de clătire, precum și pentru înlăturarea eventualelor calcificări în aparat. În plus, Thermoton® N evită decolorări maronii de instrumente medicale. Zone tipice de utilizare pentru Thermoton® N sunt de reprocesare a instrumentelor chirurgicale în sala de operație, în anestezie și în unitatea de terapie intensiva.

Thermoton® N este compatibil cu RKI * - (BGA-) și Vario programe și poate fi utilizat în toate tipurile de termodezinfectie

Aplicarea

În general, o concentrație de 1 ml / litru de lichid de spălare este suficientă (0,1%).

În caz de mare murdărie doza poate fi crescută la 3 ml / litru de lichid de spălare (0,3%).

Dozarea este în mod normal efectuată automat de către pompa de dozare a mașinii.

Compoziția

Acidul fosforic, agenți de complexare, inhibitori de coroziune.

Proprietăți fizice și chimice

Aspectul concentratului:	soluție incoloră
pH-valoare, concentrat:	0.8 +/- 0.4
Greutatea specifică (20 °C):	1.14 g/ccm +/- 0.010

Unități de livrare

Unitate	Unitate de livrare	PZN	REF-Nr.
5 L container	3 x 5 L	-	00-140-050
10 L container	1 x 10 L	-	00-140-100
30 kg container	1 x 30 kg	-	00-140-300
200 kg container	1 x 200 kg	-	-

Aplicarea SIDA

Apăsați pe container, pompă dozatoare pentru containere.

Informații speciale

Provoacă arsuri. În caz de contact cu ochii clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul. Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi / față. În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, consultați imediat medicul (arătați eticheta dacă este posibil).

Înregistrare și certificare

Respectă UE-orientare 93/42 CEE pentru dispozitive medicale.

