

Instrucțiuni pentru sterilizare

1. Inspectați capetele camerei pentru deteriorări, murdărie și coroziune înainte de sterilizarea cu abur.
2. Înfășurați individual capetele camerei. În Statele Unite, utilizați folie de sterilizare aprobată de FDA.

Cicluri recomandate de sterilizare în Statele Unite:

Metoda	Ciclul	Temperatura minimă de expunere	Timpul minim de expunere	Ciclul uscat
Abur (înfășurat)	Pre-vid	132°C	4 minute	30 minute
Abur (neînfășurat)	Gravitate	132°C	10 minute	N/A

Cicluri de sterilizare recomandate în afara Statelor Unite:

Metoda	Ciclul	Temperatura minimă de expunere	Timpul minim de expunere	Ciclul uscat
Abur (înfășurat)	Pre-vid	132°C	3 minute	30 minute
Abur (înfășurat)	Pre-vid	134°C	3 minute	30 minute
Abur (înfășurat) [doar IM8120/IM8121]	Gravitate	132°C	15 minute	20 minute
Abur (neînfășurat)	Gravitate	132°C	10 minute	N/A

NOTĂ: După autoclavare, permiteți capetelor camerei să se răcească înainte de conectarea la unitatea de comandă sau atașarea ansamblului capului/cuplajului camerei la aparatul optic. Acest lucru va ajuta la prevenirea voalării și a unei citiri greșite a informațiilor în timpul inițializării.

NOTĂ: Capetele camerei autoclavabile CONMED au fost testate pentru capacitatea de rezistență la 134°C cu o durată de expunere de 18 minute.

NOTĂ: În practica Sterilizării cu aburi pentru utilizarea imediată (IUSS), înfășurată sau neînfășurată, parametrii de timp și temperatură asigură sterilizarea în cameră. Întreținerea după sterilitatea post-ciclu pentru un dispozitiv procesat de IUSS înfășurată sau neînfășurată depinde de manipularea și livrarea aseptică în câmpul steril.

Alte procese

Capetele camerei autoclavabile/cuplajele CONMED sunt materiale compatibile cu procesele STERRAD¹ și STERIS. Cu toate acestea, CONMED nu a efectuat teste de validare a sterilizării pentru procesele STERRAD și STERIS, iar instituția dvs. este responsabilă pentru validarea asigurării sterilității normale.

Planul de întreținere

O întreținere regulată și adecvată a echipamentului dvs. este cea mai bună metodă de a vă proteja investiția. Este esențial ca echipamentul să fie întreținut așa cum este programat pentru a-și păstra performanțele și fiabilitatea optime, ceea ce vă va recompensa cu o performanță mai sigură și mai puțin problematică în timp. Echipamentul nu poate fi reparat pe teren. Departamentul dvs. de service autorizat CONMED este cel mai bine informat despre acest echipament și accesoriile sale și vă va oferi servicii competente și eficiente. Service-ul la CONMED la intervalul recomandat de service este obligatoriu pentru a vă menține garanțiile în vigoare. Orice servicii și/sau reparații efectuate de orice unitate neautorizată de reparații pot conduce la o performanță redusă a echipamentului sau la defectarea echipamentului. Consultați secțiunea „Informații de contact”.

Capetele camerei din seria IM8000 trebuie returnat la fiecare 12 luni pentru service.

Sfârșitul utilizării

Nerespectarea instrucțiunilor de reprocesare adecvate și a intervalului specificat de service pot duce la o durată de viață redusă a dispozitivului. Durata de viață preconizată a produsului este de 7 ani de la data la care este introdus pentru prima dată pe piață. CONMED va continua să efectueze service-ul capetelor camerei timp de 7 ani după uzura produsului.

Informații de contact

Pentru informații suplimentare sau pentru demonstrarea unui produs, contactați reprezentantul regional de vânzări CONMED sau sunați la 1-800-237-0169 în S.U.A.

¹ STERRAD este o marcă înregistrată a Produselor avansate de sterilizare (ASP), divizie a companiei Ethicon, Inc., o companie Johnson & Johnson.