

Descrieri ale statusurilor ecranului Reagents (Reactivi)

Puteți utiliza informațiile despre statusul reactivilor pentru a determina dacă kit-ul de reactivi trebuie înlocuit sau dacă trebuie încărcate kit-uri suplimentare în sistem. Tabelul de mai jos afișează statusul în ordinea în care sunt sortate:

Status (Stare)	Descriere
Empty (Gol)	Recipientul de reactivi este gol.
Low (Scăzut)	Volumul rămas al reactivului este sub numărul configurat de teste pentru notificare de alertă scăzută.
Expired (Expirat)	Data de expirare a reactivului a fost depășită și nu a fost a fost suprascrisă.
Exceeded onboard stability (Stabilitate la încărcare depășită)	Stabilitatea reactivului la încărcare a fost depășită dar nu a fost suprascrisă.
Expires soon (Expiră curând)	Reactivul va expira înainte de timpul de final configurat pentru fereastra de evaluare.
Kit disabled (Kit dezactivat)	Kit-ul de reactivi a fost dezactivat.
Expiration overridden (Dară de expirare depășită)	Operatorul a suprascris un reactiv care a expirat.
Override Stability (Suprascriere stabilitate)	Operatorul a suprascris un reactiv care a depășit timpul de stabilitate la încărcare.

Pentru a afișa această fereastră, consultați [Accesați fereastra Plan my day \(Planificarea zilei de lucru\)](#), pagina 5-27.

Fereastra Plan my day (Planificarea zilei de lucru) - fereastra Calibrations (Calibrări)

Din fereastra Calibrations (Calibrări) al ferestrei Plan my day (Planificarea zilei de lucru) puteți vizualiza:

- Module ID (ID Modul)
- Nume test
- Data și ora de expirare a calibrării
- Pozițiile reactivului
- Numărătoarea testelor de reactivi rămase
- Descrierea statusurilor pentru curbele de calibrare a testului

Informațiile afișate sunt asociate cu calibrările care pot necesita intervenția operatorului pentru a procesa cu succes probele fără întrerupere în intervalul de timp definit de utilizator. Consultați [Descrieri ale statusurilor ecranului Calibrations \(Calibrări\)](#), pagina 5-32.

Atunci când sistemul nu poate afișa toate datele pe un singur ecran, se afișează o elipsă (...). Vizualizați raportul imprimat pentru a vedea toate datele.