

(Traducere română)

## Instrucțiuni de utilizare

Rolele SURGIPACK și pungile sunt proiectate pentru sterilizarea dispozitivelor medicale, recomandat de a fi sterilizate cu abur sau oxid de etilenă înainte de utilizare.

**Măsurile de precauție recomandate:**

**Păstrați într-un loc răcoros și uscat**

**Nu se utilizează în cazul în care bobina sau punga este deteriorată**

## Instrucțiuni de utilizare:

**Rola (60g /m<sup>2</sup> hârtie / grosime 52um)**

1. Tăiați lungimea corespunzătoare din rolă, menționăm că mărimea dispozitivului împachetat ar trebui să fie mai mică de 3/4 lungime de pungi.
2. Dispozitivul trebuie să fie curat și uscat înainte de a fi pus în rolă.
3. Trebuie să obțineți o parte fierbinte din secțiunea rolei.
4. Așezați dispozitivul medical în rolă.
5. Instrumentul Sharpe trebuie pus pe partea opusă deschisă, astfel încât să asigure siguranța la deschiderea pungilor
6. Astfel devine fierbinte cealaltă parte a rolei.
7. Puneți plicurile sigilate cu direcția de la hârtie la hârtie. Apoi, puneți-le în sterilizator
8. Aplicați agentul de sterilizare: STEAM (aburi) sau EO (oxid de etilenă)
9. Temperatura de sigilare recomandată: 180 °C -190 °C
10. Păstrați pungile sterilizate în locuri uscate, curate, și să atrageți atenție la lumina directă.
11. Verificați pungile înainte de utilizare, în cazul în care este deteriorată, vă rugăm să nu utilizați.