

Se afișează mesajul CONNECT HANDPIECE	• Piesa de mână nu este conectată în siguranță. • Piesa de mână și / sau sistemul defect(ă).	• Conectați sigur piesa de mână la controler. • Înlocuiți piesa de mână. Dacă simptomul este corectat, trimiteți piesa de mână pentru service. • Dacă nu, trimiteți sistemul pentru service.
--	---	--

3.4 Program de întreținere

Întreținerea regulată și corectă a echipamentului dvs. este cea mai bună modalitate de a vă proteja investiția. Este esențial ca echipamentul dvs. să fie întreținut așa cum este programat pentru a-și păstra performanța și fiabilitatea optime, ceea ce vă va răsplăti în timp cu performanțe mai sigure și mai puțin problematice ale produsului.

Echipamentul nu poate fi reparat pe teren. Departamentul dvs. de service autorizat ConMed Linvatec are cele mai multe cunoștințe despre acest echipament și accesoriile sale și va oferi servicii competente și eficiente. Service-ul la ConMed Linvatec la intervalul de service recomandat este obligatoriu pentru a menține în vigoare garanțiile produsului. Orice service și / sau reparație efectuate de orice firmă de reparație neautorizată pot duce la o performanță redusă a echipamentului sau la defecțiuni ale echipamentului. (Consultați secțiunea „5.0 SERVICIUL CLIEŢI”).

Piesa de mână „shaver” se returnează la fiecare 12 luni pentru service.

4.0 SPECIFICAȚII TEHNICE

Echipamentele electrice medicale sunt conforme și au fost testate cu privire la electrocutare, foc, compatibilitate electromagnetică, mecanic și alte specificații, în conformitate cu UL60601-1, CAN / CSA C22.2 nr. 601.1-M90, IEC60601-1: 1988 + AL1991 + A2: 1995, ES60601-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2010 , CAN / CSA C22.2 Nr.60601-1-1-08 și IEC60601-1: 2005 + C 1: 2006 + C2: 2009.

Testat la IEC60601-1-2: 2007 și Partea 15 a Regulilor FCC după cum urmează: 1) Sistemul nu poate provoca interferențe dăunătoare; 2) Sistemul va accepta interferențe, inclusiv interferențe care ar putea duce la o funcționare nedorită. Dacă intervin interferențe, separați instrumentele. Pentru mai multe informații, contactați serviciul pentru clienți.

4.1 Specificații tehnice ale produsului

4.1.1 Piese de mână

Advantage Piese de mână „shaver” fără butoane (D9820) și cu 2 butoane (D9824)	
Clasificare :	Clasa I (destinată conectării la consola chirurgicală clasa I). Evaluarea tipului părții aplicate depinde de consola chirurgicală.
Protecție la pătrunderea lichidelor:	IPX0 (obișnuit)
Mod de operare:	Încărcare intermitentă
Viteza de operare: *	500 - 10.000 rpm, înainte / înapoi 500 - 4.000 cpm , Oscilant cu rotație unică sau multiplă
Cuplu (nominal):	15,5 N•cm